


Calypso


ベッドからの移乗

1

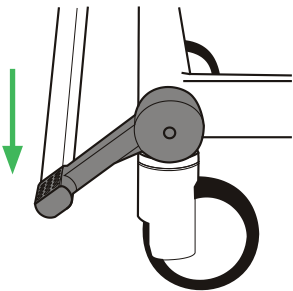


必要な場合、ベッドのブレーキをかけます。

2

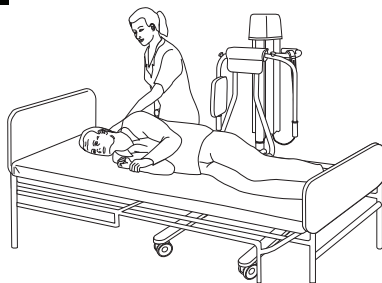


ベッドレールを降ろします。患者を Calypso リフトとハイジーンチェアの反対方向に向かせます。

3

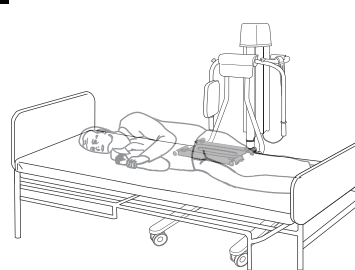


シートを、ベッドの上で、できるだけ患者の近くに配置します。

4

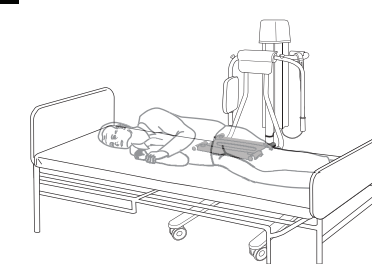


ベッドをしっかりと押すよう、シートを降下させます。

5

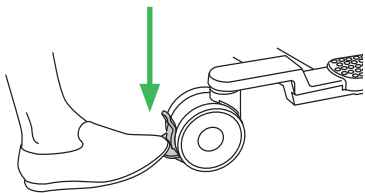

すべてのキャスターのブレーキをかけます。

6

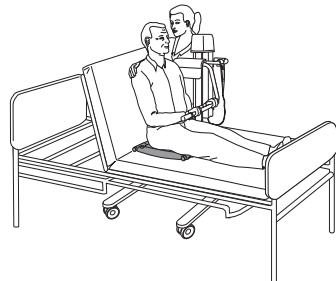


患者を横転させ、うつ伏せにします。手であるいはベッドの背もたれを起こすことで、患者が直立に座れます。

7




ハンドレスト(A)を折りたたみます。患者を前方に傾けさせ、背もたれ(B)を引き出します。

8

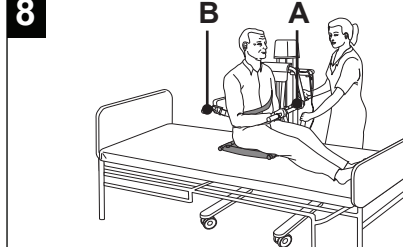


安全ベルトを締めます。患者をシートの中央に配置し、背もたれ(B)に背を向けさせ、ハンドレスト(A)に手を置かせます。

9

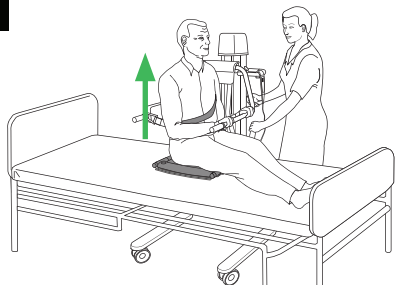

シートを十分に上げて、ベッドから離します。

10

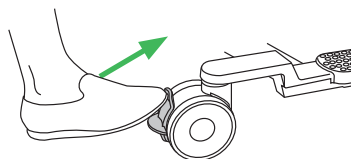

キャストブレーキを解除します。

ベッドへの移乗

11




警告

怪我を避けるため、絶対に患者を一人にさせないでください。


患者の挟み込みを防止するために、移乗中は患者の髪の毛、両腕および両足を体に密着させて、指定されたサポートを使用するようにしてください。

12

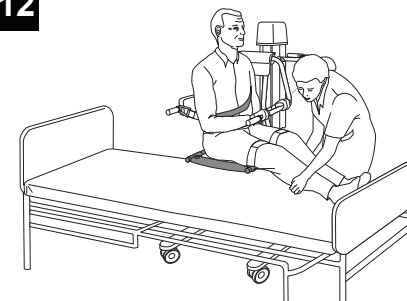


患者が脚を持ち上げられるように介助しながら、Calypsoリフトおよびハイジーンチェアをベッドから引き上げます。

13

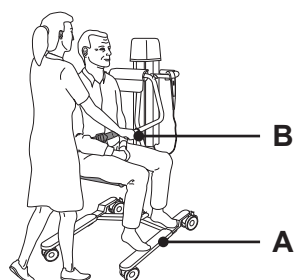

Calypsoリフトおよびハイジーンチェアを降下させ、患者がフットレスト(A)に足を置けるようにします。移動中は移動ハンドル(B)を使用します。

1

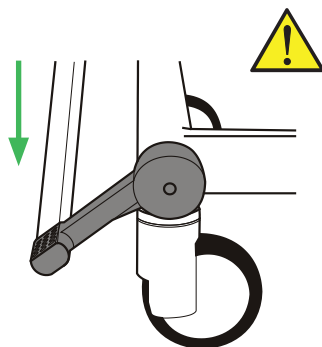

必要な場合、ベッドのブレーキをかけます。


2



Calypsoリフトおよびハイジーンチェアの座席の高さを調整し、マットレス上に安全な距離を保ち、挟み込みが発生しないようにします。


ベッドのサイドレールを下に下げます。

3

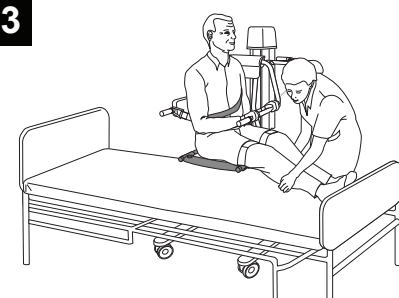


患者が脚を持ち上げられるように介助しながら、Calypsoリフトおよびハイジーンチェアをベッド上で移動させます。

4

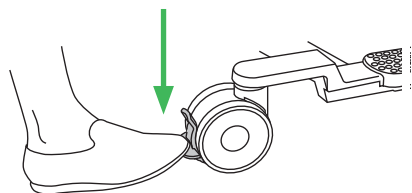


すべてのキャスターのブレーキをかけます。

5

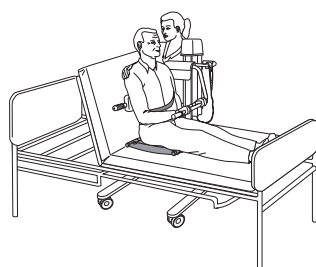


体の部分を挟み込まないようにします。Calypsoリフトおよびハイジーンチェアの座席を降下させ、ベッドの上しっかりと押しつけられるようにします。必要に応じて、ヘッドエンドを上げます。

6

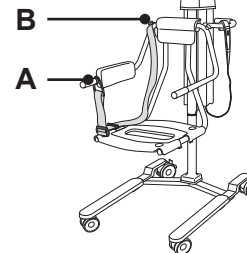


安全ベルトを緩め、移動ハンドル(A)またはノブ(B)から片方の端を取り外し、安全ベルトを取り外します。

7

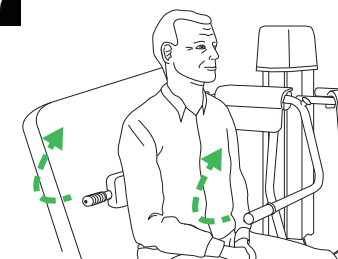


背もたれとハンドレストを折り畳みます。上体を反らせてベッドへ横になれるよう患者を介助します。

8

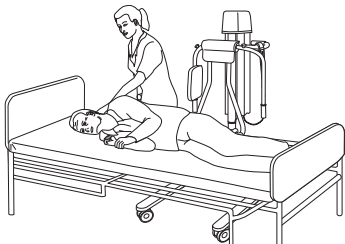


必要に応じて、ヘッドエンドを下げます。患者を横向きに寝かせて、Calypsoリフトおよびハイジーンチェアとは逆を向くようにします。

9

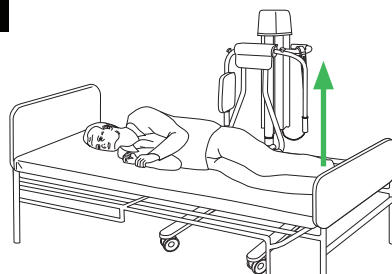

Calypso リフトおよびハイジーンチェアのシートを上昇させ、ベッドから離します。

10

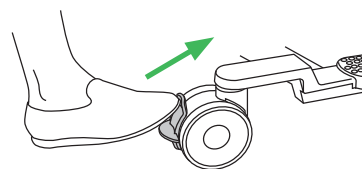

キャスターブレーキを解除します。

11

Calypsoリフトおよびハイジーンチェアをベッドから引き上げます。患者を横転させ、うつ伏せにします。ベッドのサイドレールを引き上げます。

車椅子からの移乗

1

注記

患者が車椅子からCalypsoリフトおよびハイジーンチェアへ移動できるようにするには、患者が自分で横向きに移動したり、立ち上がったりするのに十分な体力を持っている必要があります。

2




車椅子のブレーキをかけます。

Calypsoリフトおよびハイジーンチェアを車椅子の隣に置きます。

3


Calypsoリフトおよびハイジーンチェアを調整し、その座席が車椅子の座席よりもわずかに高くなるようにします。可能であれば、車椅子の座席を重ねます。

4

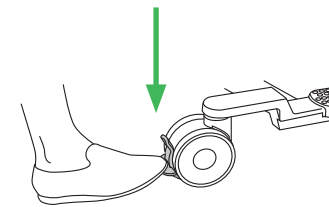


Calypsoリフトおよびハイジーンチェアのブレーキをかけます。

5

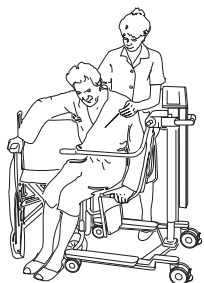


患者を介助して、Calypsoリフトおよびハイジーンチェアに移動させます。

6

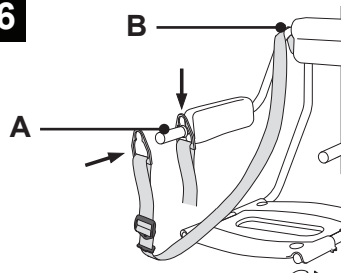

安全ベルトを移動ハンドル(A)に取り付けます。
安全ベルトのもう一方の端をノブ(B)に固定します。

7

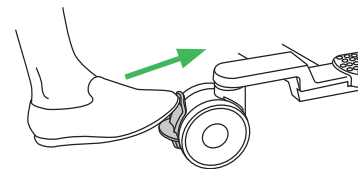

Calypsoリフトおよびハイジーンチェアのブレーキを解除します。

8



移動中は移動ハンドルを握ってください。


車椅子への移乗

1

注記

患者がCalypsoリフトおよびハイジーンチェアから車椅子へ移動できるようにするには、患者が自分自身で横向きに移動したり、立ち上がったりにするのに十分な体力を持っている必要があります。

2

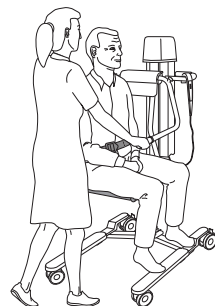

患者の足がフットレストに、手がハンドレストにあることを確認します。

3



車椅子のブレーキをかけます。


車椅子のアームレストを取り外し、車椅子のフットレストを折り畳みます。

Calypsoリフトおよびハイジーンチェアを車椅子の隣に置きます。

4


Calypsoリフトおよびハイジーンチェアを調整し、その座席が車椅子の座席よりもわずかに高くなるようにします。可能であれば、車椅子の座席を重ねます。

5

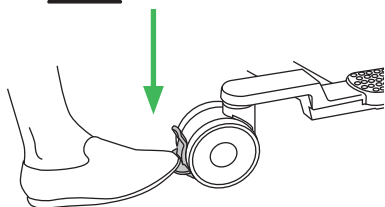


Calypsoリフトおよびハイジーンチェアのブレーキをかけます。

6

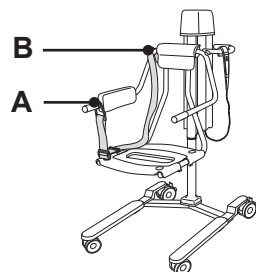

安全ベルトを緩め、移動ハンドル(A)またはノブ(B)から片方の端を取り外し、安全ベルトを取り外します。

7

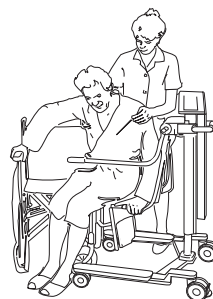

患者を介助して、車椅子に移動させます。

8

患者が快適かつ安全に車椅子に座っていることを確認してください。

患者の入浴

1



警告

下降時の障害物に注意してください。

患者の腕と足を体に密着させます。

安全ベルトが適切に固定されていることを確認してください。

患者を放置しないでください。

2




体の部分を挟み込まないようにします。

Calypsoリフトおよびハイジーンチェアを上昇させ、浴槽のふちに空間を確保します。


患者様を浴槽の上に移動します。

3

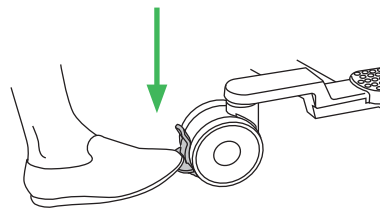

Calypsoリフトおよびハイジーンチェアのブレーキをかけます。

4

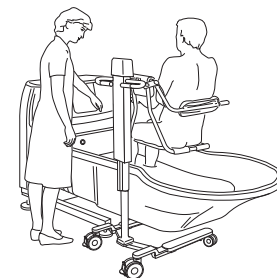

浴槽を快適な高さに上げます。

5



Calypsoリフトおよびハイジーンチェアの座席を降下させ、バスタブの底部につくようにします。

安全ベルトを取り外します。

6




ハンドレストを前方に引きます。

背もたれを少し傾けます。

患者を入浴させます。

7

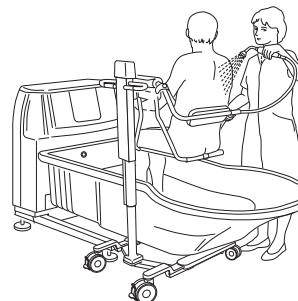


ハンドレストを下げます。

背もたれを上昇させます。

安全ベルトを締めます。

患者にシャワーを使用します。

8

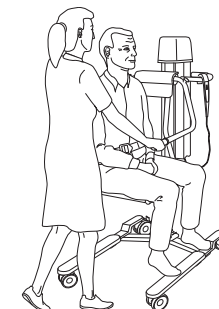

患者を拭いて乾かします。

患者に服などを着せます。

患者を部屋に戻します。

