

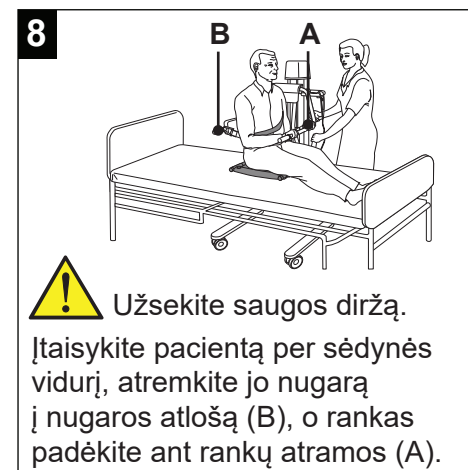
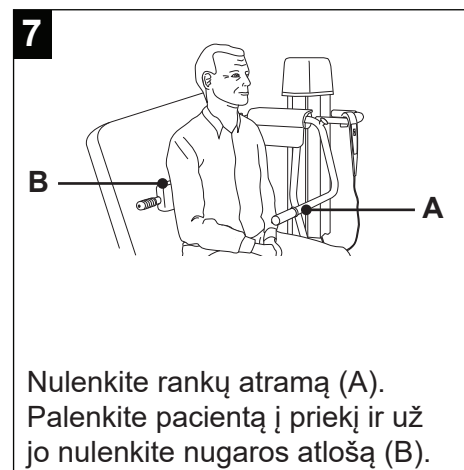
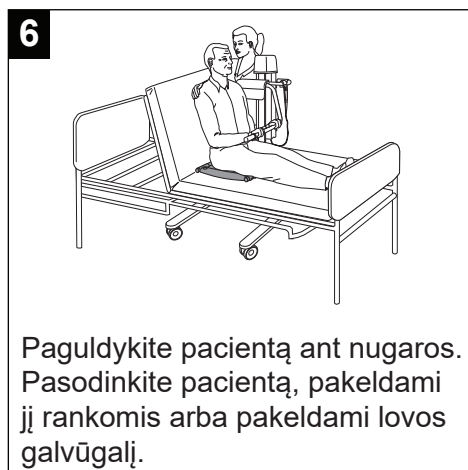
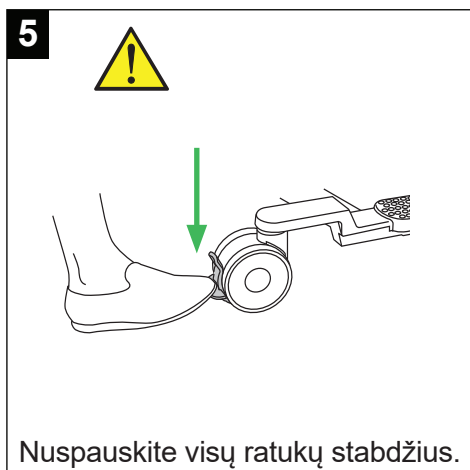
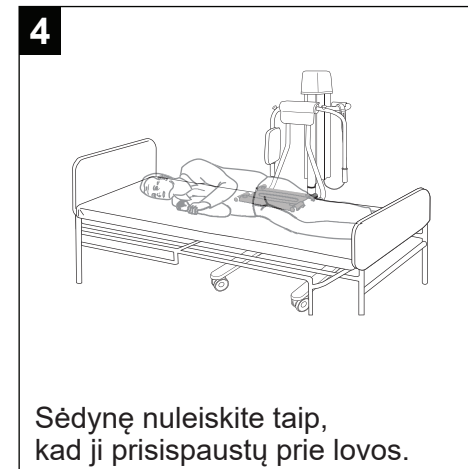
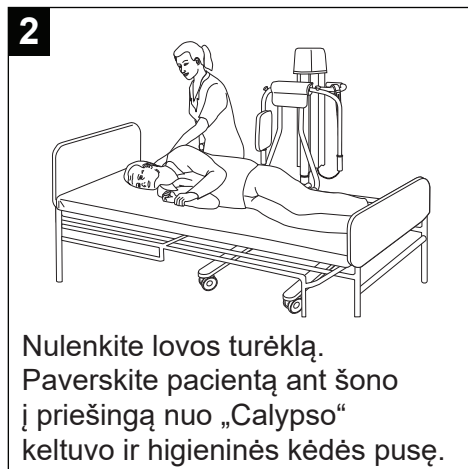


# Calypso

## Perkėlimas nuo lovos

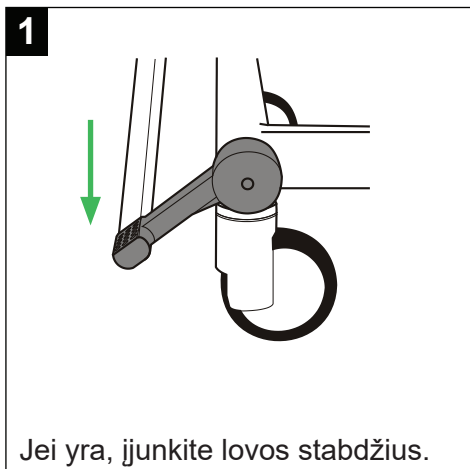


9

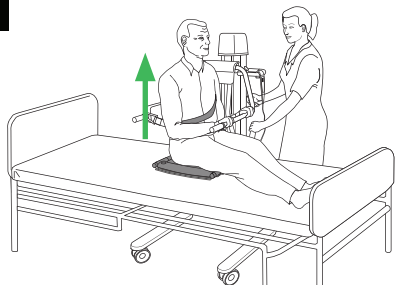

Pakankamai pakelkite sėdynę, kad ją būtų galima patraukti nuo lovos.

10

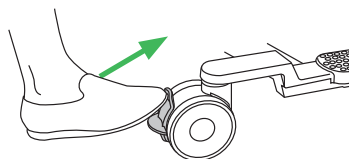

Atleiskite ratukų stabdžius.

11




### ĮSPĖJIMAS

Siekiant išvengti sužalojimų, niekada nepalikite paciento be priežiūros.

Kad pacientas neįstrigtų, jo plaukai, rankos ir kojos turi būti arti kūno, o bet kokio judėjimo metu jis turi laikytis už tam tikslui skirtų rankenų.


12

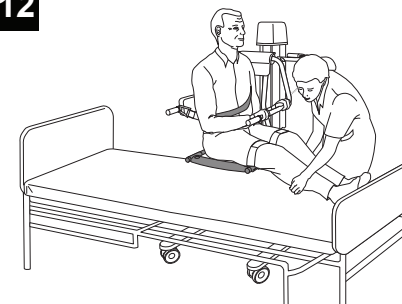

Atitraukite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę nuo lovos, padėdami pacientui perkelti kojas.


## Perkėlimas į lovą

13

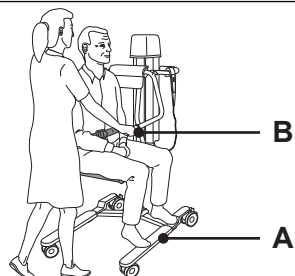

Nuleiskite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę taip, kad pacientas galėtų nuleisti kojas ant kojų atramos (A). Perkeldami naudokite perkėlimo rankenas (B).

1

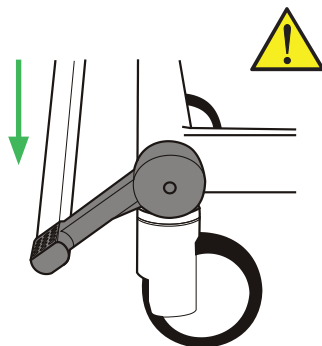

Jei yra, įjunkite lovos stabdžius.


2



Sureguliuokite „Calypso“ keltuovo ir higieninės kėdės sėdynės aukštį taip, kad būtų palaikomas saugus atstumas virš čiužinio ir būtų išvengta prispaudimo.


Nuleiskite lovos turėklus.

3

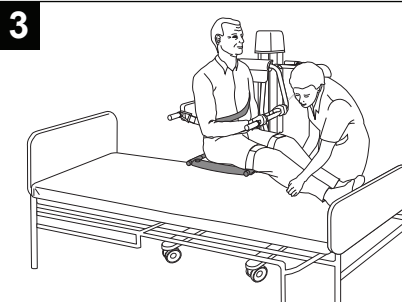


Perkelkite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę virš lovos, padėdami pacientui perkelti kojas ant lovos.

4

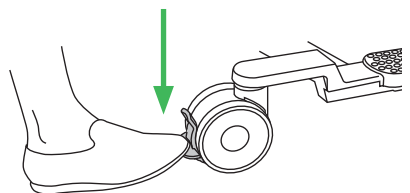

Nuspauskite visų ratukų stabdžius.


5

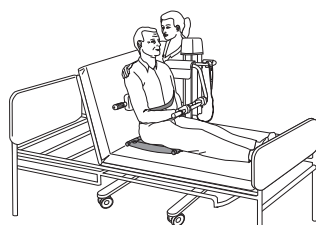

Neprispauskite jokių kūno dalių.


Nuleiskite „Calypso“ keltuą ir higieninės kėdės sėdynę taip, kad ji gerai prisispaustų prie lovos. Jei reikia, pakelkite galvūgalį.

6

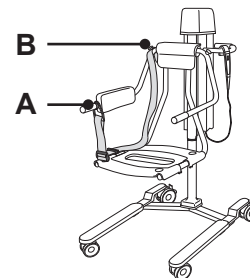

Atlaisvinkite saugos diržą ir nuimkite – nuimkite vieną jo galą arba nuo perkėlimo rankenos (A), arba nuo rankenėlės (B).


7

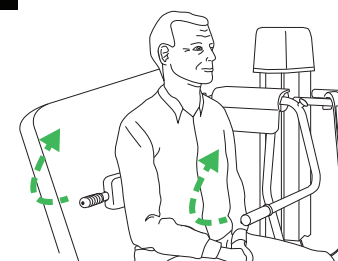

Pakelkite nugaros atlošą ir rankų atramą.


Padėkite pacientui atsiremti į lovą.

8

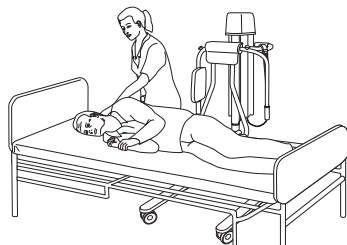


Jei reikia, nuleiskite galvūgalį. Paverskite pacientą ant šono taip, kad jis būtų nasisukęs nuo „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės.

9

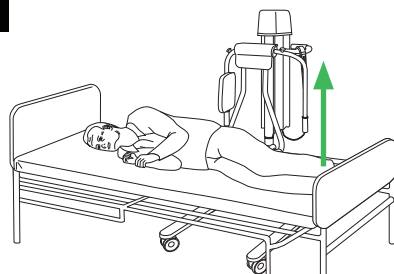

Pakelkite „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės sėdynę tiek, kad galėtumėte ją atitraukti nuo lovos.

10

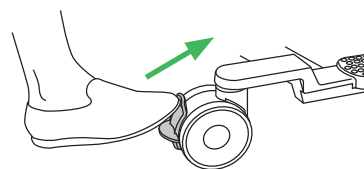

Atleiskite ratukų stabdžius.

11

Atitraukite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę nuo lovos. Paguldykite pacientą ant nugaros. Pakelkite lovos turėklus.

## Perkėlimas nuo neįgaliojo vežimėlio

1

### PASTABA

Kad pacientas galėtų pasikelti nuo neįgaliojo vežimėlio ant „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės, jis turi būti pakankamai stiprus, kad judėtų į šonus ir (ar) galėtų atsistoti.

2




Nuspauskite neįgaliojo vežimėlio stabdžius.

Pristumkite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę prie neįgaliojo vežimėlio.

3


Sureguliuokite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę taip, kad sėdynė būtų šiek tiek didesniame aukštyje nei neįgaliojo vežimėlio sėdynė. Jei įmanoma, nustatykite, kad sėdynė šiek tiek užeitų ant neįgaliojo vežimėlio sėdynės.

4

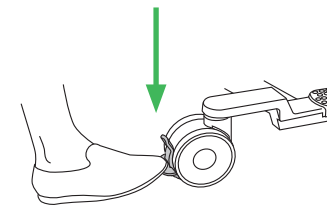


Įjunkite „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės stabdžius.

5

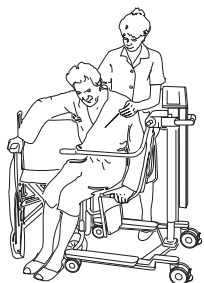


Padėkite pacientui pasikelti ant „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės.

6

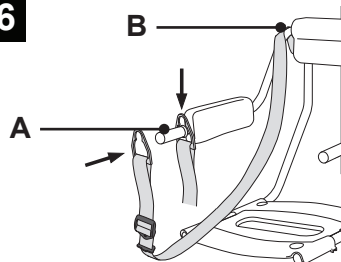

Pritvirtinkite saugos diržą prie perkėlimo rankenos (A). Kitą saugos diržo galą prisekite prie rankenėlės (B).

7

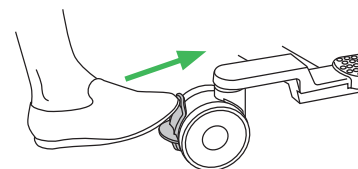

Atleiskite „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės stabdžius.

8



Perkeldami laikykite už perkėlimo rankenų.


## Perkėlimas į neįgaliojo vežimėlį

1

### PASTABA

Norint, kad pacientas galėtų pasikelti nuo „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės į neįgaliojo vežimėlį, jis turi būti pakankamai stiprus, jog judėtų į šonus ir (ar) galėtų atsistoti.

2

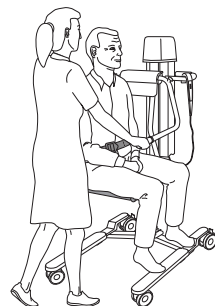

Pacientas turi padėti kojas ant kojų atramų, o rankas – ant rankų atramos.

3



Nuspauskite neįgaliojo vežimėlio stabdžius.


Nuimkite neįgaliojo vežimėlio rankų atramas ir pakelkite kojų atramas.

Pristumkite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę prie neįgaliojo vežimėlio.

4


Sureguliuokite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę taip, kad sėdynė būtų šiek tiek didesniame aukštyje nei neįgaliojo vežimėlio sėdynė. Jei įmanoma, nustatykite, kad sėdynė šiek tiek užeitų ant neįgaliojo vežimėlio sėdynės.

5

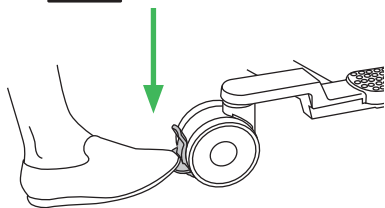


Ijunkite „Calypso“ keltuvo ir higieninės kėdės stabdžius.

6

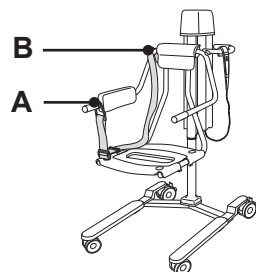

Atlaisvinkite saugos diržą ir nuimkite – nuimkite vieną jo galą arba nuo perkėlimo rankenos (A), arba nuo rankenėlės (B).

7

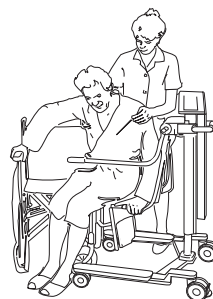

Padėkite pacientui pasikelti į neįgaliojo vežimėlį.

8

Patikrinkite, ar pacientas neįgaliojo vežimėlyje sėdi patogiai ir saugiai.

## Išmaudykite pacientą

1



### ĮSPĖJIMAS


Nuleisdami saugokitės stacionarių daiktų.

Paciento rankos ir kojos turi būti prispaustos prie kūno.

Patikrinkite, ar saugos diržas tinkamai užsegtas.

Nepalikite paciento be priežiūros.


2

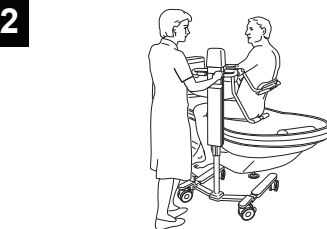

Saugokite, kad neįstrigtų kūno dalys.

Pakelkite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę, kad atlaisvintumėte vonios kraštą. Perkelkite pacientą virš vonios.

3

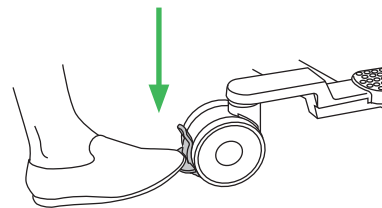

Įjunkite „Calypso“ keltuovo ir higieninės kėdės stabdžius.

4



Pakelkite vonią į patogų aukštį.

5




Nuleiskite „Calypso“ keltuą ir higieninę kėdę taip, kad ji atsiremtų į vonios dugną. Nuimkite saugos diržą.

6




Traukite rankų atramą pirmyn. Šiek tiek atloškite nugaros atlošą. Išmaudykite pacientą.

7

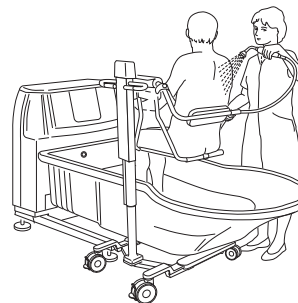

Nuleiskite rankų atramą. Pakelkite nugaros atlošą. Užsekitės saugos diržą. Nuprauskite pacientą po dušu.

8

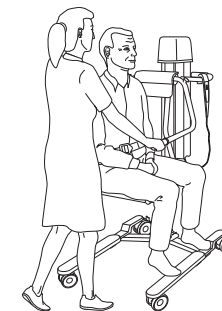

Nusausinkite pacientą. Apklokite arba aprenkite pacientą. Perkelkite pacientą į jo palatą.

