

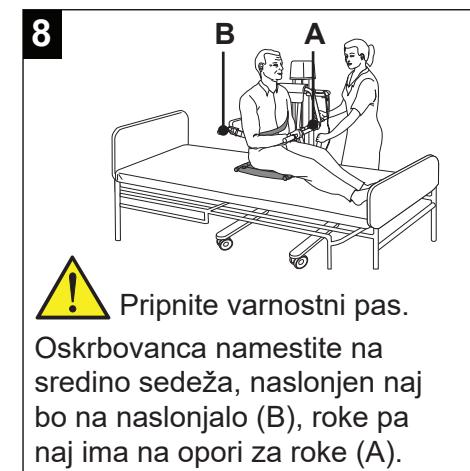
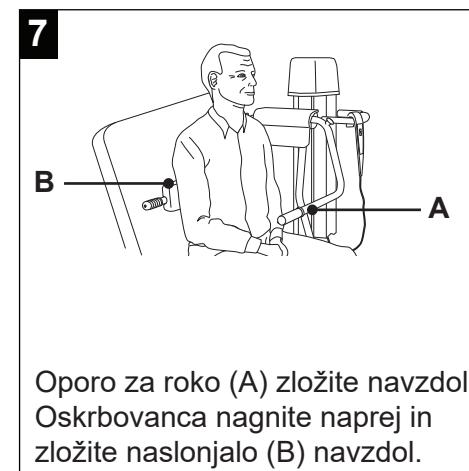



Calypso

Premeščanje s postelje


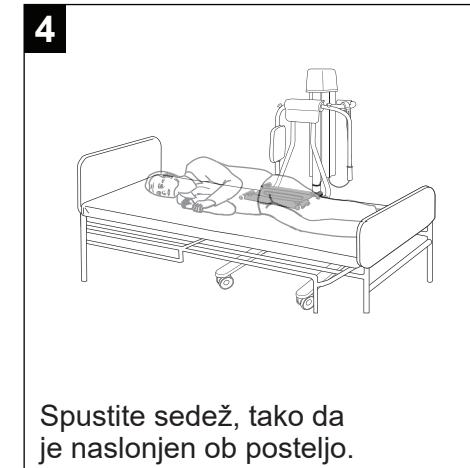






2797

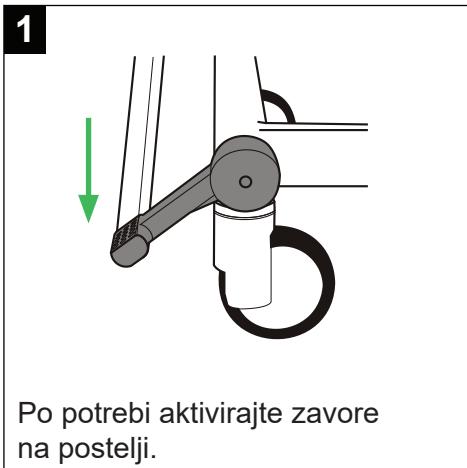

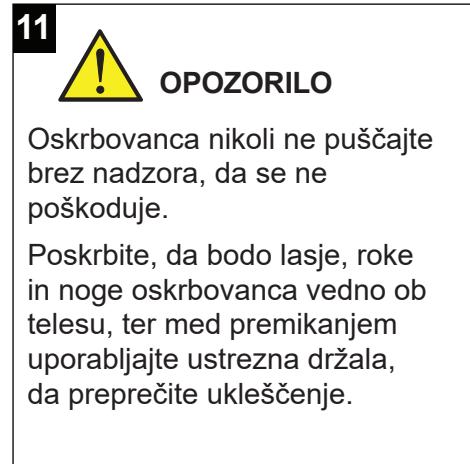

Premeščanje na posteljo

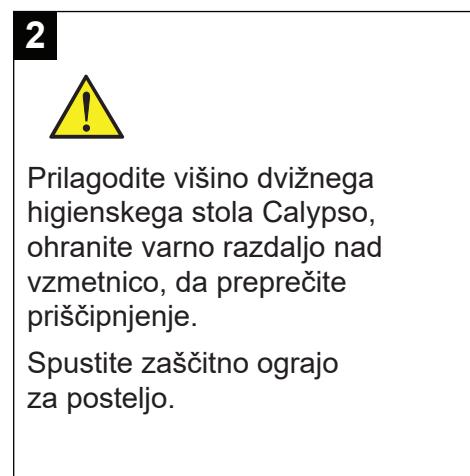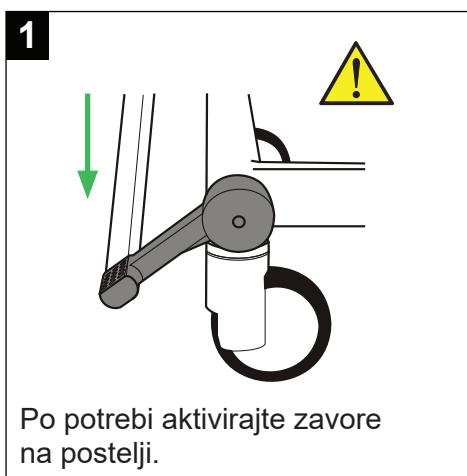

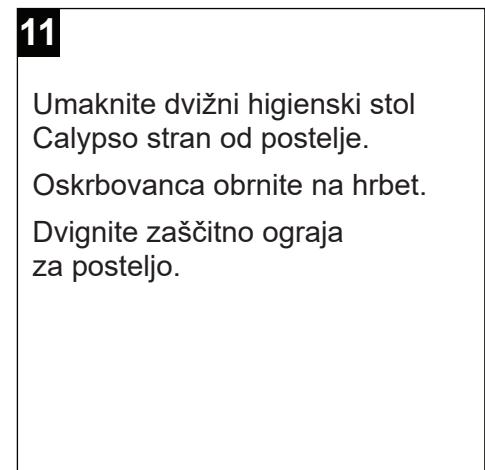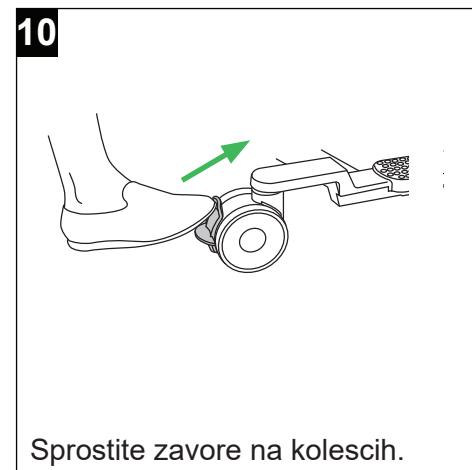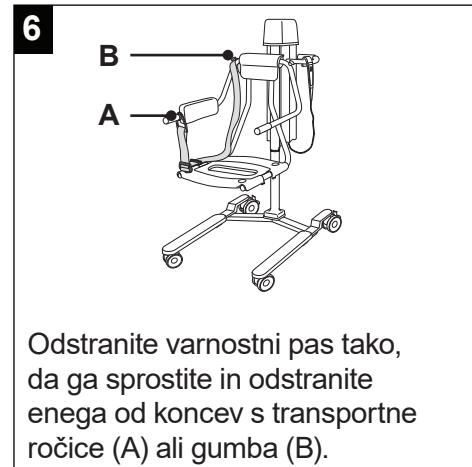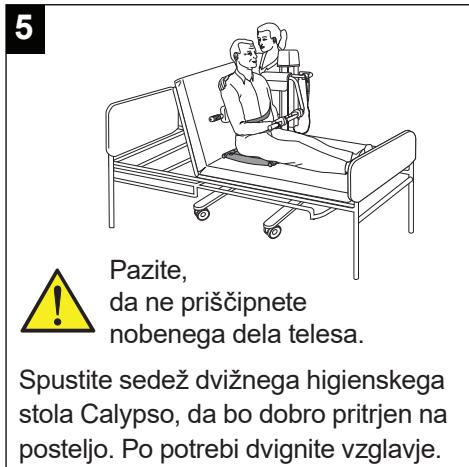

Prenos z invalidskega vozička

1

OPOZORILO

Če se želi oskrbovanec prevesti z invalidskega vozička na dvižni higienski stol Calypso, mora biti dovolj močan za premik vstran in/ali zmožen vstati.

2




Uporabite zavore invalidskega vozička.

Postavite dvižni higienski stol Calypso poleg invalidskega vozička.

3


Prilagodite dvižni higienski stol Calypso tako, da bo sedež nekoliko višje od sedeža invalidskega vozička. Če je mogoče, prekucnite sedež na invalidskem vozičku.

4

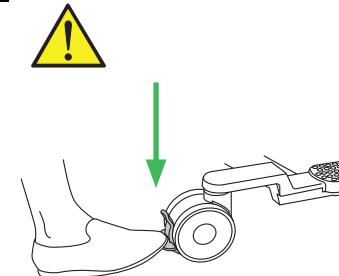


Uporabite zavore na dvižnem higienskem stolu Calypso.

5

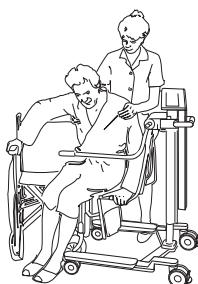


Pomagajte pri prenosu oskrbovanca na dvižni higienski stol Calypso.

6

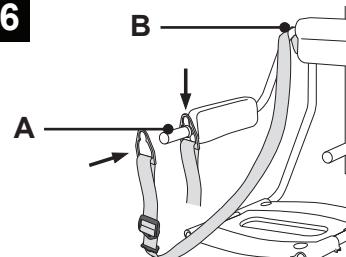


Pripravite varnostni pas na transportno ročico (A). Drugi konec varnostnega pasu pritrdite na gumb (B).

7

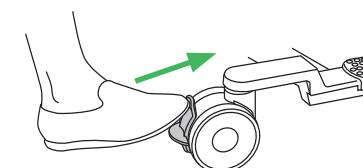

Sprostite zavore na dvižnem higienskem stolu Calypso.

8

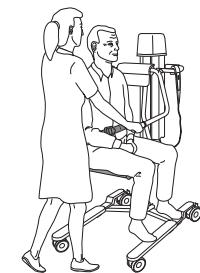

Med prenestitvijo uporabljajte transportne ročice.


Prenos na invalidski voziček

1

OPOZORILO

Če se želi oskrbovanec presesti z dvižnega higienskega stola Calypso na invalidski voziček, mora biti dovolj močan za premik vstran in/ali zmožen vstati.

2

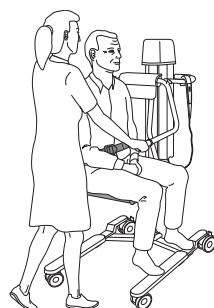

Oskrbovanec mora imeti noge na podnožniku in roke na opori za roke.

3



Uporabite zavore invalidskega vozička.

Odstranite oporo za roke z invalidskega vozička in dvignite naslon za noge navzgor.

Postavite dvižni higienski stol Calypso poleg invalidskega vozička.

4


Prilagodite dvižni higienski stol Calypso tako, da bo sedež nekoliko višje od sedeža invalidskega vozička. Če je mogoče, prekucnite sedež na invalidskem vozičku.

5




Uporabite zavore na dvižnem higienskem stolu Calypso.

6

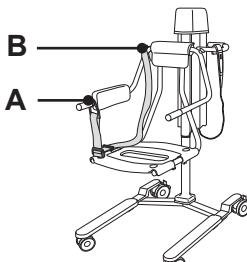

Odstranite varnostni pas tako, da ga sprostite in odstranite enega od koncov s transportne ročice (A) ali gumba (B).

7

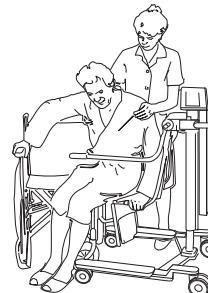

Pomagajte pri prenosu oskrbovanca na invalidski voziček.

8

Prepričajte se, da oskrbovanec v invalidskem vozičku sedi varno in udobno.

Kopanje oskrbovanca

1



OPOZORILO


Pri spuščanju bodite pozorni na nepremične predmete.

Oskrbovančeve roke in noge naj bodo blizu ob njegovem telesu.

Varnostni pas mora biti čvrsto pritrjen.


Oskrbovanca nikoli ne puščajte brez nadzora.

2

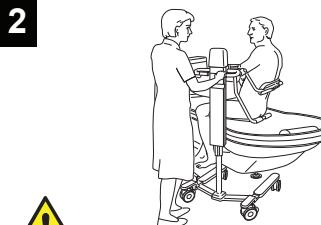

Preprečite zapletanje delov telesa.
Dvignite dvižni higienski stol Calypso, da na robu kadi ne bo ničesar več.
Pomaknite oskrbovanca nad kad.

3

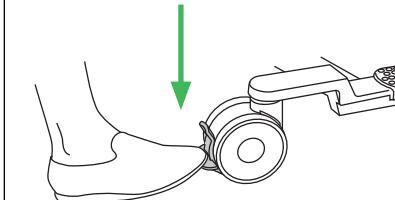

Uporabite zavore na dvižnem higienskem stolu Calypso.

4



Dvignite kad na udobno višino.

5




Spuštite sedež dvižnega higienskega stola Calypso, da počiva na dnu kadi.
Odstranite varnostni pas.

6



Oporo za roke povlecite naprej.
Naslonjalo nagnite rahlo nazaj.
Oskrbovanca okopajte.

7

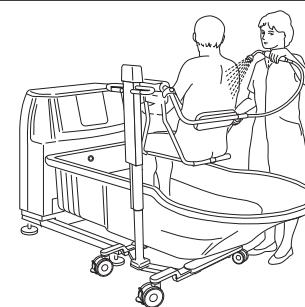

Spuštite oporo za roko.
Dvignite naslonjalo.
Prippnite varnostni pas.
Oprhajte oskrbovanca.

8



Obrišite oskrbovanca do suhega.
Pokrijte ali oblecite oskrbovanca.
Oskrbovanca vrnite v njegovo sobo.

