

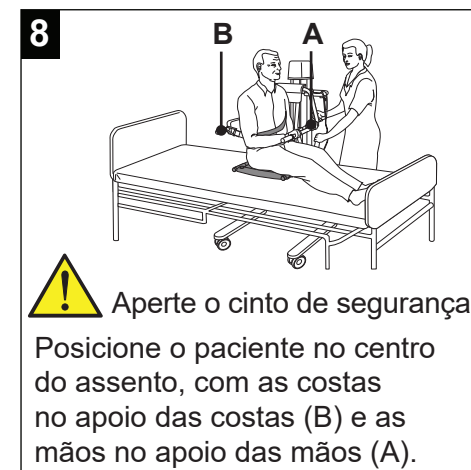
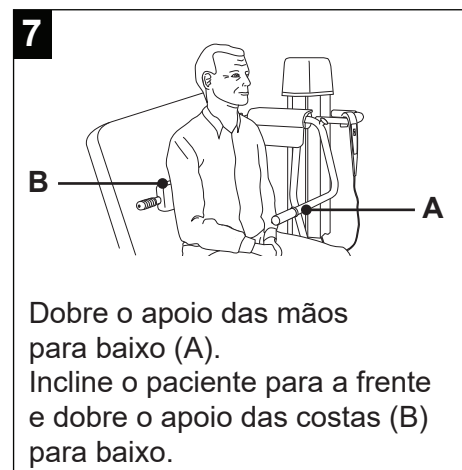
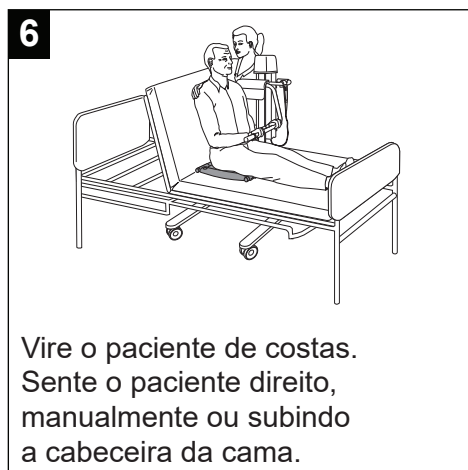
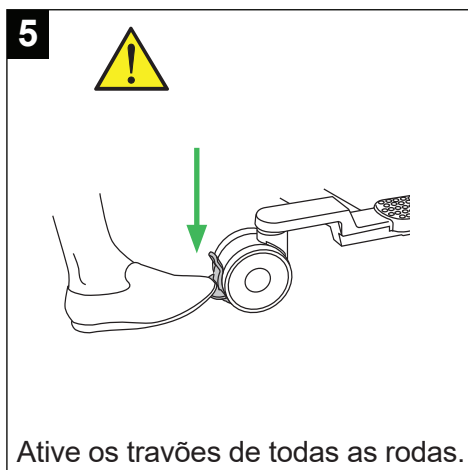
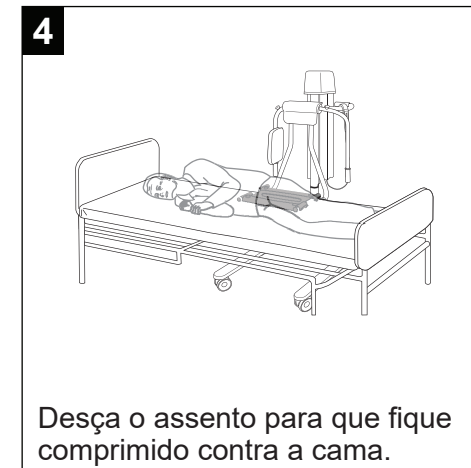
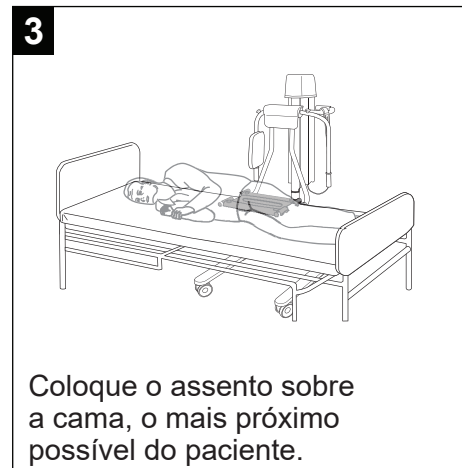
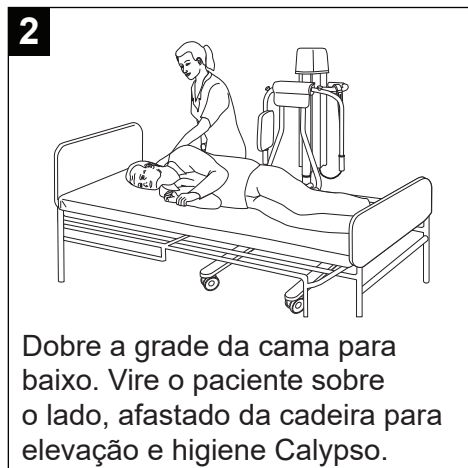
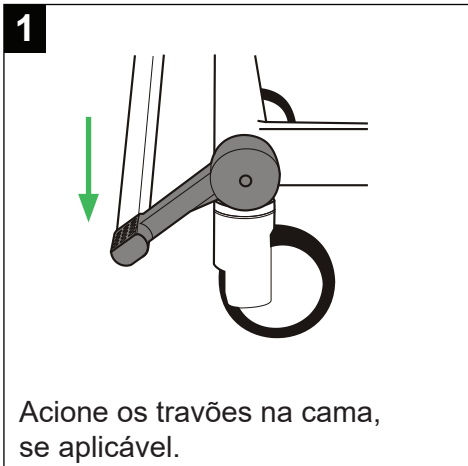
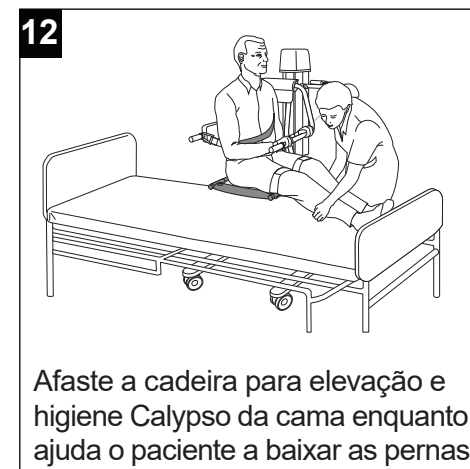
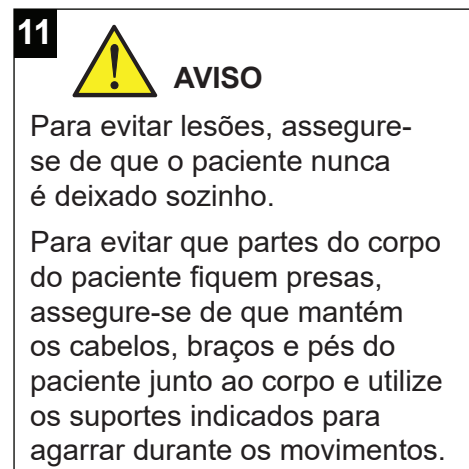




Calypso

Transferir da cama

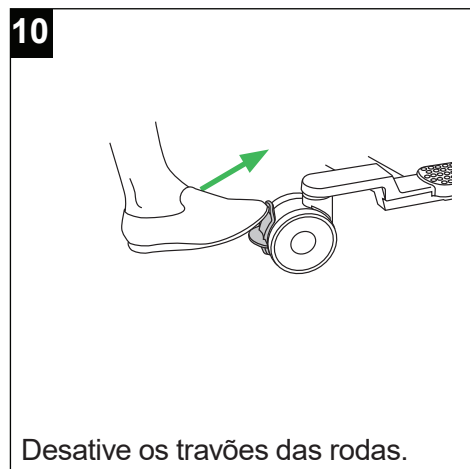


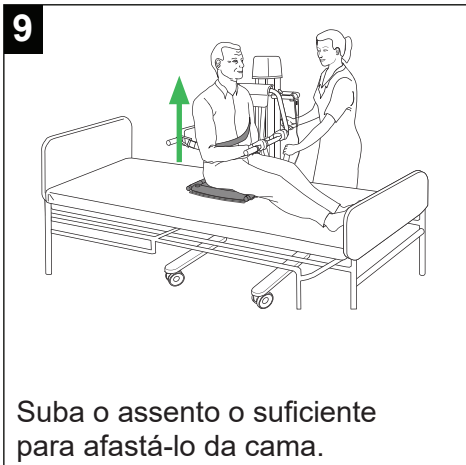

Transferir para a cama

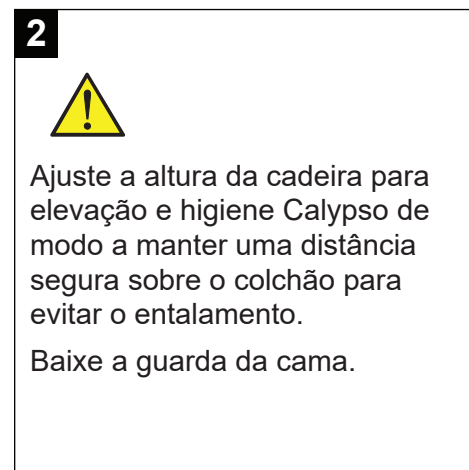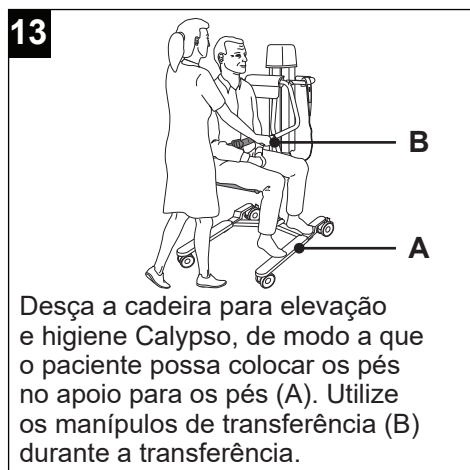

4

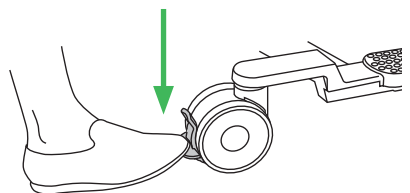


Ative os travões de todas as rodas.

5




Evite entalar quaisquer partes do corpo. Desça o assento da cadeira para elevação e higiene Calypso de modo a assentar firmemente sobre a cama. Se necessário, suba a cabeceira.

6

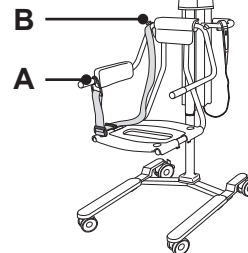

Retire o cinto de segurança, desapertando e retirando uma das extremidades do manípulo de transferência (A) ou do botão (B).


7

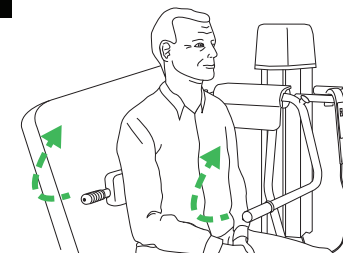

Dobre o apoio das costas e o apoio das mãos para cima.


Ajude o paciente a encostar-se para trás, na cama.

8

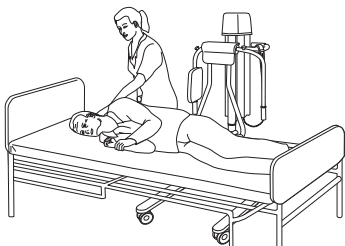


Se necessário, desça a cabeceira. Coloque o paciente de lado, de costas para a cadeira para elevação e higiene Calypso.

9

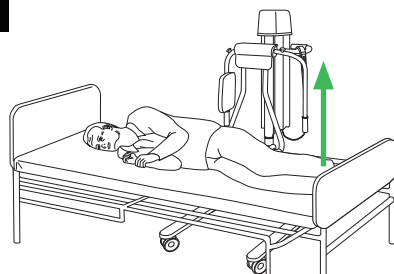

Suba o assento da cadeira para elevação e higiene Calypso para a separar da cama.

10

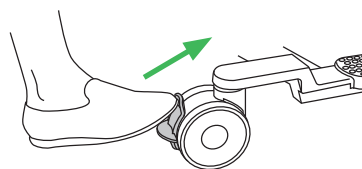

Desative os travões das rodas.

11

Afaste a cadeira para elevação e higiene Calypso da cama.

Vire o paciente de costas.

Levante a guarda da cama.

Transferir da cadeira de rodas

1

NOTA

Para que o paciente consiga deslocar-se de uma cadeira de rodas para a cadeira para elevação e higiene Calypso, deve ter força suficiente para se deslocar de lado e/ou conseguir estar de pé.

2




Acione os travões da cadeira de rodas.

Coloque a cadeira para elevação e higiene Calypso ao lado da cadeira de rodas.

3


Ajuste a cadeira para elevação e higiene Calypso de modo a que o assento fique ligeiramente mais alto do que o assento da cadeira de rodas. Se possível, sobreponha ao assento da cadeira de rodas.

4

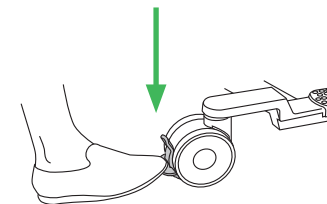


Acione os travões na cadeira para elevação e higiene Calypso.

5

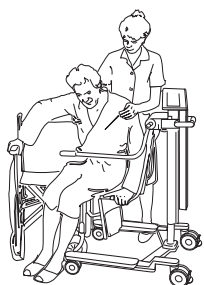


Ajude a mover o paciente para a cadeira para elevação e higiene Calypso.

6

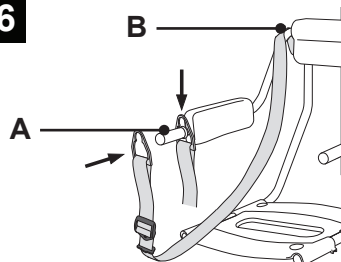

Fixe o cinto de segurança ao manípulo de transferência (A). Aperte a outra extremidade do cinto de segurança ao botão (B).

7

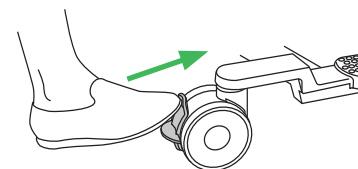

Desative os travões na cadeira para elevação e higiene Calypso.

8



Segure os manípulos de transferência durante a transferência.


Transferir para a cadeira de rodas

1

NOTA

Para que o paciente consiga deslocar-se da cadeira para elevação e higiene Calypso para uma cadeira de rodas, deve ter força suficiente para se deslocar de lado e/ou conseguir estar de pé.

2

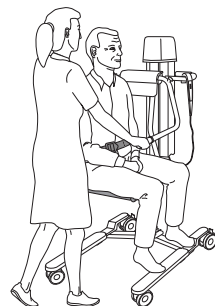

Certifique-se de que o paciente tem os pés nos apoios para os pés e as mãos no apoio das mãos.

3



Acione os travões da cadeira de rodas.


Retire o apoio para os braços da cadeira de rodas e dobre o apoio de pés para cima.

Coloque a cadeira para elevação e higiene Calypso ao lado da cadeira de rodas.

4


Ajuste a cadeira para elevação e higiene Calypso de modo a que o assento fique ligeiramente mais alto do que o assento da cadeira de rodas. Se possível, sobreponha ao assento da cadeira de rodas.

5

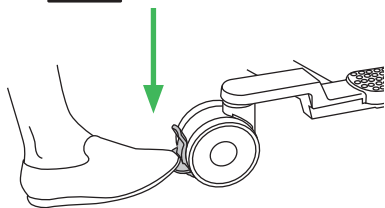


Acione os travões na cadeira para elevação e higiene Calypso.

6

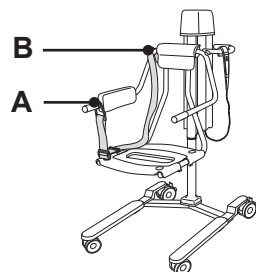

Retire o cinto de segurança, desapertando e retirando uma das extremidades do manípulo de transferência (A) ou do botão (B).

7

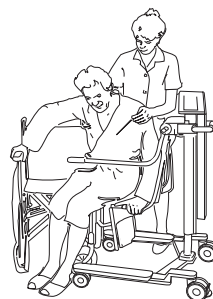

Ajude a mover o paciente para a cadeira de rodas.

8

Certifique-se de que o paciente está sentado de forma confortável e segura na cadeira de rodas.

Dar banho ao paciente

1



AVISO


Tenha atenção a objetos estacionários ao baixar.

Certifique-se de que mantém os braços e os pés do paciente junto ao corpo.

Certifique-se de que o cinto de segurança está corretamente apertado.

Certifique-se de que não deixa o paciente sozinho.


2

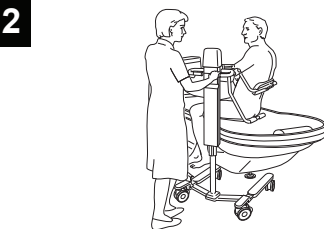

Evite entalar quaisquer partes do corpo.


Suba a cadeira para elevação e higiene Calypso para desobstruir o rebordo da banheira. Mova o paciente sobre a banheira.

3

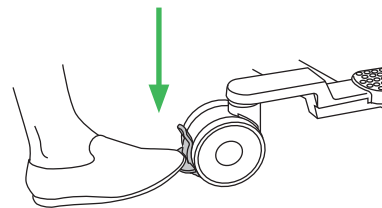

Acione os travões na cadeira para elevação e higiene Calypso.

4

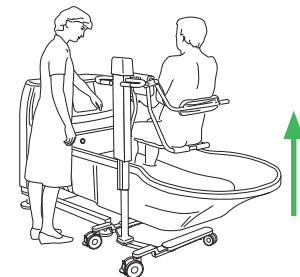

Suba a banheira para uma altura confortável.

5




Desça o assento da cadeira para elevação e higiene Calypso para que este assente no fundo da banheira. Retire o cinto de segurança

6




Puxe o apoio das mãos para a frente. Recline ligeiramente o apoio das costas. Dê banho ao paciente

7

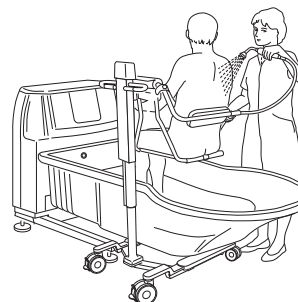

Baixe o apoio das mãos. Suba o apoio das costas. Aperte o cinto de segurança. Dê duche ao paciente.

8

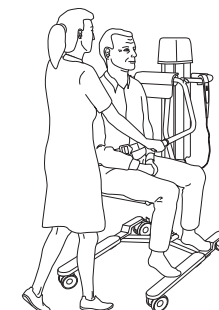

Seque o paciente. Cubra ou vista o paciente. Acompanhe o paciente ao seu quarto.

