



Pārvietošana no gultas

1

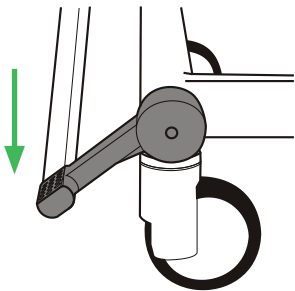


Izmantojiet gultas ritentiņu bremzes (ja tādas ir).

2

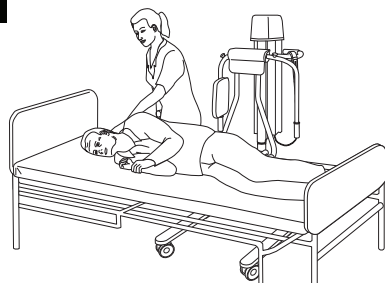


Nolaidiet uz leju gultas margas. Pagrieziet pacientu uz sāniem ar muguru pret Calypso paceļamo higiēnas krēslu.

3

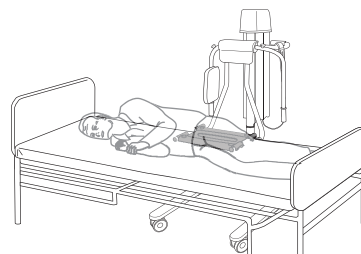


Novietojiet sēdekli virs gultas pēc iespējas tuvāk pacientam.

4

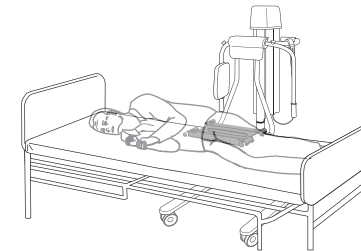


Nolaidiet sēdekli tā, lai tas atspiestos pret gultu.

5

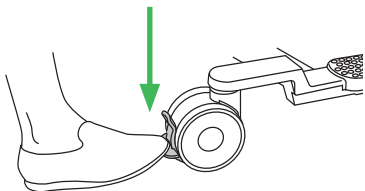


Nospiediet visu ritenīšu bremzes.

6

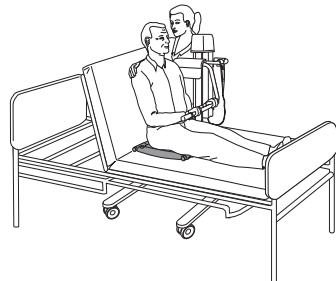

Pagrieziet pacientu uz muguras. Paceliet pašu pacientu sēdus vai arī paceliet gultas galvgali, lai pacients atrastos sēdus.

7

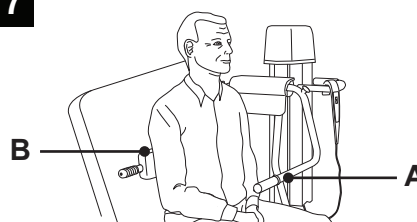

Nolokiet uz leju roku balstu (A). Salieciet pacientu uz priekšu un nolokiet atzveltni (B).


8



Piesprādzējiet drošības siksnu.


Novietojiet pacientu gultas vidū ar muguru, atspiestu pret atzveltni (B), un rokām uz roku balsta (A).

9

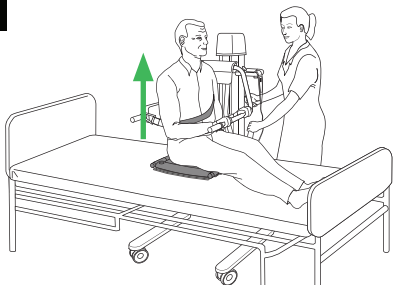

Paceliet sēdekli pietiekami augstu, lai to varētu pārvietot prom gultas.

10

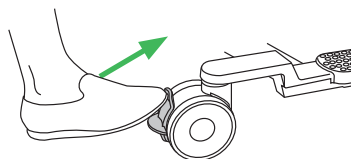

Atbrīvojiet ritenīšu bremzes.

11




BRĪDINĀJUMS!

Lai izvairītos no traumu gūšanas, parūpējieties, lai pacients ne mīksti netiktu atstāts bez uzraudzības.

Lai izvairītos no iesprūšanas, pārliecinieties, vai pacienta mati, rokas un pēdas ir piekļauti ķermenim, un jebkuru kustību laikā izmantojiet paredzētos pieķeršanās atbalstus.


12

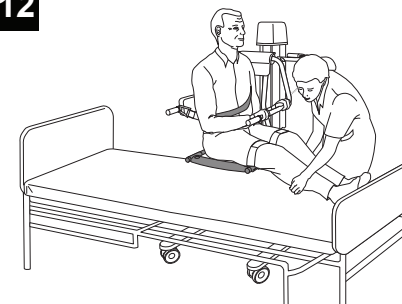

Stumiet Calypso paceļamo higiēnas krēslu prom no gultas, palīdzot pacientam nocelt kājas.


Pārvietošana uz gultu

13

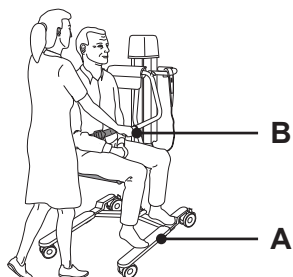

Nolaidiet Calypso paceļamo higiēnas krēslu pietiekami zemu, lai pacients varētu novietot kājas uz kāju balsta (A). Pārvietošanas laikā izmantojiet pārvietošanas rokturus (B).

1

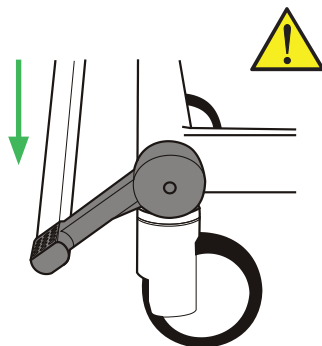

Izmantojiet gultas ritentiņu bremzes (ja tādas ir).


2



Noregulējiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla augstumu tā, lai sēdeklis atrastos pietiekami augstu virs matrača un pacients netiktu iespiests.


Nolaidiet uz leju gultas sliedi.

3

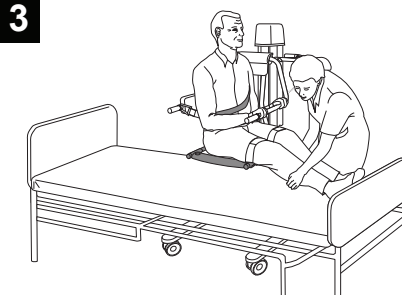

Novietojiet Calypso paceļamo higiēnas krēslu virs gultas, palīdzot pacientam iecelt kājas gultā.

4

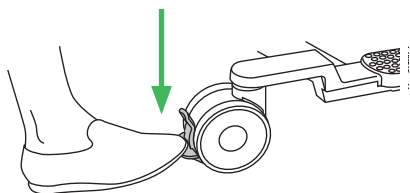


Nospiediet visu ritenīšu bremzes.

5




Uzmanieties,
lai neiespiestu
nevienu ķermeņa daļu.

Laidiet uz leju Calypso paceļamā
higiēnas krēsla sēdekli, līdz tas
stingri atspiežas pret gultu.
Paceliet galvgali, ja vajadzīgs.

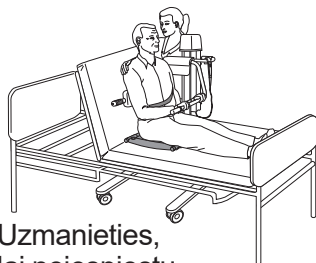


6

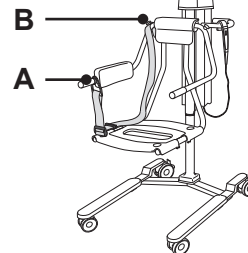

Noņemiet drošības siksnu,
atbrīvojot to un noņemot vienu
siksnas galu no pārvietošanas
roktura (A) vai arī no pogas (B).


7

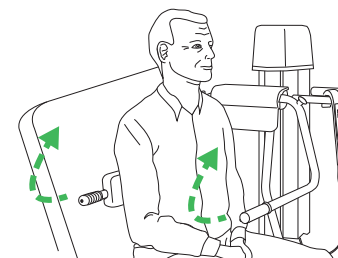

Uzlokiet uz augšu atzveltni
un roku balstu.


Palīdziet pacientam atspiesties
ar muguru pret gultu.

8

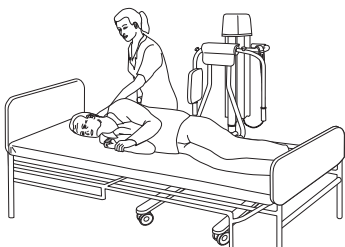


Nolaidiet galvgali, ja vajadzīgs.
Pagrieziet pacientu uz sāniem
ar muguru pret Calypso
paceļamo higiēnas krēslu.

9

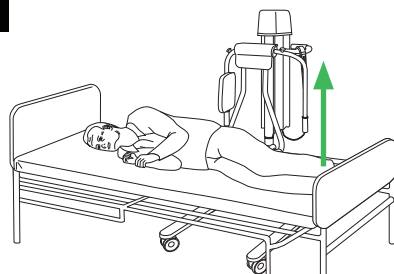

Paceliet uz augšu paceļamā
higiēnas krēsla Calypso
sēdekli, lai iekārtu varētu
nostumt nost no gultas.

10

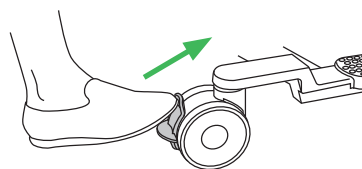

Atbrīvojiet ritenīšu bremzes.

11

Stumiet Calypso paceļamo
higiēnas krēslu prom no gultas.
Pagrieziet pacientu uz muguras.
Uzlokiet uz augšu gultas sliedi.

Pārvietošana no ratiņkrēsla

1

PIEZĪME

Lai pacientu varētu pārvietot no ratiņkrēsla uz Calypso paceļamo higiēnas krēslu, viņam jābūt pietiekami spēcīgam, lai pagrieztos uz sāniem un/vai pieceltos kājās.

2




Izmantojiet ratiņkrēsla bremzes.

Novietojiet Calypso paceļamo higiēnas krēslu blakus ratiņkrēslam.

3


Noregulējiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla sēdekli tā, lai tas atrastos nedaudz augstāk par ratiņkrēsla sēdekli. Ja iespējams, novietojiet sēdekļus vienu virs otra.

4

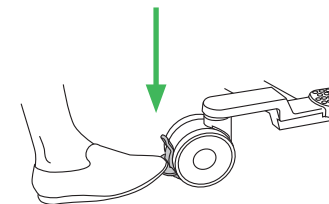


Izmantojiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla bremzes.

5

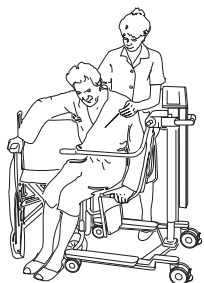


Palīdziet pacientam pārsēsties uz Calypso paceļamo higiēnas krēslu.

6

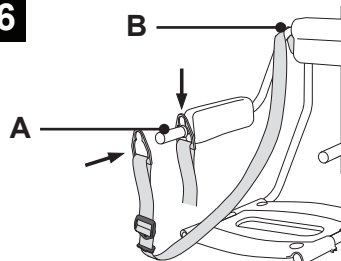

Piestipriniet drošības siksnu pie pārvietošanas roktura (A). Piestipriniet otru drošības siksnas galu pie pogas (B).

7

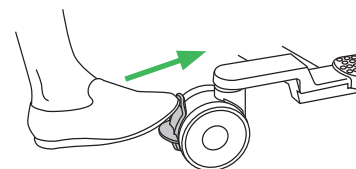

Atbrīvojiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla bremzes.

8



Pārvietošanas laikā turiet pārvietošanas rokturi.


Pārvietošana uz ratiņkrēslu

1

PIEZĪME

Lai pacientu varētu pārvietot no Calypso paceļamā higiēnas krēsla uz ratiņkrēslu, viņam jābūt pietiekami spēcīgam, lai pagrieztos uz sāniem un/vai pieceltos kājās.

2

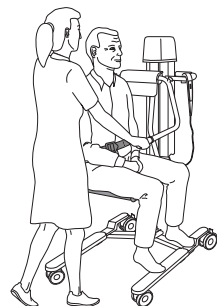

Pacienta kājām ir jāatrodas uz kāju balsta un rokām uz roku balsta.

3



Izmantojiet ratiņkrēsla bremzes.


Noņemiet ratiņkrēsla roku balstu un uzlokiet uz augšu ratiņkrēsla kāju atbalstu.

Novietojiet Calypso paceļamo higiēnas krēslu blakus ratiņkrēslam.

4


Noregulējiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla sēdekli tā, lai tas atrastos nedaudz augstāk par ratiņkrēsla sēdekli. Ja iespējams, novietojiet sēdekļus vienu virs otra.

5

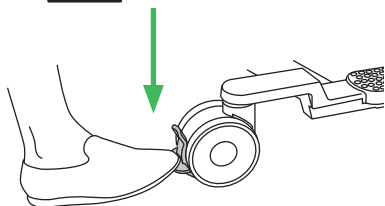


Izmantojiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla bremzes.

6

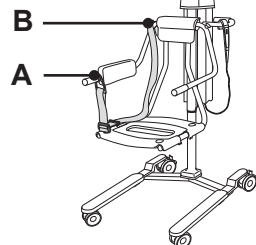

Noņemiet drošības siksnu, atbrīvojot to un noņemot vienu siksnas galu no pārvietošanas roktura (A) vai arī no pogas (B).

7

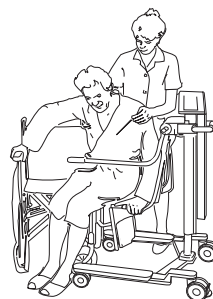

Palīdziet pacientam pārsēsties uz ratiņkrēslu.

8

Pārliecinieties, vai pacients ratiņkrēslā sēž ērti un droši.

Pacienta vannošana

1



BRĪDINĀJUMS!

Nolaižot uzmanieties no nekustīgiem priekšmetiem.

Raugieties, lai pacienta rokas un kājas atrastos tuvu viņa ķermenim.

Pārbaudiet, vai drošības sikсна ir cieši nostiprināta.

Neatstājiet pacientu bez uzraudzības.


2



Uzmanieties, lai neiespiestu nevienu ķermeņa daļu.

Paceliet Calypso paceļamo higiēnas krēslu augstāk par vannas malu. Pārvietojiet pacientu virs vannas.

3

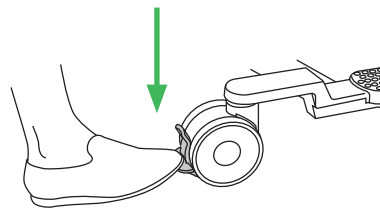


Izmantojiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla bremzes.

4



Paceliet vannu ērtā augstumā.

5

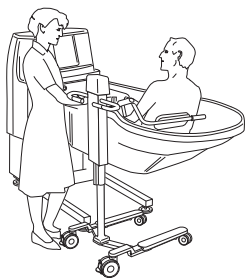


Nolaidiet Calypso paceļamā higiēnas krēsla sēdekli, lai tas atbalstītos pret vannas apakšu. Noņemiet drošības siksnu.

6




Pavelciet uz priekšu roku balstu. Nedaudz atļaidiet atpakaļ atzveltni. Vannojiet pacientu.

7

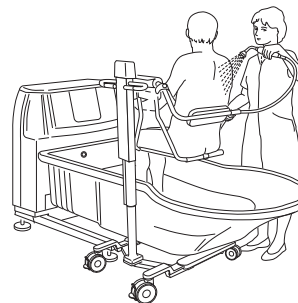

Nolokiet roku balstu. Paceliet atzveltni. Piesprādzējiet drošības siksnu. Nomazgājiet pacientu ar dušu.

8

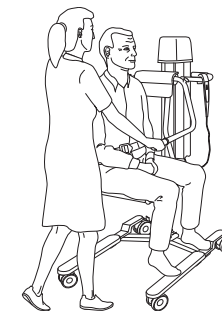

Noslaukiet pacientu. Pacientu apsedziet vai saģērbiet. Nogādājiet pacientu atpakaļ palātā.

