



1

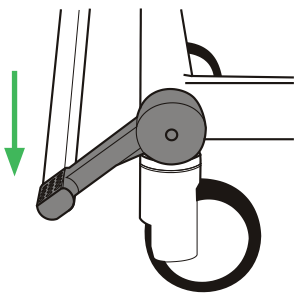


使用病床的制動器 (若適用)。

2

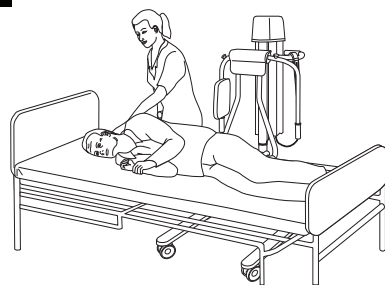


將床的欄杆往下摺。讓病患側躺，
遠離 Calypso 抬升式沐浴椅。

3

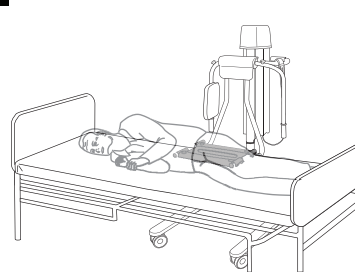


將座椅放在床上，盡可能靠近
病患。

4

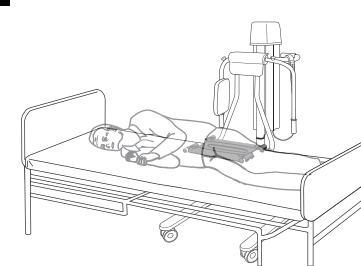


降低座椅使其貼著病床。

5

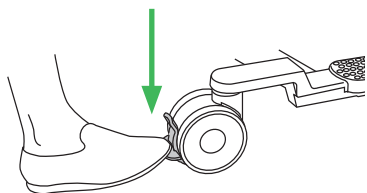

所有腳輪都使用制動器。

6

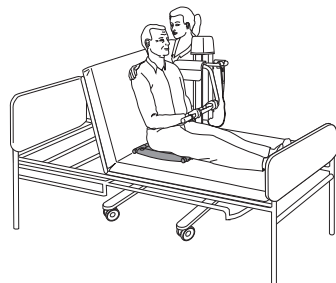


讓病患轉成背躺。
利用徒手的方式或將床頭端抬起
以幫助病患坐挺。

7





將扶手 (A) 往下摺疊。
將病患往前傾並將靠背 (B) 往
下摺。

8



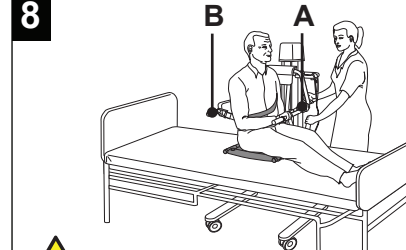


繫緊安全帶。


將病患放置在座椅中間，背靠著
靠背 (B) 且守放在扶手 (A) 上。

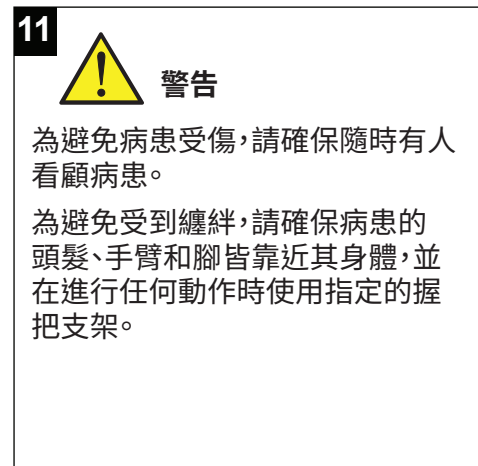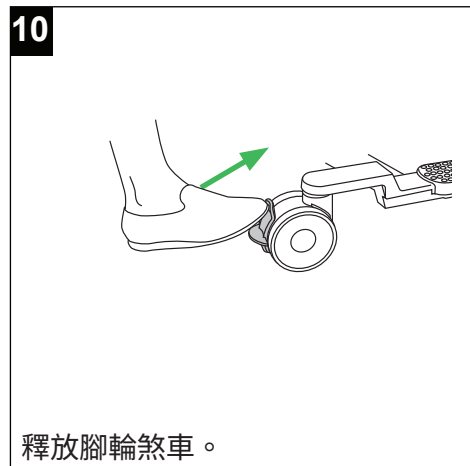

轉位至病床

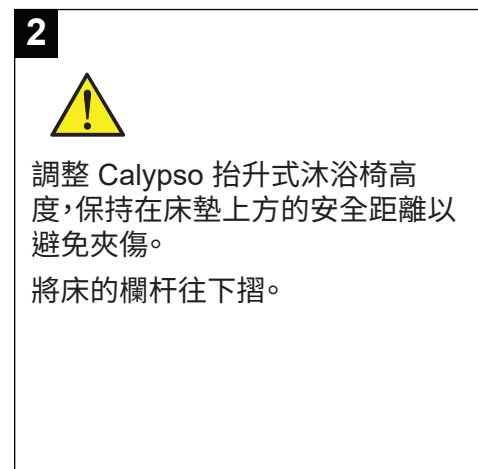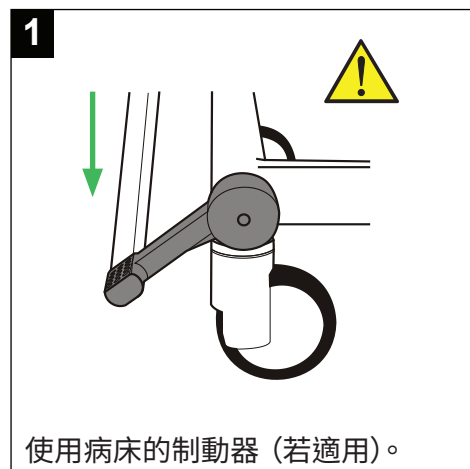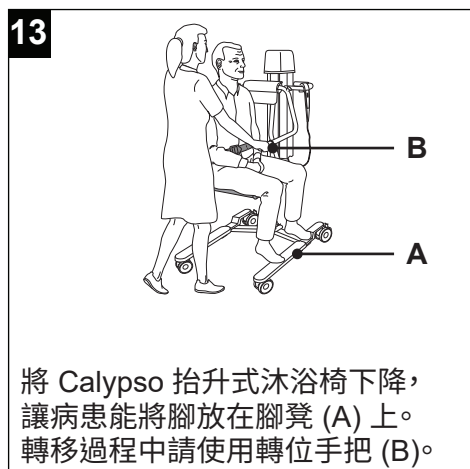


4

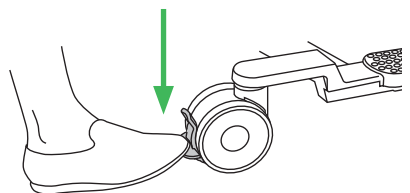

所有腳輪都使用制動器。


5

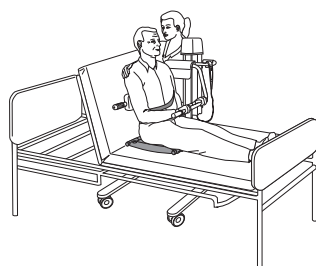

應避免夾到任何身體部位。


降低 Calypso 抬升式沐浴椅，讓座椅緊貼在床鋪上。若有必要，請抬升頭端。

6

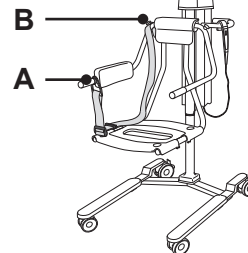

取下安全帶，需鬆開安全帶，並從轉位把手 (A) 或旋鈕 (B) 移除其中一端。


7

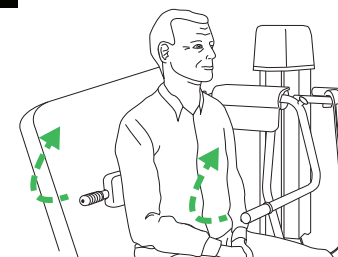

將靠背和扶手往上摺疊。


協助病患往後靠在床上。

8

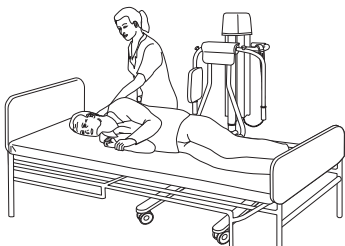


若有必要，請降低頭端。
將病患側躺，背對著 Calypso 抬升式沐浴椅。

9

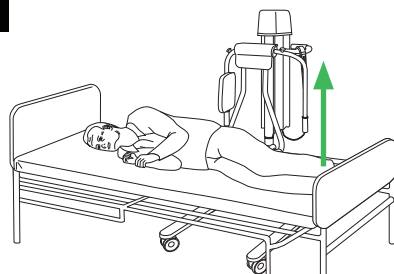

將 Calypso 抬升式沐浴椅的座椅抬起以抬離病床。

10

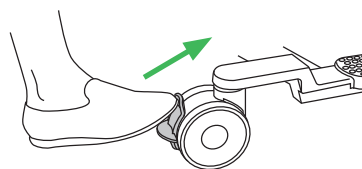

釋放腳輪煞車。

11

從病床拉離 Calypso 抬升式沐浴椅。

讓病患轉成背躺。

將床的欄杆往上摺。

從輪椅進行轉位

1

注意

病患若要能夠從輪椅上轉位到 Calypso 抬升式沐浴椅，病患必須能夠左右移動及/或站起來。

2




在輪椅上施用制動器。

將 Calypso 抬升式沐浴椅放在輪椅旁邊。

3


調整 Calypso 抬升式沐浴椅，使座椅稍微高於輪椅座位。若可行，可重疊輪椅座位。

4

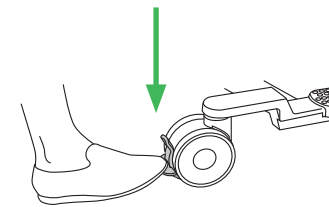


使用 Calypso 抬升式沐浴椅的制動器。

5

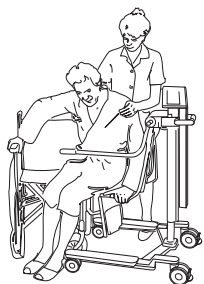


協助將病患移動到 Calypso 抬升式沐浴椅上。

6

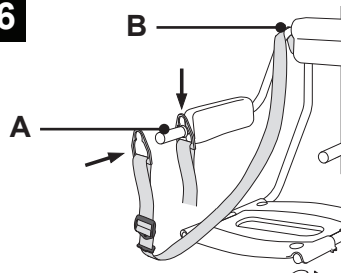

將安全帶接在轉位把手上 (A)。
將安全帶的另一端繫在旋鈕 (B) 上。

7

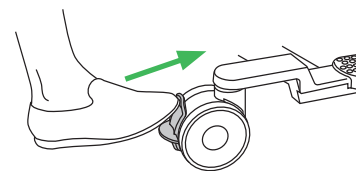

釋放 Calypso 抬升式沐浴椅的制動器。

8



轉移過程中請握住轉位手把 (B)。


轉位到輪椅上

1

注意

病患若要能夠從 Calypso 抬升式沐浴椅轉位到輪椅，病患必須能夠左右移動及/或站起來。

2

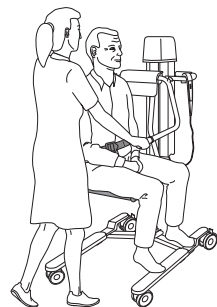

確保病患的腳在腳凳上，手放在扶手上。

3



在輪椅上施用制動器。


將輪椅扶手移除並將輪椅的腳凳往上摺。

將 Calypso 抬升式沐浴椅放在輪椅旁邊。

4


調整 Calypso 抬升式沐浴椅，使座椅稍微高於輪椅座位。若可行，可重疊輪椅座位。

5

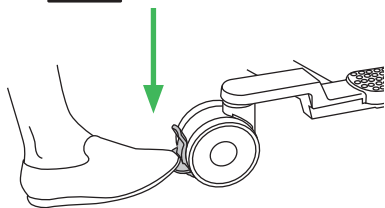


使用 Calypso 抬升式沐浴椅的制動器。

6

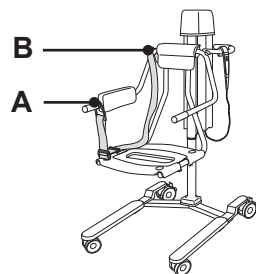

取下安全帶，
需鬆開安全帶，並從轉位把手 (A)
或旋鈕 (B) 取下其中一端。

7

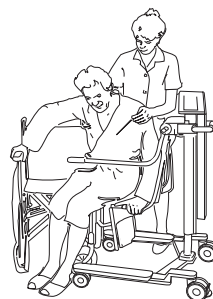

協助將病患轉位至輪椅上。

8

請確保病患安穩入座於輪椅中。

為病患沐浴

1



警告

下降時注意靜止物體。

務必讓病患的手臂和雙腳靠近身體。

確保妥善繫緊安全帶。

請確保隨時有人看顧病患。


2




請避免卡夾到身體部位。

抬起 Calypso 抬升式沐浴椅以越過浴缸邊緣。

把病患移到浴缸上。

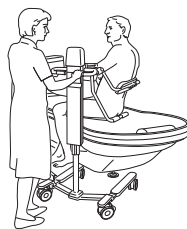

3

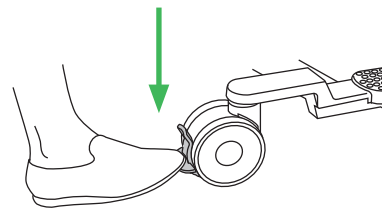


使用 Calypso 抬升式沐浴椅的制動器。

4



將浴缸升到舒適的高度。

5

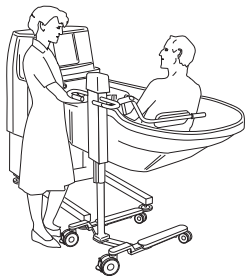

降低 Calypso 抬升式沐浴椅，使座椅靠住浴缸的底部。

取下安全帶。

6




將扶手向前拉。

些微傾斜靠背。

為病患沐浴。

7

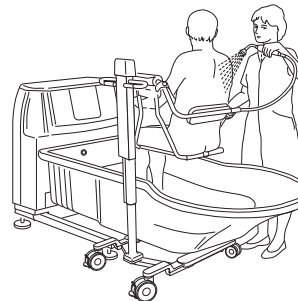


降下扶手。

將靠背升起。

繫緊安全帶。

幫病患淋浴。

8

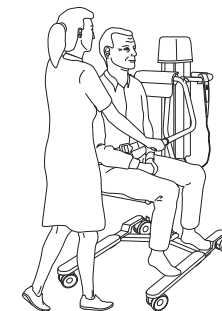

擦拭病患。

將病患蓋住或為其穿上衣服。

將病患送回房間。

