


Calypso


Переміщення з ліжка

1

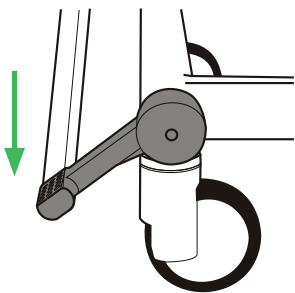


Заблокуйте ліжко гальмами (якщо є).

2

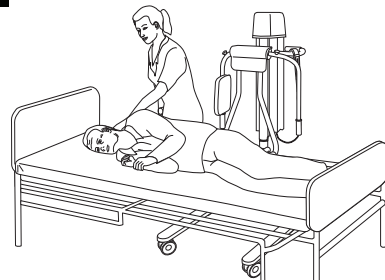


Опустіть поручень ліжка. Поверніть пацієнта на бік, обличчям від гігієнічного крісла-підйомника Calypso.

3

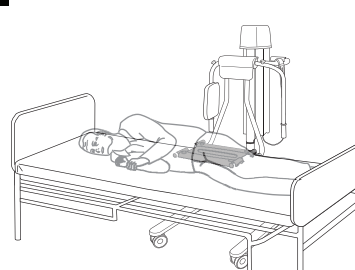


Розташуйте сидіння над ліжком якомога ближче до пацієнта.

4

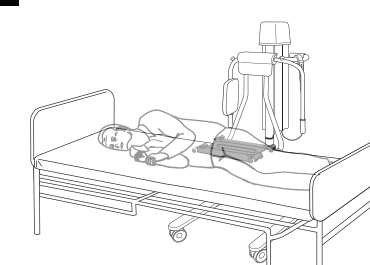


Опустіть сидіння так, щоб воно притиснулося до ліжка.

5

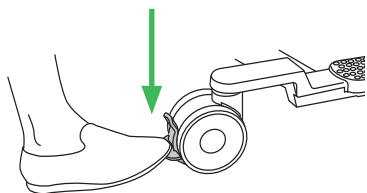


Заблокуйте всі коліщата гальмами.

6

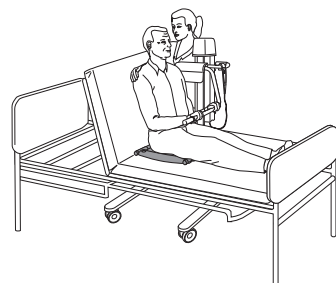


Переверніть пацієнта на спину. Допоможіть пацієнтові сісти прямо, підтримуючи його руками або піднявши головну секцію ліжка.

7

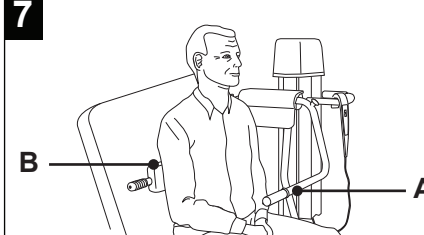


Опустіть опору для рук (А). Нахиліть пацієнта вперед і опустіть спинку (В).

8

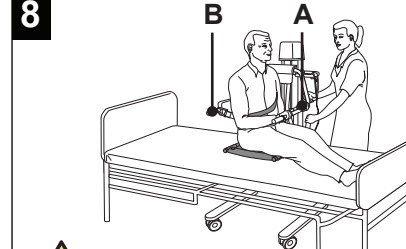


Закріпіть ремінь безпеки. Розташуйте пацієнта посередині сидіння, так щоб його спина прилягала до спинки (В), а руки перебували на опорі для рук (А).

9

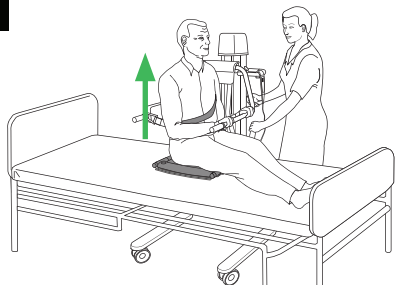

Підніміть сидіння на достатню висоту, щоб можна було перемістити його від ліжка.

10

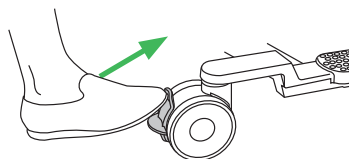

Відпустіть гальма коліщаток.

11




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Постійно наглядайте за пацієнтом, щоб запобігти його травмуванню.

Щоб запобігти защемленню, слідкуйте, щоб волосся, руки та ноги пацієнта розташовувалися близько до тулуба, і використовуйте спеціальні опори під час руху.


12

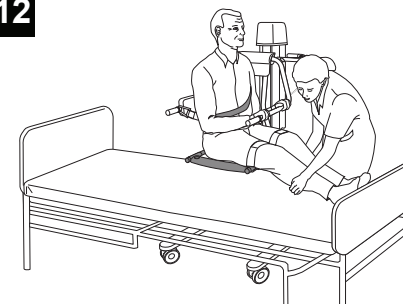

Відкотіть гігієнічне крісло-підйомник Calypso від ліжка, допомагаючи пацієнтові зняти ноги з ліжка.


Переміщення до ліжка

13

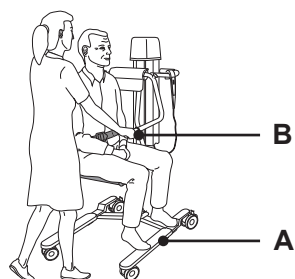

Опустіть гігієнічне крісло-підйомник Calypso, так щоб пацієнт зміг поставити ноги на опору для ніг (A). Під час переміщення використовуйте спеціальні рукоятки для переміщення (B).

1

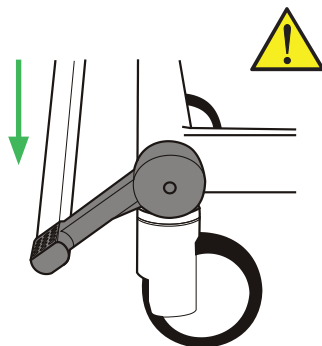

Заблокуйте ліжко гальмами (якщо є).


2



Відрегулюйте висоту гігієнічного крісла-підйомника Calypso, дотримуючись безпечного зазору над матрацом, щоб уникнути защемлення.


Опустіть поручень ліжка.

3

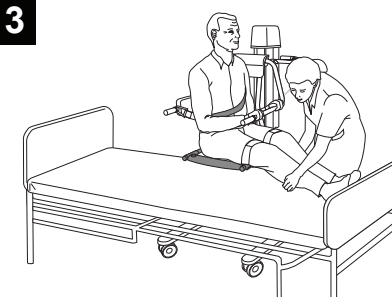

Розташуйте гігієнічне крісло-підйомник Calypso над ліжком і допоможіть пацієнтові перекласти ноги на ліжко.

4

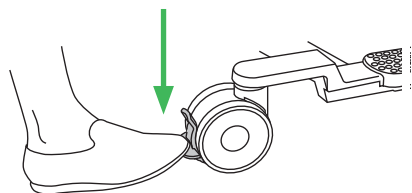


Зabloкуйте всі коліщата гальмами.

5




Будьте обережні, щоб уникнути защемлення будь-яких частин тіла.

Опустіть сидіння гігієнічного крісла-підйомника Calypso так, щоб воно щільно прилягало до ліжка. Якщо потрібно, підніміть головну секцію ліжка.

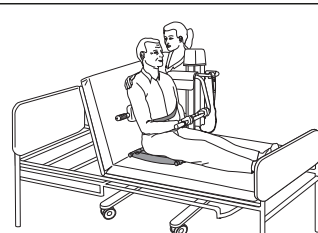


6

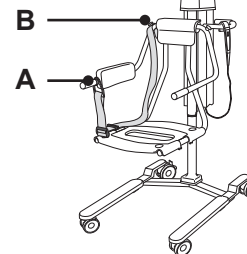

Зніміть ремінь безпеки, послабивши його та знявши один з його кінців з рукоятки для переміщення (A) або виступу (B).


7

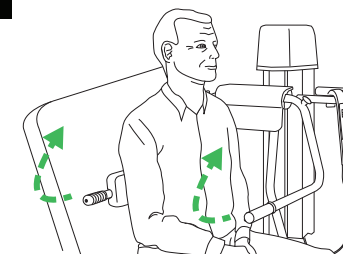

Відкиньте спинку й опору для рук догори.


Допоможіть пацієнтові спертися спиною на ліжку.

8

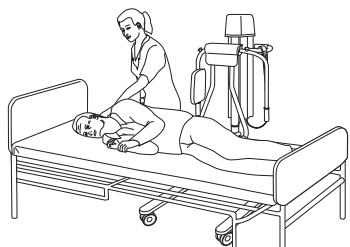


Якщо потрібно, опустіть головну секцію ліжка. Опустіть пацієнта, поклавши його на бік, обличчям від гігієнічного крісла-підйомника Calypso.

9

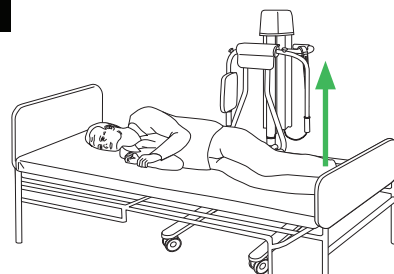

Підніміть гігієнічне крісло-підйомник Calypso, щоб відокремити його від ліжка.

10

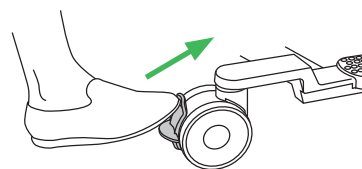

Відпустіть гальма коліщаток.

11

Відкотіть гігієнічне крісло-підйомник Calypso від ліжка. Переверніть пацієнта на спину. Підніміть поручень ліжка.

Переміщення з інвалідного крісла

1

ПРИМІТКА

Для переміщення з інвалідного крісла до гігієнічного крісла-підйомника Calypso пацієнт повинен бути достатньо сильним, щоб рухатися вбік і/або бути здатним підвестися.

2




Застосуйте гальма на інвалідному кріслі.

Розташуйте гігієнічне крісло-підйомник Calypso поруч з інвалідним кріслом.

3


Відрегулюйте гігієнічне крісло-підйомник Calypso так, щоб його сидіння розташовувалося трохи вище за сидіння інвалідного крісла. За ожливості заведіть його за край сидіння інвалідного крісла.

4

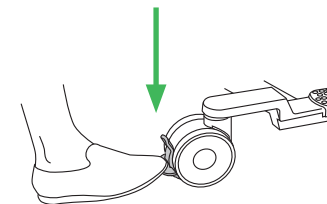


Застосуйте гальма на гігієнічному кріслі-підйомнику Calypso.

5

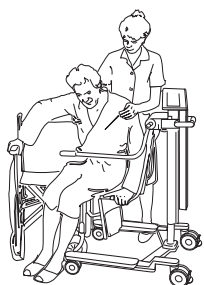


Допоможіть пацієнтові пересісти до гігієнічного крісла-підйомника Calypso.

6

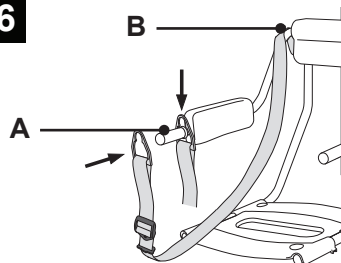

Прикріпіть ремінь безпеки до рукоятки для переміщення (A). Прикріпіть інший кінець ременя безпеки до виступу (B).

7

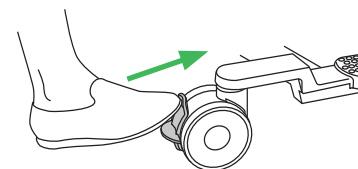

Відпустіть гальма на гігієнічному кріслі-підйомнику Calypso.

8



Під час переміщення тримайтеся за спеціальні рукоятки для переміщення.


Переміщення до інвалідного крісла

1

ПРИМІТКА

Для переміщення з гігієнічного крісла-підйомника Calypso до інвалідного крісла пацієнт повинен бути достатньо сильним, щоб рухатися вбік і/або бути здатним підвестися.

2

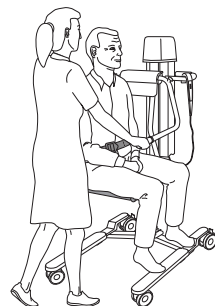

Прослідкуйте, щоб ноги та руки пацієнта перебували на відповідних опорах.

3



Застосуйте гальма на інвалідному кріслі.


Зніміть підлокітник інвалідного крісла та складіть опори для ніг.

Розташуйте гігієнічне крісло-підйомник Calypso поруч з інвалідним кріслом.

4


Відрегулюйте гігієнічне крісло-підйомник Calypso так, щоб його сидіння розташовувалося трохи вище за сидіння інвалідного крісла. За можливості заведіть його за край сидіння інвалідного крісла.

5

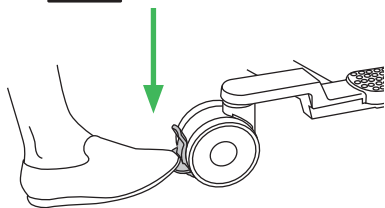


Застосуйте гальма на гігієнічному кріслі-підйомнику Calypso.

6

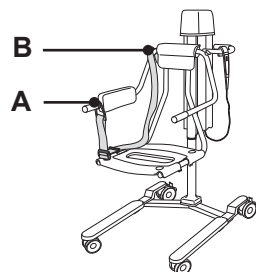

Зніміть ремінь безпеки, послабивши його та знявши один з його кінців з рукоятки для переміщення (A) або виступу (B).

7

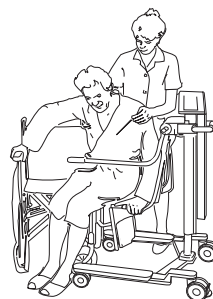

Допоможіть пацієнтові пересісти до інвалідного крісла.

8

Переконайтеся, що пацієнт сидить в інвалідному кріслі зручно й безпечно.

Купання пацієнта

1



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Під час опускання звертайте увагу на нерухомі предмети.

Слідкуйте за тим, щоб руки й ноги пацієнта розташовувалися близько до тулуба.

Переконайтеся, що ремінь безпеки надійно закріплено.

У жодному разі не залишайте пацієнта без нагляду.


2

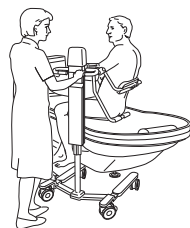

Будьте обережні, щоб уникнути защемлення частин тіла.

Підніміть гігієнічне крісло-підйомник Calypso, щоб завести його за край ванни. Перемістіть пацієнта, так щоб він опинився над ванною.

3

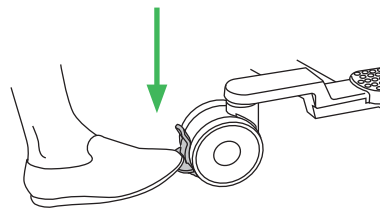

Застосуйте гальма на гігієнічному кріслі-підйомнику Calypso.

4



Підніміть ванну на зручну висоту.

5




Опустіть сидіння гігієнічного крісла-підйомника Calypso на дно ванни.
Зніміть ремінь безпеки.

6




Перемістіть опору для рук уперед.
Трохи нахиліть спинку.
Скупайте пацієнта.

7

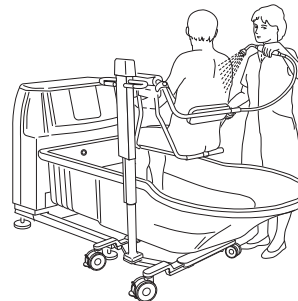

Опустіть опору для рук.
Підніміть спинку.
Закріпіть ремінь безпеки.
Вимийте пацієнта під душем.

8

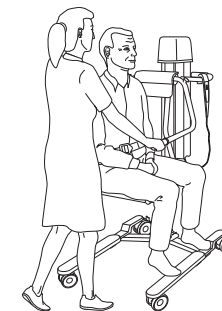

Витріть пацієнта насухо.
Вкрийте або одягніть пацієнта.
Відвезіть пацієнта до його кімнати.

