

# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



## การจัดเตรียม

1

ลดความสูงของอ่างอาบน้ำ  
สู่ระดับต่ำสุด

2

การอาบน้ำด้วยเก้าอี้สำหรับผู้พิการ: ติดตั้งหมอนรองศีรษะ  
การอาบน้ำด้วยเตียงรถเข็นอ่างอาบน้ำ: ไม่ต้องติดตั้งหมอนรอง  
ศีรษะหรือส่วนรองรับเท้า

3

ระวังน้ำร้อนลวก

กดปุ่มเติมน้ำอัตโนมัติ ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำ  
ด้วยมือ ปรับอุณหภูมิตามความจำเป็น

4

ปิดท่อระบายน้ำ

## การอาบน้ำให้ผู้พิการด้วยเก้าอี้สำหรับผู้พิการ

5

ปรับเก้าอี้สำหรับผู้พิการ  
ให้กึ่งตรงกับด้านข้างของอ่างอาบน้ำ

6

มีความเสี่ยง  
ของการหนีบ

ยกเก้าอี้สำหรับผู้พิการขึ้นให้มีพื้นที่  
เพียงพอระหว่างอวัยวะเพศของผู้พิการ  
และขอบอ่างอาบน้ำ

7

ระวังผู้ป่วย  
เกี่ยวติด

เลื่อนเก้าอี้สำหรับผู้พิการเข้าหาอ่างอาบน้ำ  
ยกขาผู้พิการขึ้นเหนือขอบอ่างอาบน้ำขณะที่  
หมุนลิฟต์เข้าที่

8

ให้ผู้พิการลองใช้ขาแตะน้ำ  
เพื่อเช็คอุณหภูมิก่อน  
ปรับอุณหภูมิตามความจำเป็น

9

วางตำแหน่งเก้าอี้ตรงกลางเหนืออ่าง  
อาบน้ำกระทั่งหยุดที่ขาและขอบอ่าง

10

มีความเสี่ยง  
ของการหนีบ

ปรับความสูงของเก้าอี้สำหรับผู้พิการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผู้ดูแล  
ยกอ่างอาบน้ำขึ้น ตรวจสอบว่ามีพื้นที่เพียงพอระหว่างอวัยวะเพศของผู้พิการ  
และด้านล่างของอ่างอาบน้ำ

11

ยึดส่วนรองรับเท้า หากต้องการ  
อาบน้ำให้ผู้พิการ

## การอาบน้ำให้ผู้พิการโดยใช้เตียงรถเข็นอ่างอาบน้ำ

12

วางเตียงอ่างอาบน้ำด้านข้างเฉียงไป  
ด้านหลังของอ่างอาบน้ำ

13

ยกเตียงรถเข็นอ่างอาบน้ำให้พ้นจาก  
ขอบอ่างอาบน้ำ

14

เลื่อนเตียงรถเข็นอ่างอาบน้ำพร้อมผู้พิการ  
ในแนวแกนเหนือขอบอ่างอาบน้ำ

15

วางตำแหน่งเตียงรถเข็นไว้ตรงกลาง  
จนกว่าจะหยุดที่ขาและขอบอ่างอาบน้ำ


16

ปรับเตียงรถเข็นอ่างอาบน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผู้ดูแล  
ยกอ่างอาบน้ำขึ้นจนกว่าเตียงรถเข็นสัมผัสกับด้านล่างของอ่างอาบน้ำ


17

ยึดส่วนรองรับเท้า หากต้องการ  
อาบน้ำให้ผู้พิการ


Hydromassage (อุปกรณ์เสริม)




ระวังผู้ป่วย  
เกี่ยวติด

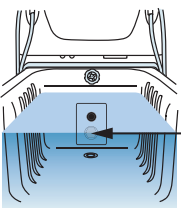


ติดตั้งปลอกหุ้มดูด  
ก่อนใช้งาน

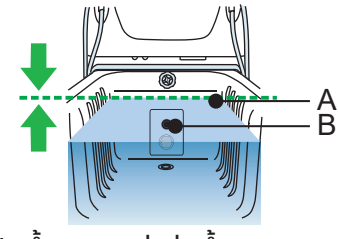


เปิดน้ำจนสูงกว่าท่อน้ำออก  
ของระบบ Hydromassage (A)  
และเซ็นเซอร์ด้านบนสุด (B)

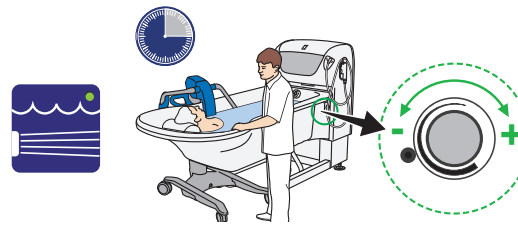

กดปุ่มระบบ Hydromassage  
เวลาทำงานค่าเริ่มต้นคือ 15 นาที  
เริ่มต้นด้วยความแรงระดับต่ำ ปรับตามต้องการ

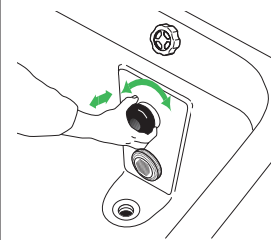


ปรับทิศทางของ  
การพ่นน้ำ




หลังจากอาบน้ำเสร็จ  
ให้ปิดระบบ  
Hydromassage


Hydrosound (อุปกรณ์เสริม)




ห้ามใช้กับสตรีตั้ง  
ครรภ์

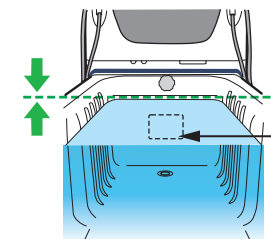


เปิดน้ำจนสูงกว่าแผ่นตัววัดของระบบ  
Hydrosound เติมน้ำปรับสภาพน้ำ  
Arjo Sound




มีความเสี่ยงที่จะ  
ถูกลวกและเป็น  
อันตรายต่อการ  
ได้ยิน




อย่าสัมผัสแผ่นตัววัด และดูแล  
ให้ศีรษะของผู้พักฟื้นอยู่น้ำ

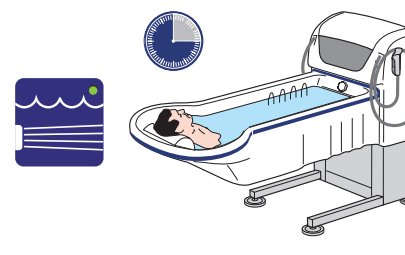

กดปุ่มระบบ Hydrosound  
เวลาทำงานค่าเริ่มต้นคือ 15 นาที

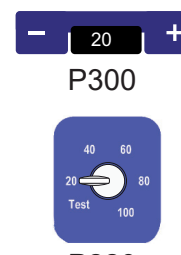


P300  
P220  
ปรับความแรงของ  
Hydrosound



หลังจากอาบน้ำเสร็จ  
ให้ปิดระบบ  
Hydrosound


การอาบน้ำผู้ป่วย

18

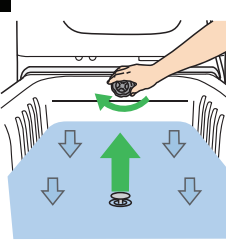


เปิดท่อน้ำ

19

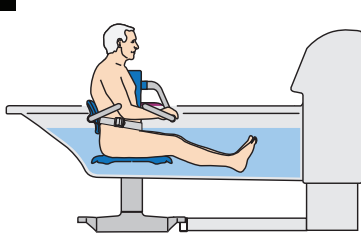


ยกพนักพิงหลังขึ้น ให้ผู้พักฟื้น  
จับส่วนพยักมือ

20

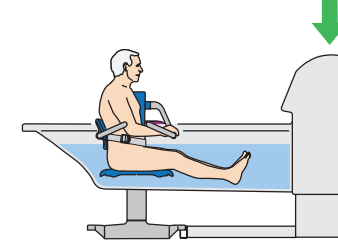


ลดความสูงของอ่างอาบน้ำสู่ระดับต่ำสุด

21

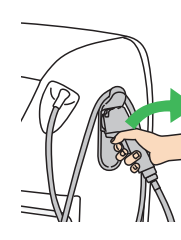


ด้ามจับฝักบัว กดปุ่มฝักบัว หันด้ามจับฝักบัวออก  
และหันออกจากตัวผู้พักฟื้น

22




ระวังน้ำร้อนลวก




กดปุ่มกดบนด้ามจับฝักบัว  
ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยมือ ปรับอุณหภูมิ  
ตามความจำเป็น

23




ให้ผู้พักฟื้นลองใช้มือแตะน้ำก่อนหันสายน้ำ  
เข้าหาผู้พักฟื้น ปรับอุณหภูมิตามความจำเป็น

24




ใช้ฝักบัวล้างตัวผู้ป่วย

25

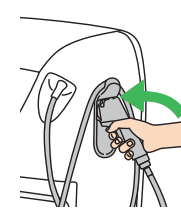


ปลดล็อกด้ามกดของด้ามจับฝักบัว  
หากยังล็อกอยู่  
กดปุ่มฝักบัว  
คืนด้ามจับฝักบัวกลับที่เดิม

26

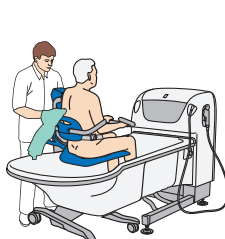


เช็ดตัวผู้พักฟื้นให้แห้ง

27

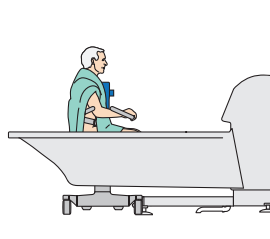


รักษาความอบอุ่นของผู้พักฟื้น  
โดยใช้ผ้าเช็ดตัวหรือชุดคลุม

28

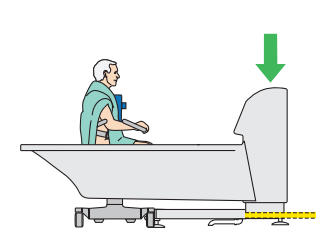


ลดความสูงของอ่างอาบน้ำสู่ระดับต่ำสุด

29

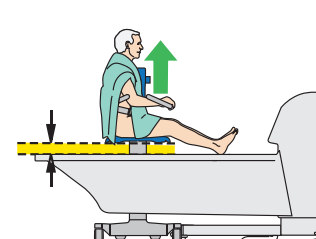


ยกเก้าอี้ลิฟต์สำหรับผู้พักฟื้นขึ้นให้มีพื้นที่เพียงพอ  
ระหว่างอวัยวะของผู้พักฟื้นและขอบอ่างอาบน้ำ

30




มีความเสี่ยง  
ของการหนี

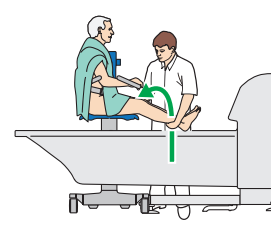


ช่วยผู้พักฟื้นยกขาขึ้นเหนือขอบอ่างอาบน้ำ  
ขณะหมุนลิฟต์ออกจากอ่างอาบน้ำ

31

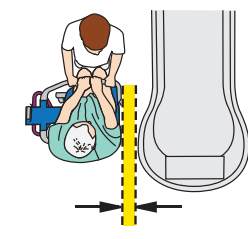


ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอระหว่าง  
ด้านข้างอ่างอาบน้ำและเก้าอี้ลิฟต์สำหรับผู้พักฟื้น

32

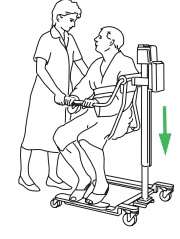

ลดเก้าอี้ลิฟต์สำหรับผู้พักฟื้นลง  
เช็ดบริเวณที่เปียกที่หล่อให้แห้ง

33



มีความเสี่ยงของการปนเปื้อน

หลังจากการใช้งานของ  
ผู้พักฟื้นแต่ละคน:  
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ  
อ่างอาบน้ำตามตามค่า  
แนะนำใน IFU หรือทำความสะอาด  
และฆ่าเชื้อ QRG