

System 2000 Rhapsody、Primo、Harmonie



準備工作

1

把浴缸降到最低的高度。

2

用沐浴椅為病患沐浴：要放上頭部靠墊。用沐浴推床為病患沐浴：不需要放上頭部靠墊或足部支架。

3

燙傷危險

按下自動注水按鈕。用手檢查一下水溫。請視需要調整溫度。

4

關閉排水管。

用抬升式沐浴椅為病患沐浴

5

將抬升式沐浴椅斜靠在浴缸側面。

6

夾傷危險

抬高抬升式沐浴椅，使患者的生殖器和浴缸邊緣之間有足夠的空間。

7

掉入危險

將抬升式沐浴椅移向浴缸。將病患的腿移到浴缸邊緣，同時旋轉移位機到合適的位置。

8

讓病患用腳感受水溫。請視需要調整溫度。

9

讓椅子置於浴缸中央，直到其接觸到浴缸腿或邊緣為止。

10

夾傷危險

為照護員調整抬升式沐浴椅至符合人體工學的高度。升高浴缸。確保病患的生殖器和浴缸底部之間有足夠的空間。

11

若有需要，請拆下足部支架。為病患沐浴。

用抬升式沐浴推床為病患沐浴

12

將抬升式沐浴推床放在浴缸後面與側邊。

13

將抬升式沐浴推床的擔架往上升，使浴缸的邊緣留出空間。

14

移動移位式沐浴推床，病患以對角位置移動到浴缸上方。

15

讓推床置於浴缸中央，直到其接觸到浴缸腿或邊緣為止。


16

為照護員調整抬升式沐浴推床至符合人體工學的高度。抬高浴缸，直到擔架接觸到浴缸底部。


17

若有需要，請拆下足部支架。為病患沐浴。


Hydromassage (選項)




掉入危險

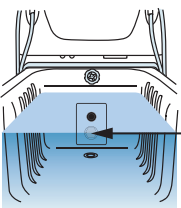


使用前請安裝吸入口外殼。

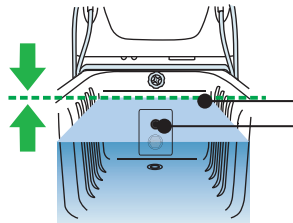


給浴缸注水至水蓋過 Hydromassage 系統出口 (A) 和頂端的感測器 (B)。

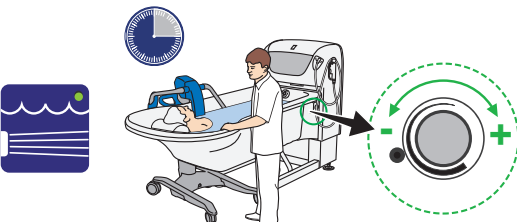

按下 Hydromassage 系統按鈕。
預設的運作時間為 15 分鐘。
從低強度開始。請視需要調整。

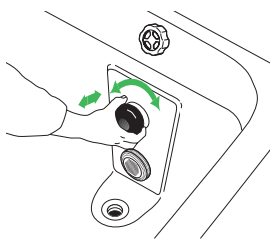


調整噴水口的方向。




治療結束後，關閉 Hydromassage 系統。


Hydrosound (選項)




請絕對不要在懷孕時使用

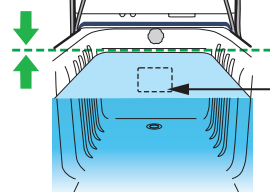


給浴缸注水至水蓋過 Hydrosound 系統傳感器板。添加 Arjo Sound 淨水器




有燒傷和聽力受損的危險




不要觸碰傳感器板，並保持病患的頭部露出水面。

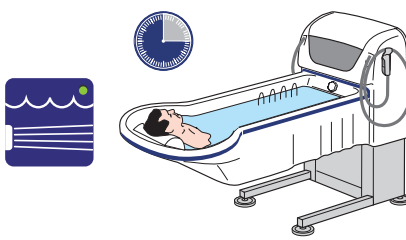

按下 Hydrosound 系統按鈕。
預設的運作時間為 15 分鐘。

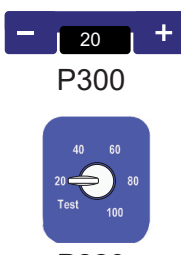


調整 Hydrosound 強度。



治療結束後，關閉 Hydrosound 系統。


幫病患淋浴

18

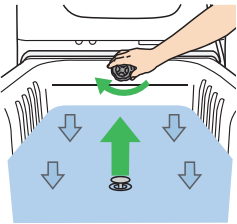


打開排水管。

19

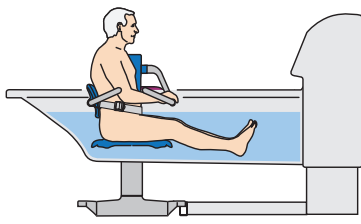


抬升病床的靠背。
讓病患把手放在扶手上。

20

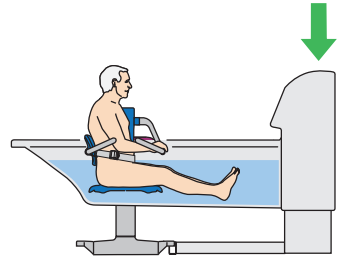


把浴缸降到最低的高度。

21

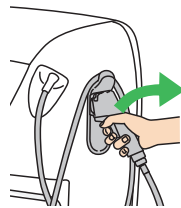


拿起蓮蓬頭手柄。按下沐浴按鈕。將蓮蓬頭手柄指向遠離病患方向。

22




燙傷危險

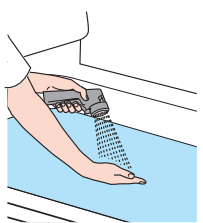


按下蓮蓬頭手柄上的觸發器。
用手檢查一下水溫。請視需要調整溫度。

23

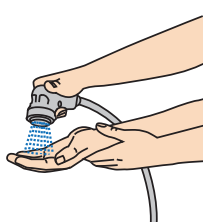


在水流到病患身上之前，讓病患用手去感受水溫。請視需要調整溫度。

24



幫病患淋浴。

25

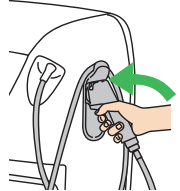

如果鎖定按鈕被啟用，則蓮蓬頭手柄觸發器解除鎖定。
按下沐浴按鈕。
放回蓮蓬頭手柄。

結束沐浴

26



擦乾病患。

27



給病患蓋上毛巾或穿上浴袍以保暖。

28



把浴缸降到最低的高度。

29



抬高抬升式沐浴椅，使患者的生殖器和浴缸邊緣之間有足夠的空間。

30



夾傷危險



在將移位機轉離浴缸時，請協助病患將腳移到浴缸邊緣上。

31



請確保浴缸和抬升式沐浴椅之間有足夠的空間。

32



降低抬升式沐浴椅。
將病患其他還沒乾的部位擦乾。

33



污染危險

每個病患使用後：
請依照使用手冊 (IFU) 或清潔與消毒快速參考指南中的說明對浴缸進行清潔與消毒。