

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



Forberedelser

1

Senk badekaret til laveste stilling.

2

Bading med hygienestol: Fest hodeputen. Bading med badevogn: Ikke fest hodeputen eller fotstøtten.

3

Risiko for skålding

Trykk på knappen for autofylling. Kontroller vanntemperaturen med en bar hånd. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.

4

Lukk avløpet.

Bade pasienten med en høyderegulerbar hygienestol

5

Plasser den høyderegulerbare hygienestolen diagonalt ved siden av badekaret.

6

Risiko for klemming

Løft hygienestolen slik at det er litt plass mellom pasientens genitalier og badekarkanten.

7

Risiko for å bli sittende fast

Flytt den høyderegulerbare hygienestolen mot badekaret. Løft pasientens ben over badekarkanten samtidig som du dreier heisen på plass.

8

La pasienten kjenne på vannet med foten. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.

9

Plasser stolen midt over badekaret til den stopper mot badekarbena og -kanten.

10

Risiko for klemming

Juster hygienestolen til en ergonomisk høyde for pleieren. Hev badekaret. Pass på at det er nok plass mellom pasientens genitalier og bunnen av badekaret.

11

Fest om nødvendig fotstøtten. Bad pasienten.

Bade pasienten med en høyderegulerbar badevogn

12

Plasser badevognen bak badekaret, til siden.

13

Løft den regulerbare vognbåren slik at den går klar av badekarkanten

14

Flytt badevognen med pasienten diagonalt inn over badekarkanten.

15

Plasser vognen midt over badekaret til den stopper mot badekarbena og -kanten.

16

Juster badevognen til en ergonomisk høyde for pleieren. Hev badekaret til båren berører bunnen av badekaret.

17

Fest om nødvendig fotstøtten. Bad pasienten.

Hydromassage (ekstrautstyr)



Risiko for å bli sittende fast



Monter sugedekselet før bruk.



Fyll badekaret med vann over Hydromassage-systemutløpet (A) og toppsensoren (B).



Trykk på Hydromassage-knappen. Standard driftstid er 15 minutter. Start med lav intensitet. Juster etter behov.




Juster vannstrålens retning.




Slå av Hydromassage-systemet etter behandling.


Hydrosound (ekstrautstyr)




Må ikke brukes av gravide

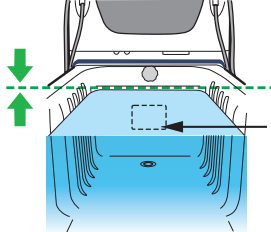


Fyll badekaret med vann over Hydrosound-systemets omformerplate. Tilsett Arjo Sound vannbehandlingsvæske.




Fare for brannskade og hørselsskade




Ikke berør transduserplaten, og hold pasientens hode over vann.



Trykk på Hydrosound-knappen. Standard driftstid er 15 minutter.

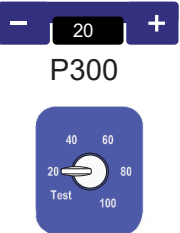


Juster Hydrosound-intensiteten.



Slå av Hydrosound-systemet etter behandling.


Dusje pasienten

18

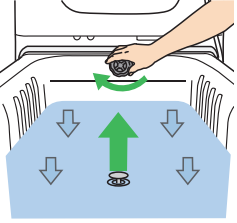


Åpne avløpet.

19

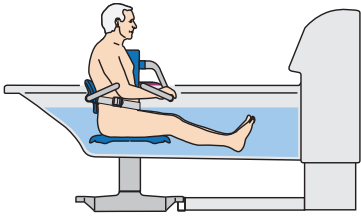


Hev ryggstøtten. La pasienten holde seg i håndstøtten.

20

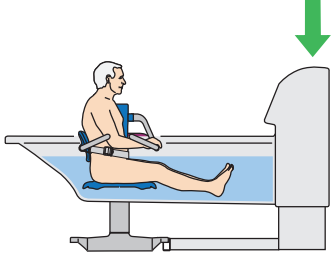


Senk badekaret til laveste stilling.

21

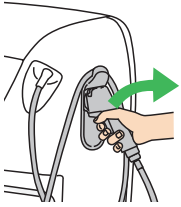


Grip dusjhåndtaket. Trykk på dusjknappen. Rett dusjhåndtaket bort fra pasienten.

22




Risiko for skålding

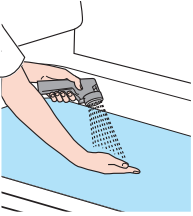


Trykk på utløseren på dusjhåndtaket. Kontroller vanntemperaturen med en bar hånd. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.

23




La pasienten kjenne på vannet med hånden før du retter vannstrømmen mot ham eller henne. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.

24



Dusj pasienten.

25

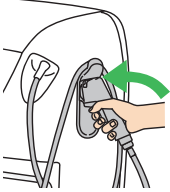

Lås opp dusjhåndtakets utløser hvis låseknappen er aktivert. Trykk på dusjknappen. Sett dusjhåndtaket tilbake.

Avslutte badet

26



Tørk pasienten.

27



Hold pasienten varm med håndklær eller en badekåpe.

28



Senk badekaret til laveste stilling.

29



Løft hygienestolen slik at det er litt plass mellom pasientens genitalier og badekarkanten.

30



Risiko for klemming



Hjelp pasienten med å flytte bena over badekarkanten mens løfteren roteres bort fra badekaret.

31



Kontroller at det er tilstrekkelig plass mellom badekarets side og hygienestolen.

32



Senk den høyderegulerbare hygienestolen. Tørk resten av de våte områdene.

33



Risiko for kontaminering

Etter hver pasient: Rengjør og desinfiser badekaret i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen eller hurtigveiledningen for Rengjøring og desinfisering.