

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



Predisposizioni per l'utilizzo

1

Abbassare completamente la vasca.

2

Fare il bagno con il sollevapazienti igienico a sedia: fissare il cuscino per la testa. Fare il bagno con il sollevapazienti igienico a barella: non fissare il cuscino per la testa o il poggiatesta.

3

Rischio di scottatura

Premere il pulsante di riempimento automatico. Controllare la temperatura dell'acqua con la mano nuda. Se necessario, regolare la temperatura.

4

Chiudere lo scarico.

Fare il bagno al paziente con il sollevapazienti igienico a sedia

5

Posizionare il sollevapazienti igienico a sedia in diagonale verso il lato della vasca.

6

Rischio di intrappolamento

Sollevare il sollevapazienti igienico a sedia quanto basta per lasciare spazio tra i genitali del paziente e il bordo della vasca.

7

Rischio di intrappolamento

Spostare il sollevapazienti igienico a sedia verso la vasca. Sollevare le gambe del paziente sul bordo della vasca ruotando il sollevapazienti in posizione.

8

Lasciare che il paziente senta la temperatura dell'acqua con i piedi. Se necessario, regolare la temperatura.

9

Centrare la sedia sopra la vasca finché non si blocca contro le gambe e il bordo della vasca.

10

Rischio di intrappolamento

Regolare il sollevapazienti igienico a sedia per ottenere un'altezza ergonomica per l'assistente. Sollevare la vasca. Assicurarsi che vi sia abbastanza spazio tra i genitali del paziente e il fondo della vasca.

11

Fissare il poggiatesta se necessario. Fare il bagno al paziente.

Fare il bagno al paziente con un sollevapazienti igienico a barella

12

Posizionare il sollevapazienti igienico a barella dietro e di fianco alla vasca.

13

Sollevare il sollevapazienti igienico a barella oltre il bordo della vasca.

14

Spostare il sollevapazienti igienico a barella con il paziente diagonalmente sopra il bordo della vasca.

15

Centrare la barella sopra la vasca finché non si blocca contro le gambe e il bordo della vasca.


16

Regolare il sollevapazienti igienico a barella per ottenere un'altezza ergonomica per l'assistente. Sollevare la vasca finché la barella non tocca il fondo.


17

Fissare il poggiatesta se necessario. Fare il bagno al paziente.


Hydromassage (opzionale)




Rischio di intrappolamento

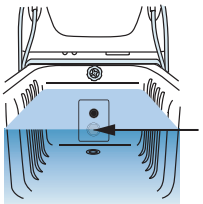


Installare la cover di aspirazione prima dell'uso.

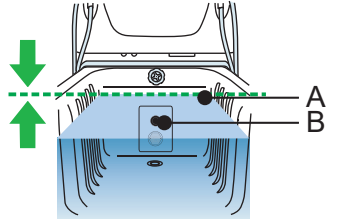


Riempire con acqua per coprire la bocchetta del sistema Hydromassage (A) e il sensore superiore (B).

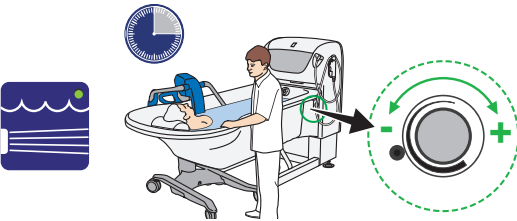

Premere il pulsante del sistema Hydromassage. La durata preimpostata è di 15 minuti. Iniziare con la bassa intensità. Regolare se necessario.

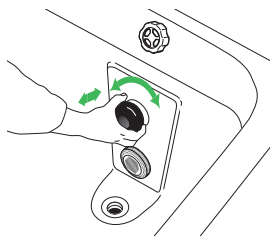

Regolare la direzione del getto d'acqua.



Dopo il trattamento, spegnere il sistema Hydromassage.

Hydrosound (opzionale)



Non usare mai in gravidanza.



Riempire con acqua per coprire la piastra di trasduzione del sistema Hydrosound. Aggiungere il condizionatore per acqua ArjoSound.



Rischio di ustioni e danni all'udito.



Non toccare la piastra di trasduzione e tenere la testa del paziente sopra il livello dell'acqua.



Premere il pulsante del sistema Hydrosound. La durata preimpostata è di 15 minuti.




Regolare l'intensità di Hydrosound.



Dopo il trattamento, spegnere il sistema Hydrosound.


Fare la doccia al paziente

18

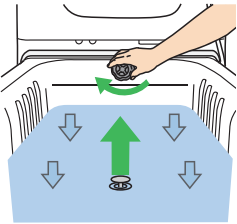


Aprire lo scarico.

19

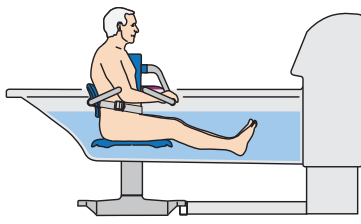


Sollevare lo schienale. Lasciare che il paziente si appoggi al bracciolo.

20

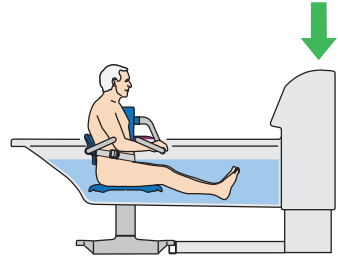



Abbassare completamente la vasca.

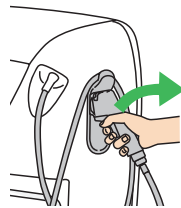21



Prendere la doccetta. Premere il pulsante per doccia. Orientare la doccetta lontano dal paziente.


22



Rischio di scottatura


Premere il grilletto della doccetta. Controllare la temperatura dell'acqua con la mano nuda. Se necessario, regolare la temperatura.

23




Lasciare che il paziente senta la temperatura dell'acqua con la mano prima di dirigere il getto d'acqua sul paziente. Se necessario, regolare la temperatura.

24



Fare la doccia al paziente.


25

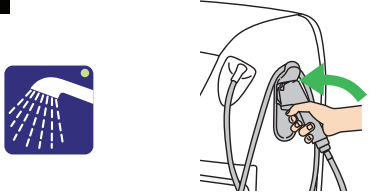

Sbloccare il grilletto della doccetta se il pulsante di blocco è attivato. Premere il pulsante per doccia. Riporre la doccetta.


Fine del bagno

26

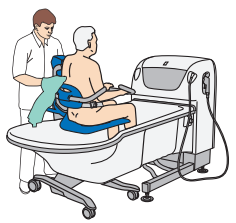


Asciugare il paziente.

27

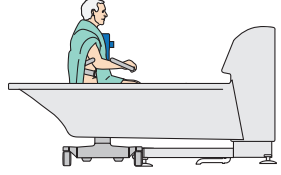


Mantenere il paziente al caldo usando degli asciugamani o un accappatoio.

28

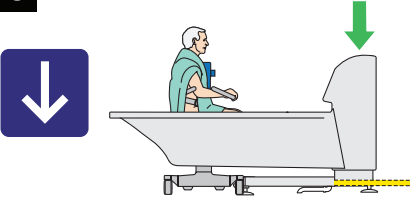



Abbassare completamente la vasca.

29

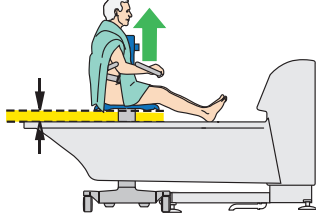

Sollevare il sollevapazienti igienico a sedia quanto basta per lasciare spazio tra i genitali del paziente e il bordo della vasca.


30

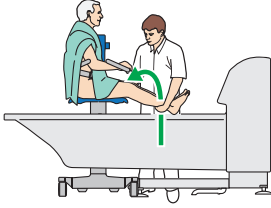

Rischio di intrappolamento


Aiutare il paziente a spostare le gambe oltre il bordo mentre si ruota il sollevapazienti lontano dalla vasca.

31

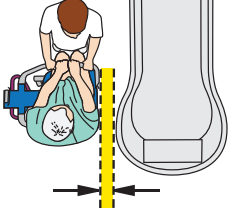


Accertarsi che vi sia spazio sufficiente tra il lato della vasca e il sollevapazienti igienico a sedia.

32

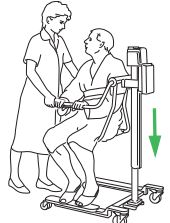

Abbassare il sollevapazienti igienico a sedia. Asciugare le parti del corpo ancora bagnate.

33



Rischio di contaminazione

Dopo ogni paziente:
pulire e disinfettare la vasca secondo le istruzioni riportate nelle Istruzioni per l'uso (IFU) o nella Guida rapida (QRG) sulla pulizia e la disinfezione.