

# System 2000 Rhapsody, Primo y Harmonie



## Preparativos

<p><b>1</b></p> <p>Baje la bañera hasta su altura mínima.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Baño con una silla de higiene: coloque el cojín para la cabeza. Baño con camilla de baño: no coloque el cojín para la cabeza ni el reposapiés.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Riesgo de quemadura</p> <p>Pulse el botón de autollenado. Compruebe la temperatura del agua con la mano. Regule la temperatura, en caso necesario.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Cierre el desagüe.</p>
---	---	---	---

## Baño del paciente con una silla grúa para higiene


<p><b>5</b></p> <p>Coloque la silla grúa para higiene en diagonal respecto al lateral de la bañera.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Riesgo de aplastamiento</p> <p>Eleve la silla grúa para higiene de forma que quede un espacio entre los genitales del paciente y el borde de la bañera.</p>	<p><b>7</b></p> <p>Riesgo de atrapamiento</p> <p>Mueva la silla grúa para higiene hacia la bañera. Levante las piernas del paciente por encima del borde de la bañera mientras gira la grúa hasta su posición.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Deje que el paciente sienta el agua con sus pies. Regule la temperatura, en caso necesario.</p>
<p><b>9</b></p> <p>Centre la silla sobre la bañera hasta que entre en contacto con los pies y el borde de esta.</p>	<p><b>10</b></p> <p>Riesgo de aplastamiento</p> <p>Ajuste la silla grúa para higiene a una altura ergonómica para el cuidador. Suba la bañera. Asegúrese de que haya espacio suficiente entre los genitales del paciente y el fondo de la bañera.</p>	<p><b>11</b></p> <p>Coloque el reposapiés si es necesario. Bañe al paciente.</p>	

## Baño del paciente con una camilla grúa de baño


<p><b>12</b></p> <p>Coloque la camilla grúa de baño en la parte posterior de la bañera, hacia un lateral.</p>	<p><b>13</b></p> <p>Eleve la camilla grúa de baño lo suficiente para que no toque el borde de la bañera.</p>	<p><b>14</b></p> <p>Desplace la camilla grúa de baño con el paciente en diagonal sobre el borde de la bañera.</p>	<p><b>15</b></p> <p>Centre la camilla sobre la bañera hasta que entre en contacto con los pies y el borde de esta.</p>
<p><b>16</b></p> <p>Ajuste la camilla grúa de baño a una altura ergonómica para el cuidador. Eleve la bañera hasta que la camilla toque el fondo de esta.</p>	<p><b>17</b></p> <p>Coloque el reposapiés si es necesario. Bañe al paciente.</p>		

## Hydromassage (opcional)

**Riesgo de atrapamiento**

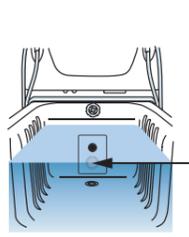


Instale la tapa del sistema de aspiración antes de usar el dispositivo.

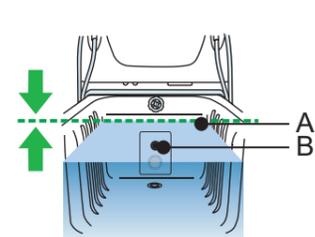

Llene con agua hasta cubrir la salida del sistema Hydromassage (A) y el sensor superior (B).



Pulse el botón del sistema Hydromassage. El tiempo de funcionamiento predeterminado es de 15 minutos. Empiece con una intensidad baja y ajústela si es necesario.

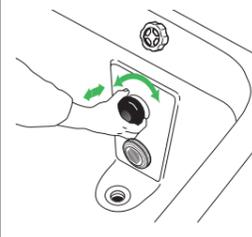


Ajuste la dirección del chorro de agua.



Tras el tratamiento, apague el sistema Hydromassage.

## Hydrosound (opcional)

**No use nunca el dispositivo con personas embarazadas.**

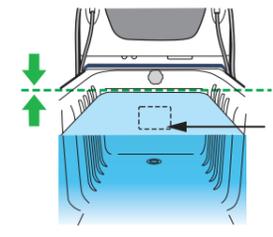

Llene con agua hasta cubrir la placa del transductor del sistema Hydrosound. Añada acondicionador de agua Arjo Sound.


**Riesgo de quemaduras y daño auditivo.**



No toque la placa del transductor y mantenga la cabeza del paciente fuera del agua.



Pulse el botón del sistema Hydrosound. El tiempo de funcionamiento predeterminado es de 15 minutos.

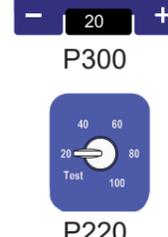


Ajuste la intensidad del sistema Hydrosound.



Tras el tratamiento, apague el sistema Hydrosound.


## Ducha del paciente

**18**

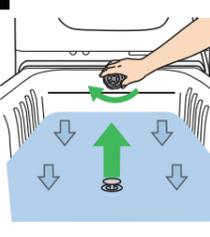


Abra el desagüe.

**19**

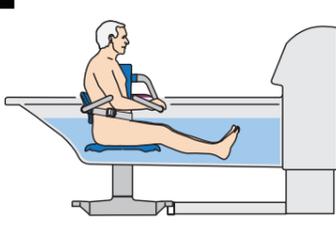

Levante el respaldo. Deje que el paciente se agarre al reposamanos.

**20**

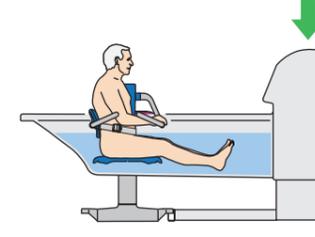

Baje la bañera hasta su altura mínima.


**21**



Coja el cabezal de ducha. Pulse el botón de la ducha. No dirija el cabezal de ducha hacia el paciente.

**22**

**Riesgo de quemadura**

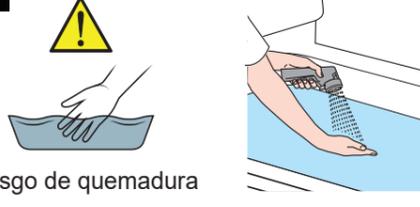

Apriete el gatillo del cabezal de ducha. Compruebe la temperatura del agua con la mano. Regule la temperatura, en caso necesario.

**23**



Deje que el paciente sienta el agua con la mano antes de dirigir hacia él el chorro de agua. Regule la temperatura, en caso necesario.

**24**



Duche al paciente.

**25**



Si el botón de bloqueo está activado, desbloquee el gatillo del cabezal de ducha. Pulse el botón de la ducha. Vuelva a colocar el cabezal de ducha en su lugar.

## Fin del baño

**26**




Seque al paciente.

**27**




Utilice toallas o un albornoz para evitar que el paciente se enfríe.

**28**

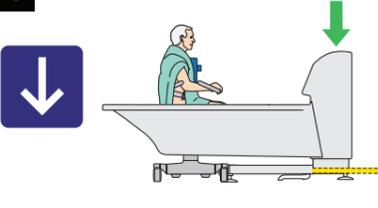

Baje la bañera hasta su altura mínima.


**29**

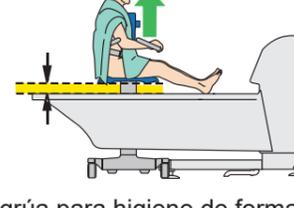

Eleve la silla grúa para higiene de forma que quede un espacio entre los genitales del paciente y el borde de la bañera.


**30**

**Riesgo de aplastamiento**

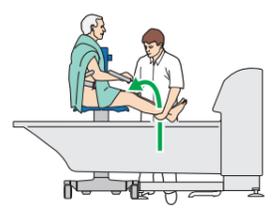

Ayude al paciente a pasar las piernas por encima del borde mientras gira la grúa para retirarla de la bañera.

**31**

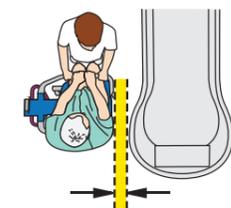

Asegúrese de que haya espacio suficiente entre el lateral de la bañera y la silla grúa para higiene.

**32**



Baje la silla grúa de higiene. Seque las partes que aún estén mojadas.

**33**

**Riesgo de contaminación**

**Después de cada paciente:** Limpie y desinfecte la bañera tal y como se indica en las instrucciones de uso (IDU) o en la guía de referencia rápida (QRG) de limpieza y desinfección.