



System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie




Préparatifs

1

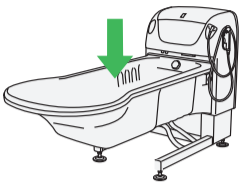




Abaissier la baignoire jusqu'en bas.

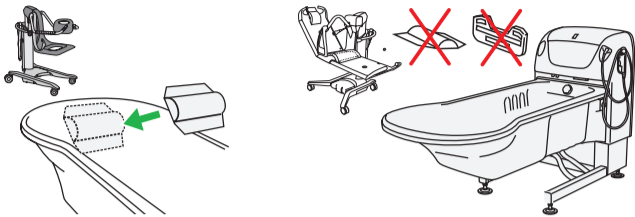2



Donner le bain à l'aide du fauteuil d'hygiène : fixer le coussin de tête. Donner le bain à l'aide du chariot d'hygiène : ne pas fixer le coussin de tête ou le cale-pieds.


3



Risque de brûlures

Appuyer sur le bouton d'auto-remplissage. Vérifier la température de l'eau à main nue. Régler la température, s'il y a lieu.


4

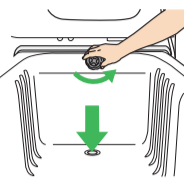

Placer le bouchon sur la bonde.



Donner le bain au patient à l'aide du fauteuil élévateur d'hygiène

5

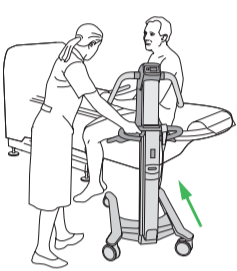

Positionner le fauteuil élévateur d'hygiène en diagonale sur le côté de la baignoire.



6

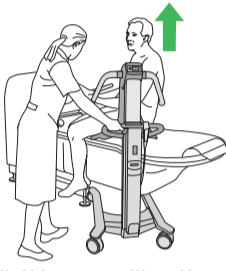

Risque de pincement

Soulever le fauteuil élévateur d'hygiène pour garantir un espacement suffisant entre le rebord de la baignoire et les parties génitales du patient.


7

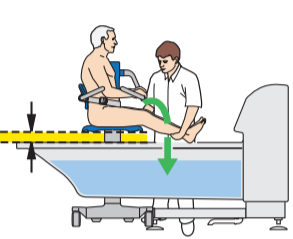

Risque de coincement


Déplacer le fauteuil élévateur d'hygiène vers la baignoire. Soulever les jambes du patient par-dessus le bord de la baignoire tout en faisant pivoter le lève-personne en place.

8






Demander au patient de sentir la température de l'eau avec son pied. Régler la température, s'il y a lieu.

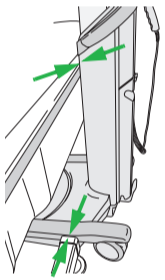9



Placer le fauteuil de manière centrale au-dessus de la baignoire jusqu'à ce qu'il arrive en butée contre les pieds et le rebord de la baignoire.

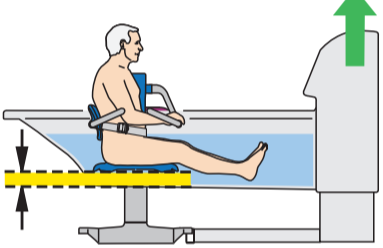
10



Risque de pincement

Régler le fauteuil élévateur d'hygiène à une hauteur qui soit ergonomique pour le personnel soignant. Monter la baignoire. Vérifier qu'il y a suffisamment d'espace entre les organes génitaux du patient et le fond de la baignoire.


11

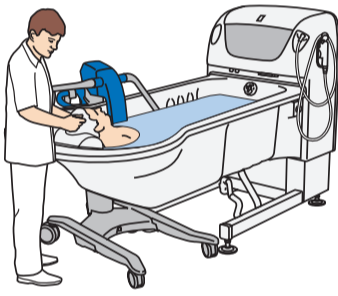

Fixer le cale-pieds, si besoin. Donner le bain au patient.


Donner le bain au patient à l'aide d'un chariot élévateur d'hygiène.

12

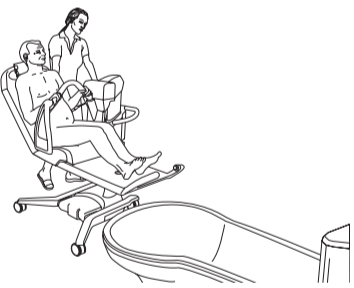


Positionner le chariot élévateur d'hygiène derrière la baignoire, et sur le côté de celle-ci.

13

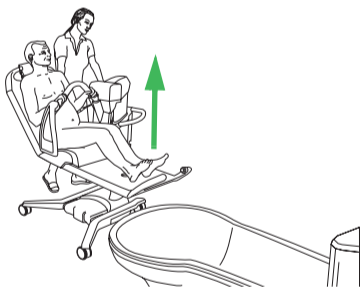


Soulever le chariot élévateur d'hygiène suffisamment afin de dégager le bord de la baignoire

14




Amener le chariot élévateur d'hygiène avec le patient, en diagonale au-dessus de la baignoire.

15

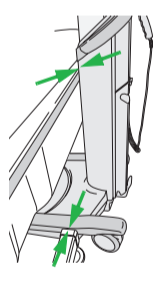


Placer le chariot de manière centrale jusqu'à ce qu'il arrive en butée contre les pieds et le rebord de la baignoire.

16

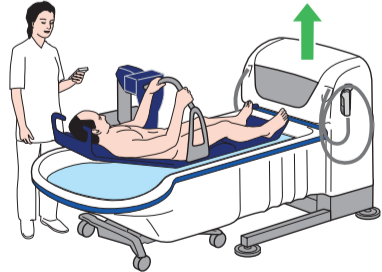


Ajuster le chariot élévateur d'hygiène à une hauteur ergonomique pour le personnel soignant. Soulever la baignoire de manière à ce que le brancard touche le fond de la baignoire.

17




Fixer le cale-pieds, si besoin. Donner le bain au patient.


Hydromassage (option)




Risque de coincement

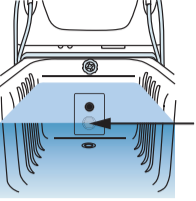


Installer le couvercle d'aspiration avant utilisation.

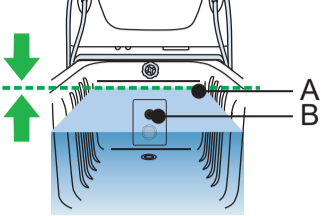


Remplir d'eau pour couvrir la sortie du système Hydromassage (A) et du capteur supérieur (B).

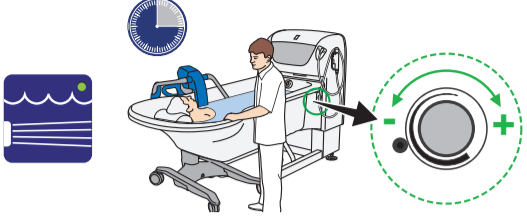

Appuyer sur le bouton du système Hydromassage. La durée de fonctionnement est de 15 minutes. Démarrer à faible intensité. Procéder au réglage si nécessaire.

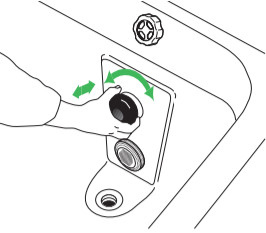


Ajuster la direction du jet d'eau.




Après le traitement, éteindre le système Hydromassage.


Hydrosound (option)




Ne doit jamais être utilisé par une femme enceinte.

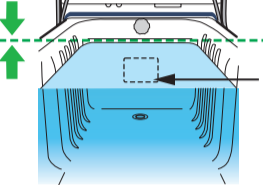


Remplir d'eau pour couvrir la plaque de transducteur du système Hydrosound. Ajouter le conditionneur d'eau Arjo Sound.




Risque de brûlures et de lésions auditives.




Ne pas toucher la plaque de transducteur et maintenir la tête du patient hors de l'eau.

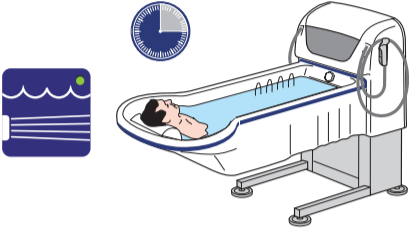

Appuyer sur le bouton du système Hydrosound. La durée de fonctionnement est de 15 minutes.

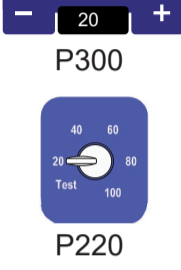


Ajuster l'intensité Hydrosound.



Après le traitement, éteindre le système Hydrosound.


Doucher le patient

18

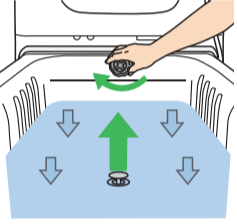


Ouvrir la bonde.

19

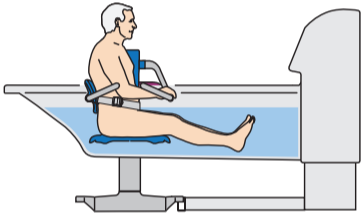


Relever le dossier. Laisser le patient reposer ses mains sur les accoudoirs.

20

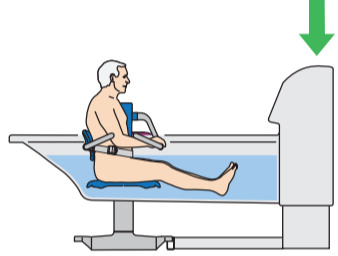


Abaissier la baignoire jusqu'en bas.

21

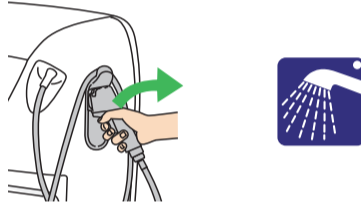


Prendre la douchette. Appuyer sur le bouton de la douche. Éloigner la douchette du patient.

22




Risque de brûlures




Appuyer sur la gâchette de la douchette. Vérifier la température de l'eau à main nue. Régler la température, s'il y a lieu.

23




Demander au patient de sentir la température de l'eau en mettant la main dans l'eau avant que le jet d'eau ne soit dirigé sur le patient. Régler la température, s'il y a lieu.

24



Doucher le patient.


25



Déverrouiller la gâchette de la douchette si le bouton de verrouillage est activé. Appuyer sur le bouton de la douche. Retourner la douchette.


Terminer le bain

26

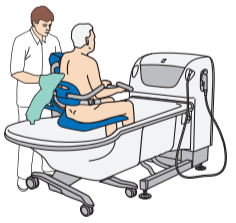


Sécher le patient.

27

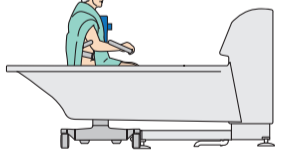


Garder le patient au chaud à l'aide de serviettes ou d'une robe de chambre.

28

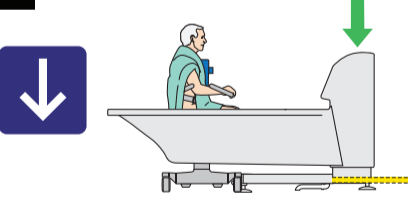


Abaissier la baignoire jusqu'en bas.

29

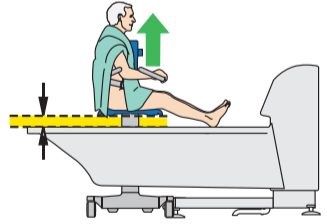


Soulever le fauteuil élévateur d'hygiène pour garantir un espacement suffisant entre le rebord de la baignoire et les parties génitales du patient.

30




Risque de pincement

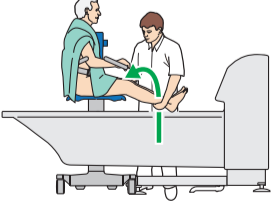


Aider le patient à faire passer ses jambes par-dessus le bord de la baignoire tout en faisant pivoter le fauteuil pour l'écartier de la baignoire.

31

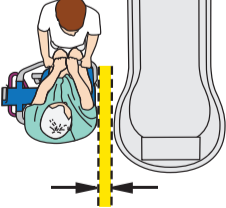


Vérifier qu'il y a suffisamment d'espace entre le côté de la baignoire et le fauteuil élévateur d'hygiène.

32



Abaissier le fauteuil élévateur d'hygiène. Sécher les autres parties mouillées.

33



Risque de contamination

Après chaque patient :

Nettoyer et désinfecter la baignoire conformément aux instructions du mode d'emploi ou du GRR de nettoyage et de désinfection.