




Aider le patient à prendre le bain

1





Placez le bouchon sur la bonde.

2



Risque de brûlures





Appuyez sur le bouton de remplissage. Contrôlez la température de l'eau avec la main avant de laisser le patient entrer dans la baignoire. Réglez la température, s'il y a lieu.

3



Risque de coincement



Positionnez le fauteuil élévateur d'hygiène près de l'extrémité de la baignoire. Levez le fauteuil élévateur d'hygiène et déplacez le patient au-dessus du bord de la baignoire.

4



Risque de coincement



Positionnez le fauteuil élévateur d'hygiène au centre de la baignoire et abaissez-le autant que possible.

5



Risque de blessure



Aidez le patient à prendre le bain. Ne laissez pas le patient sans surveillance.

6



Une fois le bain terminé, ouvrez la bonde de vidange et aidez le patient à s'asseoir.


7



Remettez le dossier en place contre le dos du patient. Relevez le fauteuil élévateur d'hygiène à la hauteur appropriée.

Aider le patient à se doucher

8






Appuyez sur le bouton Douche patient.

9





Décrochez la douchette et dirigez-la vers la baignoire. Appuyez sur la gâchette de la douchette.

10



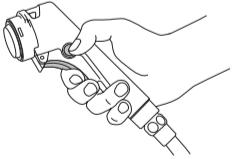
Risque de brûlures





Mettez la main dans l'eau pour évaluer la température. Réglez la température, s'il y a lieu. Aidez le patient à se doucher.

11




Appuyez sur la gâchette de la douchette et enfoncez le bouton de verrouillage situé sur le côté pour obtenir un débit d'eau constant.

12




Aidez le patient à se sécher.

13




Risque de chute




Levez le fauteuil élévateur d'hygiène et écartez-le de l'extrémité de la baignoire. Aidez le patient à passer ses jambes au-dessus du bord de la baignoire.

14




Risque de contamination



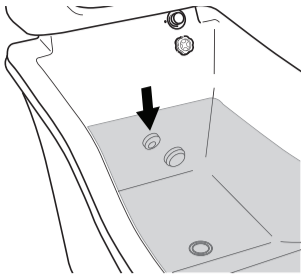

Après chaque patient : nettoyez et désinfectez la baignoire conformément aux instructions du mode d'emploi ou du GRR de nettoyage et de désinfection.

Hydromassage (option)

1




Risque de coincement



Remplir d'eau pour couvrir la sortie du système Hydromassage.

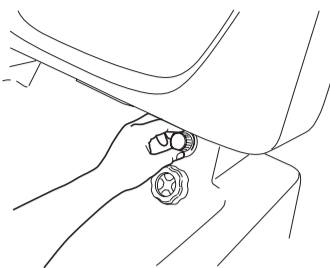

2



15 min



Appuyez sur le bouton du système Hydromassage. La durée de fonctionnement est de 15 minutes.

3




Réglez le débit de l'eau à l'aide du bouton de réglage de l'intensité. Commencez à une faible intensité en tournant le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit.

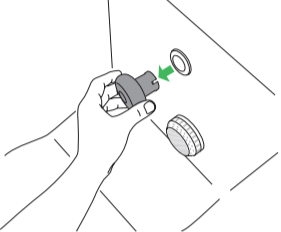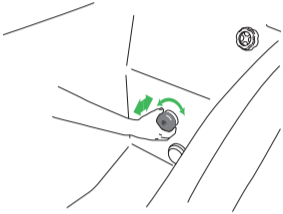4




Réglez la direction du jet d'eau en tournant la sortie. Tirez sur la buse réglable pour que le jet couvre une plus grande surface.

5




Une fois le traitement terminé, éteindre l'hydromassage.



Hydrosound (option)



Risque de blessures et brûlures. Ne pas utiliser pour une femme enceinte.




1




Remplissez la baignoire jusqu'au-dessus de la plaque de transducteur de l'Hydrosound.

2




Appuyez sur le bouton de conditionneur d'eau ArjoSound pendant le remplissage. Assurez-vous que le conditionneur se mélange dans l'eau.

3




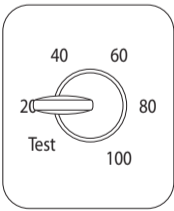
Vérifiez que le niveau d'eau recouvre le dessus de la plaque de transduction du système Hydrosound.

4




Appuyez sur le bouton du système Hydrosound. À la fin, attendez 15 minutes avant de pouvoir redémarrer le système Hydrosound.

5




Démarrez à faible intensité. Tournez dans le sens antihoraire pour augmenter le débit. Le voyant émet une lumière verte continue et un avertissement sonore se fait entendre lorsqu'un niveau actif est choisi.

6




Risque de lésions auditives. Maintenez la tête du patient hors de l'eau.



Aidez le patient à prendre le bain.

7



Aidez le patient à sortir de l'eau et aidez-le à se doucher abondamment.