

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για την αποφυγή βλάβης στα μάτια ή στο δέρμα χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός στα μάτια ή το δέρμα, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Διαβάζετε πάντα το Φύλλο δεδομένων ασφάλειας υλικού του απολυμαντικού.

Για την αποφυγή επιμόλυνσης, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες απολύμανσης που περιγράφονται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης.

Για την αποφυγή ερεθισμού των ματιών και του δέρματος, μην απολυμαίνετε ποτέ παρουσία του ασθενούς.

Υποχρεώσεις φροντιστή

Μεταξύ ασθενών

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το μπάνιο System 2000 πριν από κάθε χρήση.

Καθαρισμός και απολύμανση με τη μονάδα απολύμανσης (Σταθερό μπάνιο και σύστημα Hydrosound)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την απολύμανση του συστήματος Hydromassage αρχίστε από τη σελίδα 2.

Απομακρύνετε τα ορατά υπολείμματα

1. Ανυψώστε τη μπανιέρα σε βολική θέση εργασίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.
3. Ανοίξτε την αποστράγγιση.
4. Αποσυνδέστε και τοποθετήστε όλα τα παρελκόμενα στον πυθμένα της μπανιέρας.
5. Πλύντε και ξεπλύνετε τη μπανιέρα και τα παρελκόμενα με νερό για να απομακρύνετε τα ορατά υπολείμματα. Γυρίστε τα παρελκόμενα και ξεπλύνετε καλά.

Καθαρίστε

6. Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά.
7. Ανασηκώστε τη λαβή του σπρέι απολύμανσης.
8. Πιέστε το κουμπί απολύμανσης.
9. Ψεκάστε απολυμαντικό στη μπανιέρα μέχρι το ροόμετρο να υποδεικνύει τη σωστή τιμή ανάμιξης, σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης. Ρυθμίστε, όπως απαιτείται.
10. Ψεκάστε με απολυμαντικό την αποστράγγιση. Τρίψτε την αποστράγγιση με μια βούρτσα.
11. Κλείστε την αποστράγγιση.
12. Ψεκάστε απολυμαντικό σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της μπανιέρας και σε όλες τις πλευρές των παρελκομένων.
13. Ψεκάστε την έξοδο επιφανειακής υπερχειλίσης.
14. Πατήστε το κουμπί απολύμανσης για να το απενεργοποιήσετε.
15. Τρίψτε σχολαστικά τις επιφάνειες της μπανιέρας, τα χαλαρά μέρη και τα παρελκόμενα με μια μαλακή βούρτσα.
16. Ανοίξτε την αποστράγγιση.
17. Ξεπλύντε όλα τα μέρη πλήρως με άφθονο νερό σε θερμοκρασία 25 °C (77 °F).
18. Βυθίστε ένα πανί στο απολυμαντικό και σκουπίστε όλες τις υπόλοιπες περιοχές επαφής: το εξωτερικό της μπανιέρας, τους μεταλλικούς αισθητήριους μοχλούς και το χειριστήριο ελέγχου.
19. Βρέξτε ένα καινούριο πανί με νερό και αφαιρέστε το απολυμαντικό. Ξεβγάξτε περιστασιακά το πανί με τρεχούμενο νερό.

Απολύμανση

20. Ψεκάστε με απολυμαντικό την αποστράγγιση.
21. Κλείστε την αποστράγγιση.
22. Ψεκάστε απολυμαντικό σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της μπανιέρας και σε όλες τις πλευρές των παρελκομένων.
23. **Επιτρέψτε τον κατάλληλο χρόνο επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του απολυμαντικού.**
24. Πατήστε το κουμπί απολύμανσης για να ολοκληρώσετε τον κύκλο απολύμανσης.
Αυτόματη απολύμανση μόνο:
Αν δεν έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος απολύμανσης οι άλλες λειτουργίες παραμένουν απενεργοποιημένες για τουλάχιστον 2 λεπτά.
25. Τοποθετήστε τη λαβή σπρέι απολύμανσης στη θέση της.
26. Ανοίξτε την αποστράγγιση.
27. Πατήστε το κουμπί για το ντους.
28. Ξεπλύντε όλα τα μέρη πλήρως με νερό σε θερμοκρασία 25 °C (77 °F).
29. Βυθίστε ένα πανί στο απολυμαντικό και σκουπίστε όλες τις υπόλοιπες περιοχές επαφής: το εξωτερικό της μπανιέρας, τους μεταλλικούς αισθητήριους μοχλούς και το χειριστήριο ελέγχου.
30. **Επιτρέψτε τον κατάλληλο χρόνο επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του απολυμαντικού.**
31. Βρέξτε ένα καινούριο πανί με νερό και αφαιρέστε το απολυμαντικό. Ξεβγάξτε περιστασιακά το πανί με τρεχούμενο νερό.
32. Αφήστε να στεγνώσει φυσικά.

Καθαρισμός και απολύμανση με φιάλη ψεκασμού

Απομακρύνετε τα ορατά υπολείμματα

- 1. Αнуψώστε τη μπανιέρα σε βολική θέση εργασίας.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.
- 3. Ανοίξτε την αποστράγγιση.
- 4. Αποσυνδέστε και τοποθετήστε όλα τα παρελκόμενα στον πυθμένα της μπανιέρας.
- 5. Πλύντε και ξεπλύνετε τη μπανιέρα και τα παρελκόμενα με νερό για να απομακρύνετε τα ορατά υπολείμματα. Γυρίστε τα παρελκόμενα και ξεπλύνετε καλά.

Καθαρίστε

- 6. Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά.
- 7. Ψεκάστε με απολυμαντικό την αποστράγγιση. Τρίψτε την αποστράγγιση με μια βούρτσα.
- 8. Κλείστε την αποστράγγιση.
- 9. Ψεκάστε απολυμαντικό σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της μπανιέρας και σε όλες τις πλευρές των παρελκομένων.
- 10. Ψεκάστε την έξοδο επιφανειακής υπερχειλίσης.
- 11. Τρίψτε σχολαστικά τις επιφάνειες της μπανιέρας, τα χαλαρά μέρη και τα παρελκόμενα με μια μαλακή βούρτσα.
- 12. Ανοίξτε την αποστράγγιση.
- 13. Ξεπλύντε όλα τα μέρη με άφθονο νερό σε θερμοκρασία 25 °C (77 °F).
- 14. Βυθίστε ένα πανί στο απολυμαντικό και σκουπίστε όλες τις υπόλοιπες περιοχές επαφής: το εξωτερικό της μπανιέρας, τους μεταλλικούς αισθητήριους μοχλούς και το χειριστήριο ελέγχου.

- 15. Βρέξτε ένα καινούριο πανί με νερό και αφαιρέστε το απολυμαντικό. Ξεβγάξτε περιστασιακά το πανί με τρεχούμενο νερό.

Απολύμανση

- 16. Χρησιμοποιήστε φιάλη ψεκασμού και ψεκάστε απολυμαντικό στην αποστράγγιση.
- 17. Κλείστε την αποστράγγιση.
- 18. Ψεκάστε απολυμαντικό σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της μπανιέρας και σε όλες τις πλευρές των παρελκομένων.
- 19. **Επιτρέψτε τον κατάλληλο χρόνο επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του απολυμαντικού.**
- 20. Ανοίξτε την αποστράγγιση.
- 21. Πατήστε το κουμπί για το ντους.
- 22. Ξεπλύντε όλα τα μέρη πλήρως με νερό σε θερμοκρασία 25 °C (77 °F).
- 23. Βυθίστε ένα πανί στο απολυμαντικό και σκουπίστε όλες τις υπόλοιπες περιοχές επαφής: το εξωτερικό της μπανιέρας, τους μεταλλικούς αισθητήριους μοχλούς και το χειριστήριο ελέγχου.
- 24. **Επιτρέψτε τον κατάλληλο χρόνο επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του απολυμαντικού.**
- 25. Βρέξτε ένα καινούριο πανί με νερό και αφαιρέστε το απολυμαντικό. Ξεβγάξτε περιστασιακά το πανί με τρεχούμενο νερό.
- 26. Αφήστε να στεγνώσει φυσικά.

Καθαρισμός και απολύμανση του συστήματος Hydromassage

Με αυτόματη απολύμανση

- 1. Αнуψώστε τη μπανιέρα σε βολική θέση εργασίας.
- 2. Κλείστε την αποστράγγιση.
- 3. Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου αναρρόφησης. Καθαρίστε ξεχωριστά το φίλτρο εισόδου αναρρόφησης.
- 4. Πατήστε το κουμπί απολύμανσης για να ξεκινήσει ο κύκλος απολύμανσης. Το απολυμαντικό εξέρχεται από το ακροφύσιο του συστήματος Hydromassage. Ο κύκλος απολύμανσης ολοκληρώνεται με την έκπλυση με νερό του συστήματος Hydromassage.
- 5. Ψεκάστε απολυμαντικό στην έξοδο επιφανειακής υπερχειλίσης.
- 6. Συνεχίστε με τις υπόλοιπες οδηγίες απολύμανσης σύμφωνα με την ενότητα *Καθαρισμός και απολύμανση με μονάδα απολύμανσης (Σταθερό μπάνιο και σύστημα Hydrosound)*, στη σελίδα 1.
- 7. **Επιτρέψτε τον κατάλληλο χρόνο επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του απολυμαντικού.**
- 8. Πιέστε το πλήκτρο ντους και ξεβγάλτε την έξοδο επιφανειακής υπερχειλίσης.
- 9. Αφού ολοκληρωθεί η απολύμανση, συνδέστε το φίλτρο εισόδου αναρρόφησης με τις βίδες και σφίξτε προσεκτικά.

Χωρίς αυτόματη απολύμανση

- 1. Αнуψώστε τη μπανιέρα σε βολική θέση εργασίας.
- 2. Ανοίξτε την αποστράγγιση.
- 3. Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου αναρρόφησης. Καθαρίστε ξεχωριστά το φίλτρο εισόδου αναρρόφησης.
- 4. Τραβήξτε το περιστροφικό ακροφύσιο του συστήματος Hydromassage εάν πρόκειται να συνδεθεί σωλήνας θεραπείας.
- 5. Εισάγετε τον σωλήνα θεραπείας, αν υπάρχει, στην έξοδο του συστήματος Hydromassage.
- 6. Ψεκάστε απολυμαντικό στην είσοδο αναρρόφησης μέχρι να εξέλθει απολυμαντικό από το ακροφύσιο/τον σωλήνα θεραπείας του συστήματος Hydromassage.
- 7. Ψεκάστε απολυμαντικό στην έξοδο επιφανειακής υπερχειλίσης.
- 8. **Επιτρέψτε τον κατάλληλο χρόνο επαφής σύμφωνα με τις οδηγίες του απολυμαντικού.**
- 9. Πατήστε το κουμπί απολύμανσης για να το απενεργοποιήσετε.
- 10. Πιέστε το πλήκτρο ντους και συνδέστε τη λαβή ντους στην είσοδο αναρρόφησης.
- 11. Στρέψτε τον μοχλό του συστήματος Hydromassage στην υψηλότερη ένταση.
- 12. Πιέστε τη σκανδάλη και ξεβγάλτε μέχρι το νερό να εξέλθει **καθαρό** από το ακροφύσιο/ τον σωλήνα θεραπείας του συστήματος Hydromassage.
- 13. Αφαιρέστε τον σωλήνα θεραπείας, εάν υπάρχει.
- 14. Τοποθετήστε ξανά το ακροφύσιο στην έξοδο του συστήματος Hydromassage.
- 15. Ξεπλύνετε την έξοδο επιφανειακής υπερχειλίσης με νερό.
- 16. Συνεχίστε με τις υπόλοιπες οδηγίες απολύμανσης σύμφωνα με την ενότητα *Καθαρισμός και απολύμανση με μονάδα απολύμανσης (Σταθερό μπάνιο και σύστημα Hydrosound)*, στη σελίδα 1.
- 17. Αφού ολοκληρωθεί η απολύμανση, συνδέστε το φίλτρο εισόδου αναρρόφησης με τις βίδες και σφίξτε προσεκτικά.