

# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



## AVERTISSEMENT



Pour éviter toute lésion oculaire ou cutanée, toujours utiliser des lunettes et des gants de protection. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation des yeux ou de la peau, contacter un médecin. Lire attentivement la fiche de données de sécurité du désinfectant.

Pour éviter les contaminations croisées, toujours suivre les instructions de désinfection du mode d'emploi.

Pour éviter des irritations cutanées ou oculaires, ne jamais désinfecter en présence d'un patient.

## Obligations du personnel soignant

### Entre deux patients

Nettoyer et désinfecter la baignoire System 2000 avant chaque utilisation.

## Nettoyer et désinfecter avec l'unité de désinfection (baignoire simple et système Hydrosound)

### REMARQUE

Pour la désinfection du système Hydromassage, commencer à la page 2.

### Éliminer les résidus visibles

1. Faire monter la baignoire à une position de travail confortable.
2. Vérifier que toutes les fonctions sont coupées.
3. Ouvrir la bonde.
4. Détacher et placer les accessoires au fond de la baignoire.
5. Arroser et rincer à l'eau la baignoire et les accessoires pour éliminer les résidus visibles. Retourner les accessoires et rincer de nouveau.

### Nettoyer

6. Porter des gants et des lunettes de protection.
7. Soulever la douchette de désinfection.
8. Appuyer sur le bouton de désinfection.
9. Vaporiser du désinfectant dans la baignoire jusqu'à ce que le débitmètre indique que le dosage du mélange est correct conformément au mode d'emploi. Procéder au réglage si nécessaire.
10. Pulvériser le produit désinfectant dans la bonde. Utiliser un goupillon pour nettoyer l'évacuation.
11. Placer le bouchon sur la bonde.
12. Vaporiser du désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire et sur tous les côtés des accessoires.
13. Vaporiser à l'intérieur du trop-plein.
14. Appuyer sur le bouton de désinfection afin d'arrêter la fonction de désinfection.
15. Bien nettoyer les surfaces de la baignoire, les pièces détachables et les accessoires au moyen d'une brosse à poils doux.
16. Ouvrir la bonde.
17. Rincer abondamment toutes les pièces à l'eau à une température de 25 °C (77 °F).
18. Imbiber un chiffon de désinfectant et essuyer toutes les autres zones de contact : extérieur de la baignoire, capteurs de détection métalliques et télécommande.

19. Imbiber un nouveau chiffon d'eau et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.

### Désinfection

20. Pulvériser le produit désinfectant dans la bonde.
21. Placer le bouchon sur la bonde.
22. Vaporiser du désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire et sur tous les côtés des accessoires.
23. **Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.**
24. Appuyer sur le bouton de désinfection pour mettre fin au cycle de désinfection.  
**Désinfection automatique uniquement :**  
Si la durée de désinfection prédéfinie n'est pas terminée, d'autres fonctions seront désactivées pendant au moins 2 minutes.
25. Replacer la douchette de désinfection dans le logement prévu.
26. Ouvrir la bonde.
27. Appuyer sur le bouton pour activer la douche.
28. Rincer toutes les pièces à l'eau à une température de 25 °C (77 °F).
29. Imbiber un chiffon de désinfectant et essuyer toutes les autres zones de contact : extérieur de la baignoire, capteurs de détection métalliques et télécommande.
30. **Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.**
31. Imbiber un nouveau chiffon d'eau et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.
32. Laisser sécher à l'air libre.

# Nettoyer et désinfecter avec un flacon vaporisateur

## Éliminer les résidus visibles

1. Faire monter la baignoire à une position de travail confortable.
2. Vérifier que toutes les fonctions sont coupées.
3. Ouvrir la bonde.
4. Détacher et placer les accessoires au fond de la baignoire.
5. Arroser et rincer à l'eau la baignoire et les accessoires pour éliminer les résidus visibles. Retourner les accessoires et rincer de nouveau.

## Nettoyer

6. Porter des gants et des lunettes de protection.
7. Pulvériser le produit désinfectant dans la bonde. Utiliser un goupillon pour nettoyer l'évacuation.
8. Placer le bouchon sur la bonde.
9. Vaporiser du désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire et sur tous les côtés des accessoires.
10. Vaporiser à l'intérieur du trop-plein.
11. Bien nettoyer les surfaces de la baignoire, les pièces détachables et les accessoires au moyen d'une brosse à poils doux.
12. Ouvrir la bonde.
13. Rincer abondamment toutes les pièces à l'eau à une température de 25 °C (77 °F).

14. Imbiber un chiffon de désinfectant et essuyer toutes les autres zones de contact : extérieur de la baignoire, capteurs de détection métalliques et télécommande.
15. Imbiber un nouveau chiffon d'eau et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.

## Désinfection

16. Pulvériser du désinfectant dans la bonde à l'aide d'un flacon vaporisateur.
17. Placer le bouchon sur la bonde.
18. Vaporiser du désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire et sur tous les côtés des accessoires.
19. **Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.**
20. Ouvrir la bonde.
21. Appuyer sur le bouton pour activer la douche.
22. Rincer toutes les pièces à l'eau à une température de 25 °C (77 °F).
23. Imbiber un chiffon de désinfectant et essuyer toutes les autres zones de contact : extérieur de la baignoire, capteurs de détection métalliques et télécommande.
24. **Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.**
25. Imbiber un nouveau chiffon d'eau et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.
26. Laisser sécher à l'air libre.

# Nettoyer et désinfecter le système Hydromassage

## Avec désinfection automatique

1. Faire monter la baignoire à une position de travail confortable.
2. Placer le bouchon sur la bonde.
3. Dévisser les vis et retirer la grille d'aspiration. Nettoyer la grille d'aspiration séparément.
4. Appuyer sur le bouton de désinfection pour déclencher le cycle de désinfection. Le désinfectant sort de la buse du système Hydromassage. Le cycle de désinfection se termine par le rinçage du système Hydromassage avec de l'eau.
5. Vaporiser le désinfectant dans le trop-plein.
6. Continuer de suivre les instructions de désinfection restantes conformément à la section *Nettoyer et désinfecter avec l'unité de désinfection (baignoire simple et système Hydrosound)*, à la page 1.
7. **Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.**
8. Appuyer sur le bouton Douche et rincer le trop-plein en surface.
9. Une fois la désinfection terminée, remettre la grille d'aspiration en place avec les vis et les serrer sans forcer.

## Sans désinfection automatique

1. Faire monter la baignoire à une position de travail confortable.
2. Ouvrir la bonde.
3. Dévisser les vis et retirer la grille d'aspiration. Nettoyer la grille d'aspiration séparément.
4. Si un tuyau de traitement doit être raccordé, retirer la buse tournante du système Hydromassage.
5. Insérer le tuyau de traitement, le cas échéant, dans la sortie du système Hydromassage.
6. Vaporiser le désinfectant dans l'entrée de l'aspiration jusqu'à ce que le désinfectant sorte de la buse du système Hydromassage/du tuyau de traitement.
7. Vaporiser le désinfectant dans le trop-plein.
8. **Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.**
9. Appuyer sur le bouton de désinfection afin d'arrêter la fonction de désinfection.
10. Appuyer sur le bouton Douche et raccorder la douchette à l'aspiration.
11. Tourner le bouton du système Hydromassage à sa plus haute intensité.
12. Appuyer sur la gâchette et rincer jusqu'à ce que de l'eau **propre** s'écoule de la buse du système Hydromassage/du tuyau de traitement.
13. Retirer le tuyau de traitement, le cas échéant.
14. Remettre la buse dans la sortie du système Hydromassage.
15. Rincer la sortie de trop-plein de surface avec de l'eau.
16. Continuer de suivre les instructions de désinfection restantes conformément à la section *Nettoyer et désinfecter avec l'unité de désinfection (baignoire simple et système Hydrosound)*, à la page 1.
17. Une fois la désinfection terminée, remettre la grille d'aspiration en place avec les vis et les serrer sans forcer.