



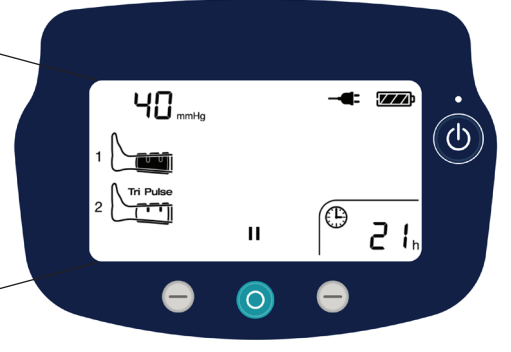

Flowtron ACS900

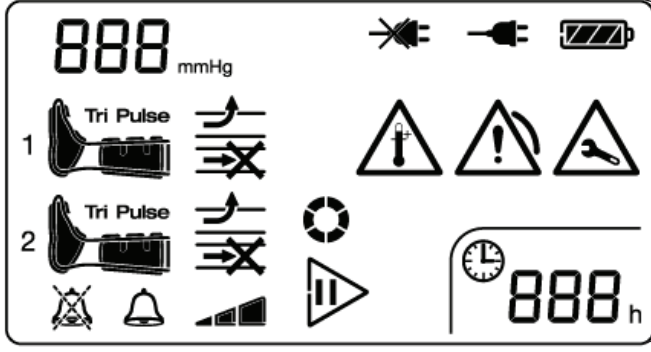

إشارات التحذير والإنذار

تم الكشف عن حالة تستدعي الإنذار قد تتسبب في حدوث انقطاع في العلاج.

ضغط منخفض أو حدوث تسرب باللبادة.

التواء أو انسداد مجموعة الأنابيب.

ارتفاع درجة الحرارة.

تم الكشف عن خطأ في الأجهزة أو مطلوب صيانة دورية.

انتظار - مؤشر التهيئة

مؤشر بدء العلاج

يتم عرضه في وضع الاستعداد عند توصيل لبادة واحدة على الأقل.

مؤشر إيقاف العلاج

يتم عرضه في وضع التشغيل.

مؤشرات طاقة التيار الكهربائي

المضخة موصلة بالتيار الكهربائي.

المضخة غير موصلة بالتيار الكهربائي.

مؤشر البطارية

البطارية فارغة

البطارية 1/4 مشحونة

البطارية 1/2 مشحونة

البطارية 3/4 مشحونة

البطارية مشحونة بالكامل

مؤشر وقت التشغيل للمريض

زر الطاقة ومؤشر التيار الكهربائي

اضغط مع الاستمرار لوضع الاستعداد، يتم تشغيل مؤشر التيار الكهربائي.

اضغط مع الاستمرار لإيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل مؤشر التيار الكهربائي.

زر التحكم الأوسط

اضغط عليه لبدء العلاج.

اضغط عليه مع الاستمرار لإيقاف العلاج.

زر التحكم الأيسر

اضغط عليه لكتم صوت الإنذار المسموع.

اضغط مع الاستمرار لإعدادات مستوى صوت الإنذار.

زر التحكم الأيمن

اضغط مع الاستمرار لإدخال وضع إعادة تعيين وقت التشغيل للمريض.

888 mmHg مؤشر ضغط اللبادة

مؤشر نوع اللبادة والنفخ

موصلة ولم يتم نفخها
موصلة ولم يتم نفخها

القدم

لبادة الساق أو الساق والفخذ الموحدة

لبادة ساق أو ساق وفخذ متسلسلة (Tri Pulse)

أرقام موصلات مجموعة الأنابيب

1
2

مؤشر كتّم صوت الإنذار المسموع

مؤشر وضع الإنذار المسموع

أثناء الإنذار: يظهر أنه يمكن كتّم صوت الإنذار.

مؤشر مستوى الصوت