


Flowtron ACS900



2797

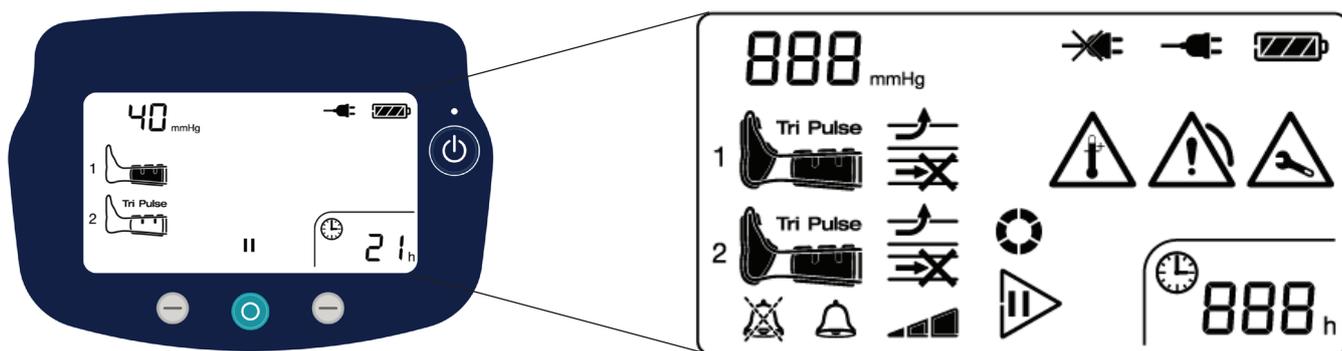

Bouton et voyant d'alimentation

Presser et maintenir le bouton enfoncé pour passer en mode Veille, le voyant d'alimentation s'allume.
Presser et maintenir le bouton enfoncé pour éteindre l'appareil, le voyant d'alimentation s'éteint.



Bouton de commande central

Appuyer sur ce bouton pour démarrer le traitement.
Presser et maintenir le bouton enfoncé pour arrêter le traitement.



Bouton de commande gauche

Appuyer sur ce bouton pour couper l'alarme sonore.
Presser et maintenir le bouton enfoncé pour régler le volume de l'alarme.



Bouton de commande droit

Presser et maintenir le bouton enfoncé pour passer en mode Réinitialisation du compteur patient.

888 mmHg

Voyant de pression de l'attelle



Voyants de type et de gonflage de l'attelle

Raccordée mais pas gonflée



Pied



Mollet (ou mollet/cuisse) uniforme



Mollet (ou mollet/cuisse) séquentiel (Tri Pulse)

1
2

Nombre de connecteurs de tubulures



Voyant d'alarme sonore désactivée



Voyant d'état de l'alarme sonore

Pendant une alarme : indique que l'alarme peut être coupée.



Voyant de volume



Voyants d'avertissement et d'alarme

Alarme détectée susceptible d'entraîner une interruption pendant le traitement.



Pression faible ou fuite dans l'attelle.



Tubulure emmêlée ou bloquée.



Température élevée.



Défaillance matérielle détectée ou entretien périodique nécessaire.



Voyant d'attente/initiaisation



Voyant de démarrage du traitement

Affiché en mode Veille lorsqu'au moins une attelle est connectée.



Voyant d'arrêt du traitement

Affiché en mode Fonctionnement.

Voyants d'alimentation



Pompe raccordée à l'alimentation secteur.



Pompe NON raccordée à l'alimentation secteur.



Voyant de la batterie



Batterie vide



Batterie remplie au quart



Batterie à moitié pleine



Batterie remplie aux trois quarts



Batterie pleine



Voyant du compteur patient