


Flowtron ACS900

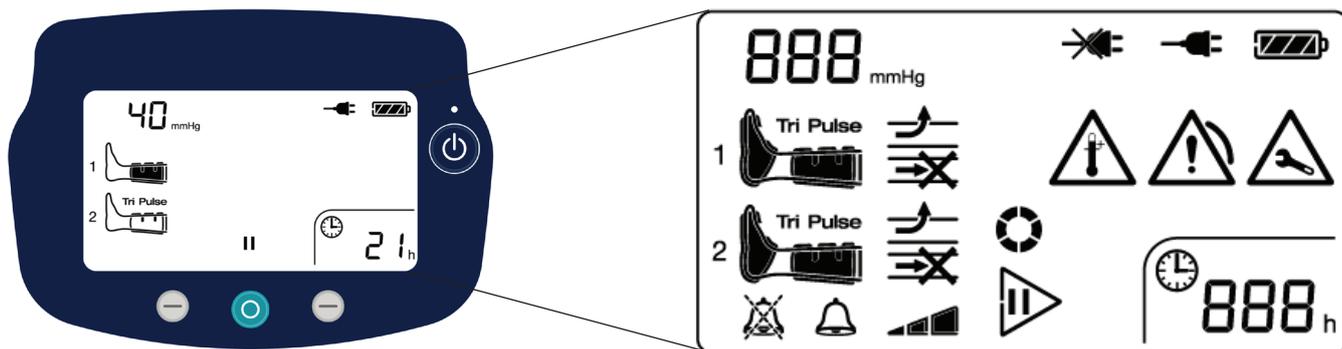

Botón de encendido e indicador de red

Manténgalo pulsado para acceder al modo de espera. Se encenderá el indicador de alimentación de red. Manténgalo pulsado para desconectar el dispositivo. Se apagará el indicador de alimentación de red.



Botón de control central

Púselo para iniciar el tratamiento. Manténgalo pulsado para detener el tratamiento.



Botón de control izquierdo

Púselo para silenciar la alarma sonora. Manténgalo pulsado para acceder al ajuste de volumen de la alarma.



Botón de control derecho

Manténgalo pulsado para acceder al modo de reinicio del tiempo de funcionamiento del paciente.

888 mmHg

Indicador de presión de la prenda



Indicadores de tipo de prenda e inflado

Conectada sin inflar Conectada inflada



Pies



Pantorrilla (o pantorrilla y muslo) uniforme



Pantorrilla (o pantorrilla y muslo) secuencial (Tri Pulse)

1
2

Números de los conectores del juego de tubos



Indicador de alarma sonora silenciada



Indicador de estado de la alarma sonora

Durante la alarma: indica que la alarma puede silenciarse.



Indicador de volumen



Indicadores de advertencias y alarmas

Se ha detectado una alarma que podría interrumpir la terapia.



Presión baja o fuga en la prenda.



Juego de tubos doblado o bloqueado.



Temperatura alta.



Se ha detectado un error de hardware o es necesario realizar el mantenimiento periódico.



Indicador de espera/inicialización



Indicador de inicio del tratamiento

Se muestra en el modo de espera cuando hay al menos una prenda conectada.



Indicador de parada del tratamiento

Se muestra en el modo de funcionamiento.

Indicadores de alimentación de red



La bomba está conectada a la red eléctrica.



La bomba NO está conectada a la red eléctrica.



Indicador de batería



Batería descargada



Batería con 1/4 de carga



Batería con 1/2 carga



Batería con 3/4 de carga



Batería cargada



Indicador de tiempo de funcionamiento del paciente