


Flowtron ACS900

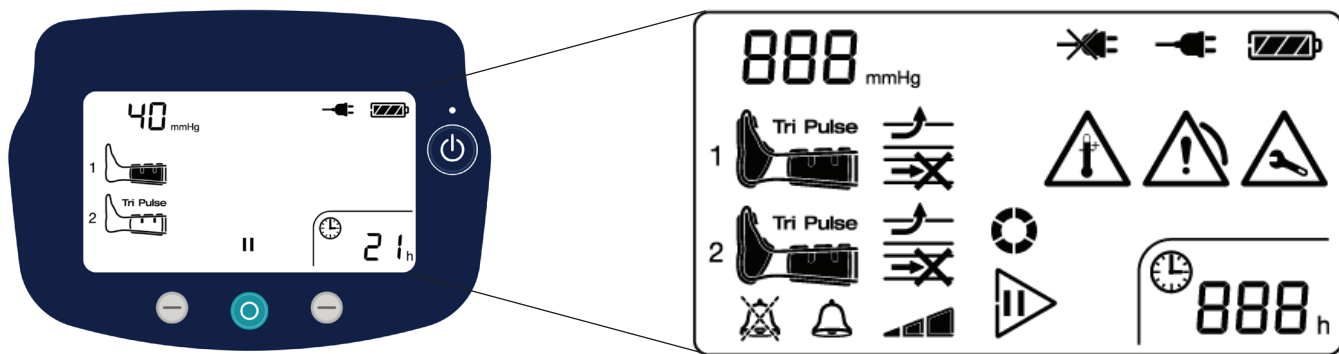

Virtapainike ja virran merkkivalo

Siirry valmiustilaan painamalla pitkään, virran merkkivalo syttyy. Sammuta painamalla pitkään, virran merkkivalo sammuu.



Keskimmäinen ohjauspainike

Aloita hoito painamalla. Lopeta hoito painamalla pitkään.



Vasen ohjauspainike

Mykistä äänihälytys painamalla. Avaa hälytysäänenvoimakkuuden asetukset painamalla pitkään.



Oikea ohjauspainike

Siirry Potilaan käyttölaskimen nollaustilaan painamalla pitkään.

888 mmHg

Mansetin paineilmaisin



Mansettityyppi ja täytön ilmaisimet

Kytetty, Kytetty,
täyttämätön täytetty



Jalkaterä



Yhtenäinen pohje (tai pohje ja reisi)



Jaksottainen (Tri Pulse) pohje (tai pohje ja reisi)

1
2

Letkusarjan liittimien numerot



Äänihälytyksen mykistystyksen ilmaisin



Äänihälytyksen tilailmaisain

Hälytyksen aikana: ilmaisee, että hälytys voidaan mykistää.



Äänenvoimakkuusilmaisain



Varoitus- ja hälytyskuvakkeet

Havaittu hälytys, joka voi aiheuttaa hoidon keskeytymisen.



Alhainen paine tai mansetti vuotaa.



Letkusarja mutkalla tai tukossa.



Korkea lämpötila.



Laitteistovika havaittu tai määräaikaishuolto vaaditaan.



Odota - alustetaan ilmaisinta



Käynnistä hoito -ilmaisain

Näkyä valmiustilassa, kun vähintään yksi mansetti on kytketty.



Lopeta hoito -ilmaisain

Näkyä käyttötilassa.

Virransyötön ilmaisimet



Pumppu on kytketty virtalähteeseen.



Pumppua EI ole kytketty virtalähteeseen.



Paristojen varaustilan näyttö



Akku tyhjä



Akku ¼ täysi



Akku ½ täysi



Akku ¾ täysi



Akku täynnä



Potilaskäyttölaskimen ilmaisin