


Flowtron ACS900

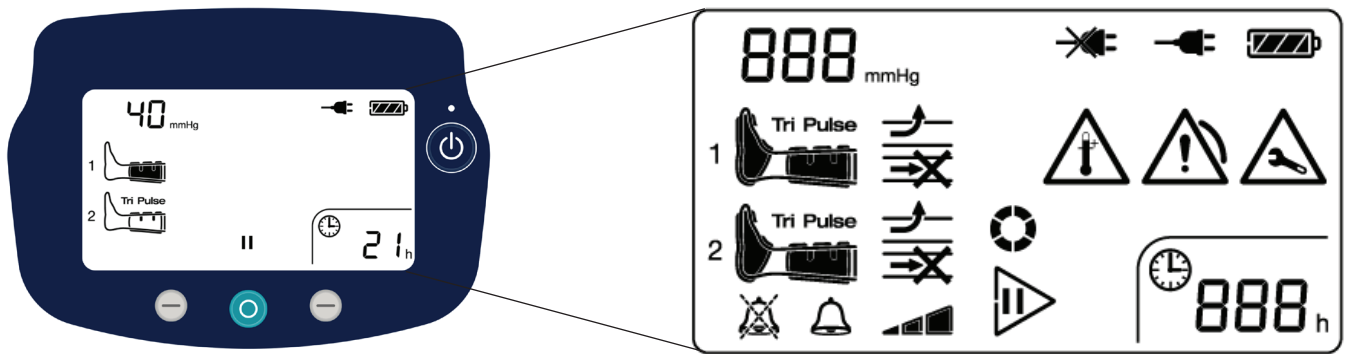

På/av-knapp og strømindikator

Hold inne for standby-modus, strømindikatoren tennes. Hold inne for å slå av, strømindikatoren slukkes.



Midtre betjeningsknapp

Trykk for å starte behandlingen. Hold inne for å stoppe behandlingen.



Venstre betjeningsknapp

Trykk for å dempe en lydalarm. Hold inne for å endre innstillinger for alarmvolum.



Høyre betjeningsknapp

Hold inne for å åpne modus for tilbakestilling av pasientens driftstimer.

888 mmHg

Indikator for mansjettrykk



Indikatorer for mansjettype og oppblåsing

Tilkoblet, ikke oppblåst Tilkoblet og oppblåst



Fot



Ensartet legg (eller legg og lår)



Sekvensiell (Tri Pulse) legg (eller legg og lår)

1
2

Koblingsnummer slangesett



Indikator for dempet lydalarm



Statusindikator for lydalarm

Under en alarm: Indikerer at alarmen kan dempes.



Volumindikator

Advarsler og alarmindikatorer



Det er registrert en alarm som kan føre til avbrudd i behandlingen.



Lavt trykk eller mansjettlekkasje.



Knekket eller blokkert slangesett.



Høy temperatur.



Maskinvarefeil eller behov for periodisk service.



Vent – initialiserer indikator



Start behandling-indikator

Vises i standby hvis minst én mansjett er tilkoblet.



Stopp behandling-indikator

Vises i driftsmodus.

Nettstrømindikatorer



Pumpen er koblet til strømnettet.



Pumpen er IKKE koblet til strømnettet.



Batteriindikator



Tomt batteri



1/4 fullt batteri



Halvfullt batteri



3/4 fullt batteri



Fullt batteri



Indikasjon av pasientens driftstimer