


# Flowtron ACS900



CE  
2797

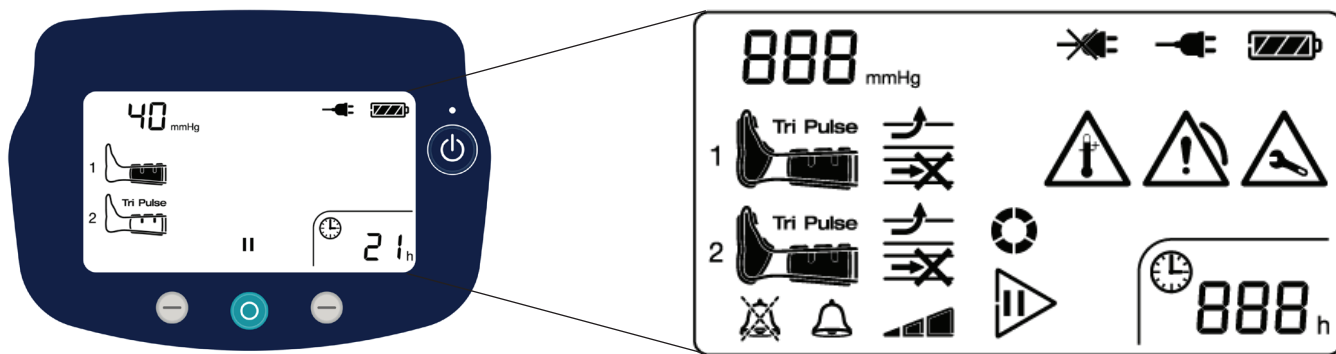

## Botão de ligar/desligar e indicador de eletricidade

Prima continuamente para aceder ao modo Em espera; o indicador de eletricidade acende-se. Prima continuamente para desligar; o indicador de eletricidade apaga-se.



## Botão de Comando Central

Prima para iniciar a terapia. Prima continuamente para interromper a terapia.



## Botão de Comando Esquerdo

Prima para silenciar o alarme sonoro. Prima continuamente para aceder às Configurações de Volume do Alarme Sonoro.



## Botão de Comando Direito

Prima continuamente para aceder ao modo Repor Tempo de Funcionamento do Paciente.

888 mmHg

## Indicador de pressão do acessório



## Indicadores de tipo e enchimento do acessório

Ligado e não insuflado



Ligado e insuflado



Pés



Uniforme para a perna (ou perna e coxa)



Sequencial (Tri Pulse) para a perna (ou perna e coxa)

1  
2

## Números do conjunto de tubos



## Indicador de alarme sonoro silenciado



## Indicador de estado do alarme sonoro

Durante o alarme: indica que o alarme pode ser silenciado.



## Indicador do volume



## Indicações de aviso e de alarme

Foi detetado um alarme que pode causar uma interrupção da terapia.



Pressão baixa ou fuga no acessório.



Conjunto de tubos dobrado ou bloqueado.



Temperatura Elevada.



Foi detetada uma falha no hardware ou é necessária manutenção periódica.



## Aguardar – indicador de inicialização



## Indicador de iniciar a terapia

Apresentado no modo Em espera quando pelo menos um acessório está ligado.



## Indicador de parar a terapia

Apresentado no modo Em funcionamento.

## Indicadores de energia elétrica



Bomba ligada à fonte de alimentação elétrica.



Bomba NÃO ligada à fonte de alimentação elétrica.



## Indicador da bateria



Bateria vazia



Bateria 1/4 cheia



Bateria 1/2 cheia



Bateria 3/4 cheia



Bateria cheia



## Indicador do tempo de funcionamento do paciente