


Flowtron ACS900



CE
2797

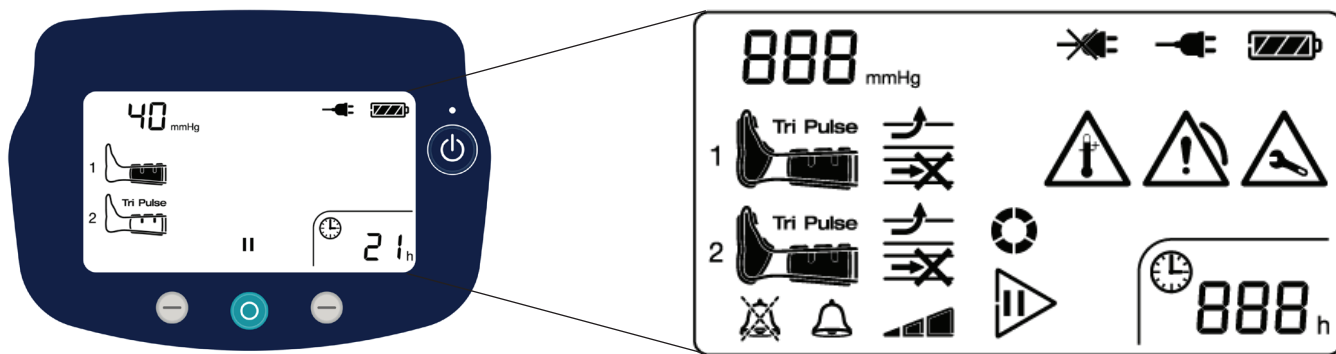

Кнопка питания и индикатор питания

Нажмите и удерживайте для перехода в режим ожидания. Индикатор питания загорится. Нажмите и удерживайте для отключения. Индикатор питания погаснет.



Средняя кнопка управления

Нажмите для запуска сеанса терапии. Нажмите и удерживайте для остановки сеанса терапии.



Левая кнопка управления

Нажмите, чтобы отключить звуковой сигнал тревоги. Нажмите и удерживайте для перехода к настройкам громкости сигнала тревоги.



Правая кнопка управления

Нажмите и удерживайте для входа в режим сброса таймера использования пациентом.

888 mmHg

Индикатор давления в манжете



Индикатор типа манжеты и индикатор накачивания

Подключена, не накачана Подключена, накачана



Ножная
Для равномерной компрессии на голень (или голень и бедро)



Для секвенциальной компрессии на голень (Tri Pulse) (или голень и бедро)

1
2

Номера разъемов трубки



Индикатор отключения звукового сигнала тревоги



Индикатор состояния звукового сигнала тревоги

При сигнале тревоги: показывает, что звук сигнала тревоги можно отключить.



Индикатор громкости

Индикация сигналов тревоги и предупреждений



Обнаружена неисправность, которая может прервать сеанс терапии.



Низкое давление или нарушение герметичности манжеты.



Трубка перекручена или закупорена.



Высокая температура.



Обнаружена неисправность аппаратуры или требуется проведение регулярного технического обслуживания.



Ожидание — инициализация индикатора



Индикатор начала сеанса терапии

Отображается в режиме ожидания, если подключена хотя бы одна манжета.



Индикатор остановки сеанса терапии

Отображается в рабочем режиме.

Индикаторы подключения к электросети



Насос подключен к электрической сети.



Насос НЕ подключен к электрической сети.



Индикатор заряда аккумулятора



Аккумулятор разряжен



Аккумулятор заряжен на 1/4



Аккумулятор заряжен на 1/2



Аккумулятор заряжен на 3/4



Аккумулятор заряжен полностью

888 h

Индикатор таймера использования пациентом