


Flowtron ACS900



CE
2797

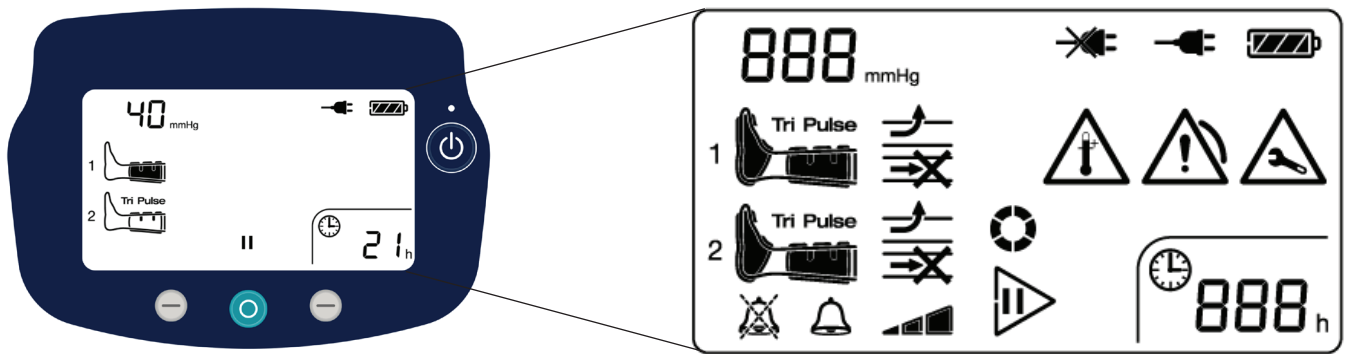

Strömknapp och nätspänningsindikator

Håll intryckt för standbyläge, nätspänningsindikatorn slås på. Håll intryckt för att stänga av, nätspänningsindikatorn stängs av.



Mittstyrknapp

Tryck för att starta behandlingen. Håll intryckt för att stoppa behandlingen.



Vänster styrknapp

Tryck för att stänga av larmsignalen. Håll intryckt för larmvolyminställningar.



Höger styrknapp

Håll intryckt för att gå in i läget för återställning av behandlingstid.

888 mmHg

Indikator för manschettryck



Indikatorer för manschettyp och uppblåsning

Ansluten ej uppblåst Ansluten och uppblåst



Fot



Enkammare vad (vad och lår)



Sekvensuppblåst (Tri Pulse) vad (eller vad och lår)

1
2

Nummer på slangsetanslutning



Indikator för tystat ljudlarm



Indikator för ljudlarmstatus

Under larm: indikerar att larmet kan tystas.



Volymindikator



Varningar och larm

Larm som kan orsaka avbrott i behandlingen har upptäckts.



Lågt tryck eller läckage i en manschett.



Vikt eller blockerat slangset.



Hög temperatur.



Hårdvarufel upptäckt eller periodisk service behövs.



Vänta – initierar indikator



Indikator för starta behandling

Visas i Standby när minst en manschett är ansluten.



Indikator för stoppa behandling

Visas i Körläge.



Nätspänningsindikatorer



Pump ansluten till nätspänningen.



Pump EJ ansluten till nätspänningen.



Batteriindikator



Batteriet är tomt



1/4 laddning



1/2 laddning



3/4 laddning



Fulladdat



Indikator för behandlingstid