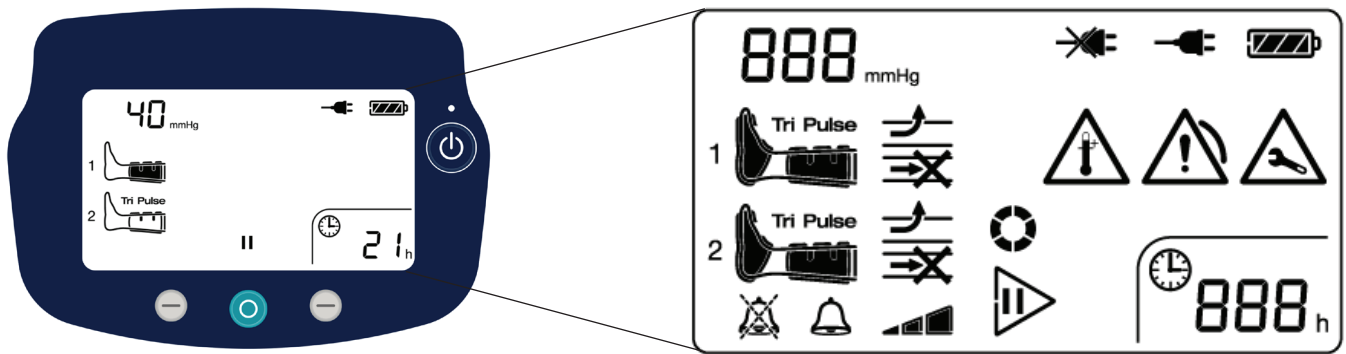


Flowtron ACS900

**ปุ่มเปิดปิดและไฟแสดงสถานะไฟหลัก**

กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะไฟหลักจะสว่าง
กดค้างไว้เพื่อปิด ไฟแสดงสถานะไฟหลักจะดับ

**ปุ่มควบคุมตรงกลาง**

กดเพื่อเริ่มการรักษา
กดค้างไว้เพื่อหยุดการรักษา

**ปุ่มควบคุมด้านซ้าย**

กดเพื่อปิดเสียงเตือน
กดค้างไว้เพื่อตั้งค่าระดับเสียงเตือน

**ปุ่มควบคุมด้านขวา**

กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดรีเซ็ตเวลาการรักษาผู้ป่วย

888 mmHg

ไฟแสดงสถานะแรงดันของแถบพัน**ไฟแสดงสถานะประเภทของแถบพันและการพองตัว**เชื่อมต่อ
ไม่เต็มลมเชื่อมต่อ
เต็มลม

เท้า

ส้นเท้า ที่น่อง (หรือ
น่องและต้นขา)ตามลำดับ (สามจังหวะ)
ที่น่อง (หรือน่องและต้นขา)1
2**หมายเลขข้อต่อชุดท่อ****ไฟแสดงสถานะปิดเสียงเตือน****ไฟแสดงสถานะเสียงเตือน**

ขณะที่เสียงเตือนดัง: บ่งบอกว่าปิดเสียงเตือนได้

**ไฟแสดงสถานะระดับเสียง****ไฟแสดงสถานะการเตือนและสัญญาณเตือน**

สัญญาณเตือนที่ตรวจพบอาจเป็นสาเหตุให้การรักษา
ถูกขัดจังหวะ



แรงดันต่ำหรือมีรอยรั่วที่แถบพัน



ชุดท่อบิดงอหรือตัน



อุณหภูมิสูง



ตรวจพบข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์หรือต้องได้รับ
บริการตามกำหนด

**รอ - กำลังเริ่มไฟแสดงสถานะ****ไฟแสดงสถานะเริ่มการรักษา**

ปรากฏในโหมดสแตนด์บายเมื่อมีการเชื่อมต่อ
แถบพันอย่างน้อยหนึ่งแถบ

**ไฟแสดงสถานะหยุดการรักษา**

ปรากฏในโหมดเปิดใช้งาน

**ไฟแสดงสถานะกระแสไฟหลัก**

ป้อนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว



ป้อนไม่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก

**ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่**

แบตเตอรี่ว่างเปล่า



แบตเตอรี่เต็ม 1/4



แบตเตอรี่เต็ม 1/2



แบตเตอรี่เต็ม 3/4



แบตเตอรี่เต็ม

**ไฟแสดงสถานะเวลาการรักษาผู้ป่วย**