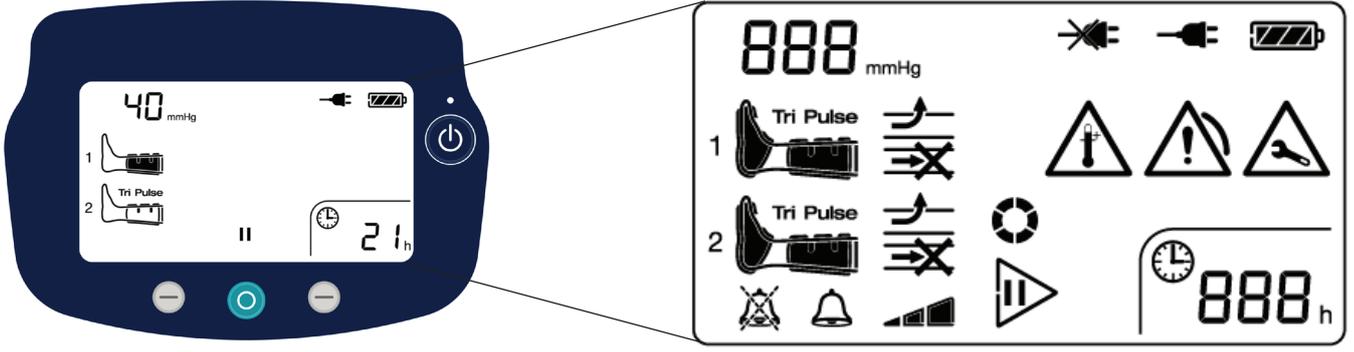


Flowtron ACS900

**Güç Düğmesi ve Şebeke Göstergesi**

Bekleme moduna almak için basılı tutun,
Şebeke Göstergesi yanar.
Kapatmak için basılı tutun,
Şebeke Göstergesi söner.

**Orta Kontrol düğmesi**

Tedaviyi başlatmak için basın.
Tedaviyi durdurmak için basılı tutun.

**Sol Kontrol düğmesi**

Sesli alarmı sessize almak için basın.
Alarm Ses Seviyesi Ayarları için basılı tutun.

**Sağ Kontrol düğmesi**

Hasta Çalışma Süresi modunu sıfırlamak
için basılı tutun.

888 mmHg

Manşon basıncı göstergesi**Manşon tipi ve şişirme göstergeleri**

Bağlı, şişirilmemiş Bağlı, şişirilmiş



Ayak



Tekdüze baldır (veya baldır ve uyluk)



Sıralı (Tri Pulse) baldır (veya baldır ve uyluk)

1
2**Boru seti konektör numaraları****Sesli alarm sessize alındı göstergesi****Sesli alarm durumu göstergesi**

Alarm çalarken: Alarmın sessize
alınabileceğini belirtir.

**Ses seviyesi göstergesi****Uyarı ve alarm göstergeleri**

Tedavinin kesilmesine neden olabilecek
alarm tespit edildi.



Düşük basınç veya manşonda sızıntı.



Bükülmüş veya tıkanmış boru seti.



Yüksek sıcaklık.



Donanım arızası tespit edildi veya periyodik
servis gerekli.

**Bekle - başlatma göstergesi****Tedavi başlatma göstergesi**

En az bir manşon bağlandığında Bekleme
modunda görüntülenir.

**Tedavi durdurma göstergesi**

Çalışma modunda gösterilir.

Şebeke gücü göstergesi

Pompa şebeke güç kaynağına bağlı.



Pompa, şebeke güç kaynağına bağlı DEĞİL.

**Batarya göstergesi**

Batarya boş



Batarya ¼ dolu



Batarya ½ dolu



Batarya ¾ dolu



Batarya dolu



888 h

Hasta çalışma süresi göstergesi