

機械器具 1 手術台及び治療台  
一般医療機器 汎用診療・処置台 JMDNコード:13958000

## 特定保守管理医療機器

## Lifeguard トロリー

## 【禁忌・禁止】


## 〈使用方法〉

- 合計積載重量が 250 kg を超過して使用しないこと。  
[LG50 および LG55 の使用時]
- 合計積載重量が 180 kg を超過して使用しないこと。  
[LG20 の使用時]


## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 構成

## (1) LG50 および LG55

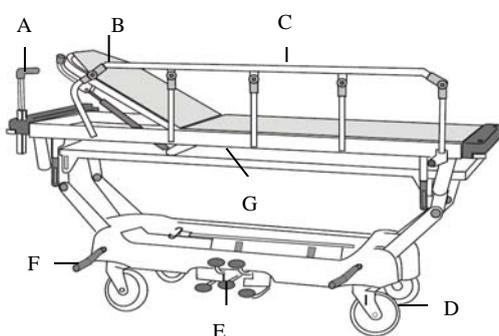

## (2) LG20

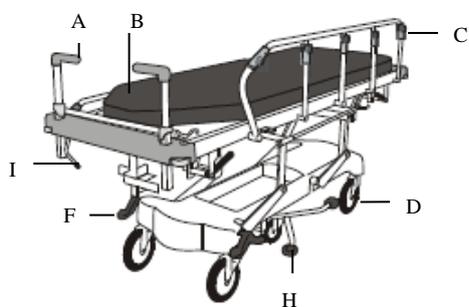

記号	名称
A	プッシュオーバーハンドル
B	背もたれ
C	サイドレール
D	キャスター
E	高さ/ティルト調整ペダル
F	トレーキペダル
G	X線カセット引き出し口 (LG55 のみ)
H	高さ調整ペダル
I	ティルト調整レバー

## 2. 原理

本品は、油圧により、ペダルを踏んでトロリーの高さ、前後傾斜を調節し、手動にて背もたれを調節する。

## 【使用目的は効果】

本品は診療又は処置のために用いる汎用の診療・処置台である。いくつかの基礎機能(昇降、傾斜等)を備える。診療室又は手術室において用いる。

## 【使用方法等】

- 本製品が水平の状態ではキャスターをロックし、高さおよび各プレート調整する。
- 患者を移し換える。
- ロックを外し、目的の場所に移動する。
- 目的の場所に到着後、キャスターをロックする。
- 患者に適切な処置を行う。

詳しくは『取扱説明書』の「使用方法」を参照すること。

## 【使用上の注意】

## 1. 重要な基本的注意

- トロリーを固定する際は必ずブレーキを使用すること。
- トロリーに患者を乗せて移動する際は、サイドレールを必ず上げること。
- トロリー上で患者の体位変換(横転)、水平移乗を行う場合、マットレスプラットフォームを作業しやすい高さに調整すること。また、患者の体重がマットレスプラットフォームへ均等に加わっていない場合、トロリーはバランスを失いやすいことに注意すること。
- トロリーを操作する前に、患者が正しい位置にあることを確認し、体が挟まったり、バランスを失ったりしないよう注意すること。
- サイドレールストッパーを引き込む際は、スライドキャッチ A のみを使用すること。なお、スライドキャッチ A については『取扱説明書』を参照すること。[LG55 の使用時]
- トロリーを移動する際は、サイドレールを押ししたり引いたりせず、プッシュオーバーハンドルのみを使用すること。
- サイドレールを下げる際、ストッパーやプラットフォームとの間に手や指を挟まないよう注意すること。

## 2. その他の注意

- 酸素供給チューブが可動部等に絡まったり、あるいは挟まったりしないよう注意すること。[酸素チューブの損傷や酸素供給の低下が発生する恐れがあるため]
- 必ず防護服を装着した上で、洗浄及び消毒を行うこと。
- その他の注意事項は『取扱説明書』の各章を参照すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 1. 保管方法

洗浄及び消毒では、フェノール系溶剤、研磨剤や研磨パッドを使用しないこと。また、カバーを煮沸消毒したり、オートクレーブ滅菌しないこと。[表面コーティングを損傷させる恐れがあるため]  
その他の注意事項は『取扱説明書』の各章を参照すること。

## 2. 使用期間(耐用期間)

保守点検を実施した場合 10年(自己認証)

## 【保守・点検に係る事項】

本体及び付属品は、年1回のメンテナンスが必要である。定期点検を弊社または取扱店に依頼すること。  
本体及び付属品類は、『取扱説明書』の「洗浄および消毒」に従って洗浄すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

**1. 使用者による保守点検事項**

『取扱説明書』の「点検・保守やメンテナンス」の毎日及び毎週のチェック事項に従って点検すること。

**2. 業者による保守点検事項**

『取扱説明書』の「点検・保守やメンテナンス」の毎年のチェック事項に従って点検すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者:

アルジョ・ジャパン株式会社

TEL03-6435-6401

外国製造業者:

輸入先国:ポーランド

製造所:ArjoHuntleigh Polska Sp. zo. o.

**取扱説明書を必ずご参照下さい。**